

WNA
beauty system



Benvenuti nel mondo di 



INDICE

IL MONDO DI UNA

Una nuova specie	5
Una enciclopedia di protocolli	7
Multitrattamento e Multitecnologia	9
Semplice da usare	11
Si aggiorna a distanza	13
Modulare	15
Connettori intelligenti	17
Cosmetici associati	19
Un negozio sempre aperto	21
Assistenza tecnica a distanza	23
Test Clinici	25
Sicurezza per te e le tue Clienti	27
Sempre in regola con la legge	29
Finalmente i conti tornano	31
Soluzioni finanziarie su misura	33
Elettronica evoluta	35

TECNOLOGIE E TIPOLOGIE

Tante domande, la risposta è UNA	39
Tecnologie	40
Tipologie	62

FUNZIONI INTEGRATE

Trattamenti	67
Clienti	69
Gestionale	71
Test	73

Formazione	75
Store	77
I dettagli che fanno la differenza	78

SUPPORTO

Corsi di Formazione	83
Giornata Porte Aperte	85
Poster personalizzabili	87
Brochure personalizzabili	89
Espositori	91
Insegne e vetrofanie	93
Arredamenti dedicati	95
Accessori e complementi	97

UNA INFO

Made in Italy, al 100%	101
Acquistare UNA	103
Partner Program	105
UNA e l'Ambiente	107

APPLICATORI

Applicatori	110
-------------	-----

DATI E INFORMAZIONI TECNICHE

Conosciamo UNA	116
Moduli e Tecnologie	119
Dati tecnici	120

- UV 
- Cavitazione 
- Infrarosso 
- Presso 
- Dermoabrasione 
- Laser Estetico 
- Cromo 
- Ultrasuoni 
- Elettrostimolazione 
- Microcorrenti 



- Radio Frequenza 
- Vacuum 
- Thermo 
- Fotostimolazione 
- Ionoforesi 
- Magneto 
- Mesoporazione 
- IPL Luce Pulsata 
- Criolettroforesi 
- Elettroporazione meso 

Una nuova specie

TUTTE LE TECNOLOGIE INTEGRATE IN "UNA" SOLA MACCHINA.

Cos'è UNA? È una piattaforma multi-tecnologia per trattamenti estetici professionali. Non solo una macchina, ma un sistema completo di funzioni, manipoli, accessori, cosmetici, strumenti di marketing e di vendita. Si aggiorna a distanza con nuovi trattamenti e funzionalità.

Si espande aggiungendo gli applicatori. Tutte le tecnologie, sia evolute che di base, sono integrate in "una" sola macchina. Per attivarle basta collegare l'applicatore in uno dei canali liberi ed eseguire il trattamento.





Una enciclopedia di protocolli

TI GUIDA PRIMA, DURANTE E DOPO IL TRATTAMENTO.

Enciclopedia di Protocolli. UNA contiene una vera e propria enciclopedia di protocolli, un grande sforzo scientifico fatto dai nostri medici, per rendere disponibili con lo stesso linguaggio e con la stessa forma, tutti i protocolli di tutte le tecnologie. Grazie a UNA non bisognerà più studiare un manuale per ogni macchina.

Un'immagine vale più di mille parole. Oltre a descrivere per ogni trattamento la procedura passo passo con le precauzioni e le controindicazioni, UNA ti guida nell'esecuzione con immagini e video chiari ed efficaci. Ti mostra come posizionare la Cliente, come si impugna correttamen-

te l'applicatore, quali sono le zone da trattare e quelle da evitare, come eseguire i movimenti, dove posizionare gli applicatori. Con UNA ogni trattamento è un vero e proprio corso di formazione.





Multitrattamento e Multitecnologia

PIÙ TRATTAMENTI DIVERSI. CONTEMPORANEAMENTE.

Più trattamenti nello stesso momento. Grazie ai canali indipendenti, con UNA puoi eseguire fino a tre trattamenti sulla stessa Cliente anche se di tecnologie diverse. Per esempio puoi trattare le gambe con la presso, mentre sul viso esegui un trattamento di radiofrequenza. Grazie al tempo che risparmi, puoi fare offerte più vantaggiose alle tue Clienti.

In tutta sicurezza. Non sei sicura che i trattamenti richiesti si possono fare insieme? Tranquilla: basta scegliere il nuovo trattamento e UNA ti avvisa se è compatibile con quello già in corso. Ogni singolo trattamento funziona in maniera indipendente e ha comandi separati, per la massima sicurezza, tua e della tua Cliente.



Medica





Si aggiorna a distanza

NON INVECCHIA MAI. SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI.

Con un tocco, Si aggiorna e Ti aggiorna. Grazie a UNA, sarai sempre aggiornata con le tendenze e le tecnologie del momento semplicemente toccando un tasto. In pochi minuti si collega al nostro sistema e si aggiorna da sola. Potrai così avere i nuovi trattamenti ed essere aggiornata con le nuove tendenze e scoperte.

Aggiornare UNA è facile. Basta un collegamento a Internet tramite Wi-Fi, rete LAN o con una chiavetta Internet con SIM di qualsiasi gestore. Nessuno spostamento, né perdita di tempo, né problemi di orario, nessun tecnico da attendere.

Sempre disponibile, 7 giorni su 7. Il servizio è sempre attivo per scaricare aggiornamenti di: sicurezza, nuove funzioni, trattamenti, applicatori, tecnologie, nuovi video, corsi di formazione, nuovi prodotti nello Store, offerte e sconti.



UNA



Modulare

PER FUTURE ESPANSIONI E VELOCE ASSISTENZA.

La prima macchina "a moduli" al mondo. Grazie alla stretta collaborazione tra i designer e gli ingegneri elettronici siamo riusciti a creare questo meraviglioso sistema modulare che ti consente una flessibilità mai vista prima.

Nascono nuove tecnologie? Nuovi moduli, non nuove macchine. Quando nascono nuove tecnologie si incorporano semplicemente installando nuovi moduli e aggiornando i trattamenti. In questo modo si può essere sempre aggiornati a un costo contenuto perché non devi acquistare una macchina intera.

Facili da cambiare, basti tu. I moduli "a cassetto" sono talmente facili da estrarre e da installare che potrai farlo direttamente tu, senza l'intervento di un tecnico o di attrezzature particolari, basta solo una moneta per svitare la vite di fissaggio ed estrarre il modulo.

Continui a lavorare, senza interruzioni. In caso di malfunzionamento di un modulo potrai continuare a lavorare utilizzando gli altri poiché sono indipendenti. Inoltre, nel caso fosse necessaria una riparazione, potrai inviarcì solo il modulo, non l'intera macchina!





Connettori intelligenti

RICONOSCE E VERIFICA GLI APPLICATORI.

Tanti applicatori, un solo modo di collegarli. UNA semplifica anche il collegamento degli applicatori: tutti hanno un solo tipo di connettore che si può inserire in uno qualsiasi dei canali a disposizione. Si inserisce con un clic e si estrae con facilità, senza possibilità di errori e in tutta sicurezza.



Li riconosce e li verifica. Ogni volta. Quando colleghi un applicatore, UNA verifica che funzioni correttamente e in sicurezza. Lo riconosce e ti mostra l'elenco dei trattamenti disponibili, scegli quello che vuoi eseguire e lo lanci senza perdite di tempo. Una spia luminosa ti segnala se l'applicatore deve essere ricalibrato, sostituito o riparato.





Cosmetici associati

PER TE SCEGLIAMO SOLO LE MIGLIORI REFERENZE.

I migliori per la migliore. La tua professionalità è legata ai risultati. Perciò abbiamo scelto per te le migliori aziende produttrici di cosmetici, creando una sinergia ideale tra i loro prodotti e i nostri trattamenti. Tutti i cosmetici sono caratterizzati da una gradevolezza unica, un piacere sensoriale sia per la Cliente che per l'Operatore che li applica.



Non solo per la cabina. Grazie ai nostri Partner, possiamo offrire una vasta gamma di prodotti anche per la cura domiciliare delle tue Clienti. Continuerai a prendertene cura non soltanto in cabina, ma anche a casa loro, per ottenere i risultati migliori grazie all'azione combinata dei prodotti.





Un negozio sempre aperto

ORDINI SOLO QUELLO CHE SERVE, QUANDO SERVE E QUANDO VUOI.

Un assortimento completo. Cosmetici, applicatori, consumabili, accessori, corsi, strumenti di marketing e di comunicazione, un assortimento completo di tutti i prodotti necessari per la tua attività.

Ordini quando vuoi. L'ordine lo fai direttamente dallo Store di UNA quando vuoi, a qualsiasi ora del giorno, con tranquillità. Non dovrai chiamare l'Azienda o essere infastidita da un rappresentante che tenta di venderti di tutto, anche prodotti che non usi o che hai ancora in magazzino.

Nessun ordine minimo. Puoi comprare anche un solo flacone di cosmetico o una singola monodose, non vi è un minimo di ordine di confezioni o di importo. In questo modo

potrai rifornirti dei prodotti che ti servono realmente, senza avere giacenze di magazzino.

Prodotti sempre freschi. Grazie al magazzino centralizzato per tutte le nostre Clienti, il prodotto è sempre fresco. In questo modo i lotti di produzione sono consumati velocemente e non vi sono rimanenze.





UNA

Assistenza tecnica a distanza

RISOLVIAMO IL PROBLEMA SENZA FARTI FERMARE.

C'è un problema? Lo risolviamo a distanza. UNA può collegarsi con noi per la procedura di teleassistenza, e un esperto provvederà a risolvere i problemi a distanza. Se ciò non fosse possibile, ti invieremo direttamente un nuovo modulo che potrai sostituire da te, senza bisogno di un tecnico.



UNA controlla la sua salute. UNA ha un sistema di auto-diagnosi che le permette di verificare, in ogni momento, il corretto funzionamento di tutti i suoi componenti e dei suoi sistemi di sicurezza. Grazie anche agli indicatori luminosi, avrai sempre sotto controllo lo stato di salute della tua UNA, dei moduli e degli applicatori collegati.





Test Clinici

UNA DELLE MACCHINE CON PIÙ TEST CLINICI AL MONDO.

Oltre 40 Studi Clinici attestano l'efficacia delle Tecnologie integrate in UNA. Tali studi, realizzati da primarie Università, Centri di Ricerca e Medici, portano UNA a essere una delle macchine con più Test Clinici presenti sul mercato.

Tecnologie Brevettate. Grazie al Partner Program, abbiamo siglato accordi con gli inventori e proprietari di importanti Tecnologie e le abbiamo incorporate in UNA, aggiungendo tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative. In questo modo, siamo riusciti a offrirti le migliori e più consolidate tecniche estetiche insieme ai prodotti associati.

Test continui. In stretta collaborazione con numerosi Enti di Ricerca, Università e ricercatori, continuiamo a creare e

testare nuovi protocolli di trattamento, da integrare in UNA, per offrirti soluzioni sempre all'avanguardia.



Università degli
Studi di Napoli



Università degli
Studi di Siena



Dipartimento di Fisica
Nucleare e Teorica Università
degli Studi di Pavia



Seconda Università
degli Studi di Napoli



Università degli
Studi di Firenze



Università degli
Studi di Bari



Università degli
Studi di Catania



CNR
Consiglio Nazionale delle
Ricerche



Institute for Bioprocessing
and Analytical Measurement
Techniques



Agorà - Società di
Medicina ad indirizzo
Estetico



Sicurezza per te e le tue Clienti


SISTEMI ATTIVI PER NON LASCIARE NULLA AL CASO.

Sistemi di Sicurezza attiva. All'interno di UNA abbiamo integrato più sistemi di sicurezza attiva che intervengono immediatamente, al minimo problema, e rispondenti ai più severi standard di sicurezza anche del settore medicale. Puntiamo a un concetto di sicurezza completa, che ti permetta di lavorare senza possibilità di incidenti.

Riduci i rischi di contenziosi legali. La maggior parte degli incidenti comincia prima del trattamento: una semplice distrazione, un prodotto inadeguato, una procedura sbagliata o un'informazione non ricevuta dalla Cliente, creano in pochi attimi situazioni pericolose.

Conoscere per prevenire. UNA previene possibili rischi indicandoti, per ciascun trattamento, quali sono le precauzioni da prendere, i controlli da fare e le zone da non trattare per eseguirlo in tutta sicurezza.

Lista di controllo. Solo dopo aver verificato l'assenza di tutte le controindicazioni della lista (allergie, terapie farmacologiche, malattie, problemi di pelle, ecc), UNA ti permette di avviare il trattamento. È possibile inoltre stampare l'informativa con le risposte ricevute, da far firmare alla Cliente.

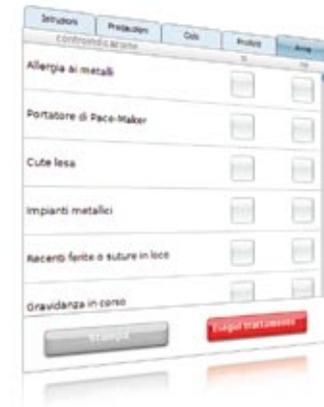



Sempre in regola con la legge

SI ADEGUA A DISTANZA AL CAMBIO DELLE NORMATIVE.

Le norme cambiano, UNA si adegua. Negli ultimi periodi si è avuta un'evoluzione della normativa che riguarda l'attività dell'estetista. Come tutte le altre funzionalità, anche i parametri di potenza di UNA si aggiornano a distanza, adeguandosi alle nuove leggi. Basta un semplice tocco, senza l'intervento di un tecnico.

Se vietano una tecnologia puoi usare le altre. L'ultimo decreto ha vietato l'utilizzo di alcune tecnologie nel campo estetico, destinandole solo all'uso medico. I centri che già le avevano acquistate, non le possono più utilizzare, pur dovendo continuare a pagare le macchine. Con UNA non hai questo problema, infatti l'esclusione di una tecnologia non comporta la dismissione dell'intera macchina, ma soltanto del singolo applicatore "vietato". Puoi continuare a lavorare con le altre tecnologie di UNA, sicura di non aver perso i tuoi soldi.

Abrogazione della legge. Qualora il decreto venisse revocato per i numerosi ricorsi presentati dalle associazioni di categoria, potrai nuovamente tirare fuori dal cassetto l'applicatore "vietato" e continuare a lavorare, senza perdere niente.





Finalmente i conti tornano

NATA PER FARTI GUADAGNARE.

Guadagnare o pagare le rate? Potrai finalmente lavorare e guadagnare, anziché lavorare solo per pagare un acquisto sbagliato. Ti sarà capitato di “spingere” particolari trattamenti perché avevi acquistato o noleggiato una macchina e dovevi pagarla. Con UNA, grazie all’ampia gamma di manipoli e al loro prezzo contenuto, potrai vendere solo i trattamenti realmente adatti alla tua Cliente, eseguiti con la tecnologia giusta, senza il rischio di perderle perché non ottengono risultati.

Clienti sempre soddisfatte. Perché perdere Clienti? Con UNA, comprando solo un nuovo applicatore e non una nuova macchina, potrai soddisfare qualsiasi loro richiesta, evitando che si rivolgano a centri più attrezzati.

Studi di settore. Per gli studi di settore il fatturato è proporzionale al numero di macchine che hai, e non tengono

conto che alcune tecnologie si usano raramente. Con UNA non avrai più problemi, in quanto è una sola macchina che usi per tutti i trattamenti.





Soluzioni finanziarie su misura

UN SOLIDO PARTNER AL TUO FIANCO.

Guadagnare sin da subito. Che sia Credito al Consumo, Leasing tradizionale o Noleggio Finanziario, abbiamo sempre la soluzione adatta alle tue esigenze. Grazie a queste formule finanziarie, puoi avere UNA sin da subito e guadagnare, proponendo alle tue clienti offerte vantaggiose per l'acquisto dei trattamenti eseguibili.



Per tutte le fasi dell'attività. Non solo per supportarti con la macchina, ma anche per vendere i pacchetti di trattamenti. Possiamo consigliarti particolari soluzioni proposte da società finanziarie per la vendita dei trattamenti alle tue Clienti con finanziamenti. Avrai tutti gli strumenti necessari per la tua attività, con un solo partner finanziario.





Electronica evoluta

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA.


Tanti cuori, un solo cervello. Tutti si chiedono come abbiamo fatto a concentrare tante tecnologie in una sola macchina. Di ogni tecnologia, abbiamo preso solo il cuore, la parte di potenza, e le abbiamo collegate a un solo cervello in grado di gestirle tutte con la massima efficienza, semplicità e sicurezza.



Componenti miniaturizzati. Per UNA abbiamo costruito le schede elettroniche in SMT. Questa tecnologia, usata per costruire i cellulari, utilizza componenti fino 50 volte più piccoli rispetto a quelli tradizionali. Grazie a questo, siamo riusciti a sfruttare ogni spazio libero e a inserire all'interno di UNA oltre 5.000 componenti elettronici.

Tecnologia tradizionale

Tecnologia SMT

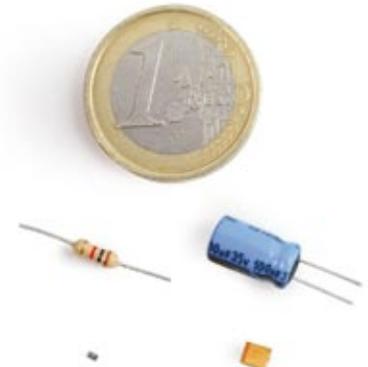

Tecnologie e tipologie

	DIMAGRIMENTO	ANTIAGEING	TONIFICAZIONE	PEELING	RUGHE	LIFTING	CAPILLARI	CELLULITE	ANTISTRESS	LINFODRENAGGIO	DETOSSINANTE	DEPILAZIONE	STIMOLANTE	IGIENE ORALE
ELETTROPORAZIONE	☐	☐	☐			☐	☐					☐		
LIPOCAVITAZIONE	☐													
RADIOFREQUENZA		☐	☐		☐		☐				☐			
CRIOELETTROFORESI	☐		☐				☐							
LASER ESTETICO		☐					☐	☐			☐			
MESOPORAZIONE	☐	☐	☐				☐							
IPL LUCE PULSATA		☐	☐								☐			
VACUUM	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐			☐		
PRESSO							☐							
ULTRASUONI	☐	☐	☐	☐			☐							☐
ELETTROSTIMOLAZIONE	☐		☐						☐			☐		
MICROCORRENTI			☐		☐	☐						☐		
THERMO	☐											☐		
FOTOSTIMOLAZIONE		☐									☐	☐	☐	
MAGNETO							☐	☐	☐		☐	☐		
U.V. ULTRAVIOLETTI												☐		
IR INFRAROSSO	☐						☐	☐				☐		
IONOFORESI	☐			☐			☐					☐		
CROMO					☐		☐	☐		☐		☐		
DERMOABRASIONE				☐										
OSSIGENO		☐	☐		☐	☐		☐						

Tante domande, la risposta è

TANTE ARMI PER COMBATTERE LO STESSO INESTETISMO.

Soluzioni diverse per lo stesso inestetismo. Con UNA, puoi trattare con la stessa tecnologia più inestetismi, così come, per ogni inestetismo, vi sono protocolli di diverse tecnologie. La tabella riportata a fianco, ti indica quali sono le combinazioni possibili.

Sempre il trattamento adatto. Ciascuno di noi ha caratteristiche fisiche e tipologie di pelle differenti. Grazie alla sua versatilità, UNA ti consente di risolvere qualsiasi tipo di problema estetico rispettando queste differenze. Se una tecnologia non è efficace per una Cliente, se ne può usare un'altra, e ottenere così sempre il migliore risultato.

Quale scegliere? Con la funzione Ricerca, basta selezionare il tipo di problema estetico che si vuole trattare: comparirà la lista dei trattamenti eseguibili e degli applicatori necessari.

Niente di più facile. Se non hai l'applicatore, basta aggiungerlo per eseguire il trattamento.



Elettroporazione

L'elettroporazione (detta anche mesoterapia senza aghi) è una metodica che provoca l'apertura di canali acquosi (elettropori), naturalmente presenti nella pelle, mediante specifiche forme d'onda. Come conseguenza si ha una maggiore veicolazione dei principi attivi dei cosmetici utilizzati. Esistono diverse tecniche, in base alla forma d'onda e alle modalità applicative utilizzate. L'elettroporazione ha tempi di

applicazione più brevi rispetto alla tradizionale ionoforesi, è assolutamente indolore e consente la veicolazione controllata di grandi quantità di principi attivi.



VISO

PANCIA


COSCE



Lipocavitazione

L'effetto "cavitazione" consiste nella formazione di micro bolle di vapore dovuta al trattamento di un liquido con ultrasuoni a bassa frequenza (da 20 KHz a 35 KHz). Se l'intensità dell'ultrasuono è adeguata, può causare la formazione, la crescita e una rapida esplosione delle bolle di vapore, con conseguente rilascio di energia. Se l'energia delle onde d'urto è rilasciata in prossimità delle cellule adipose,

si assiste a una vera e propria lisi cellulare, con un marcato effetto di riduzione delle adiposità localizzate (la cosiddetta lipolisi cavitazionale).

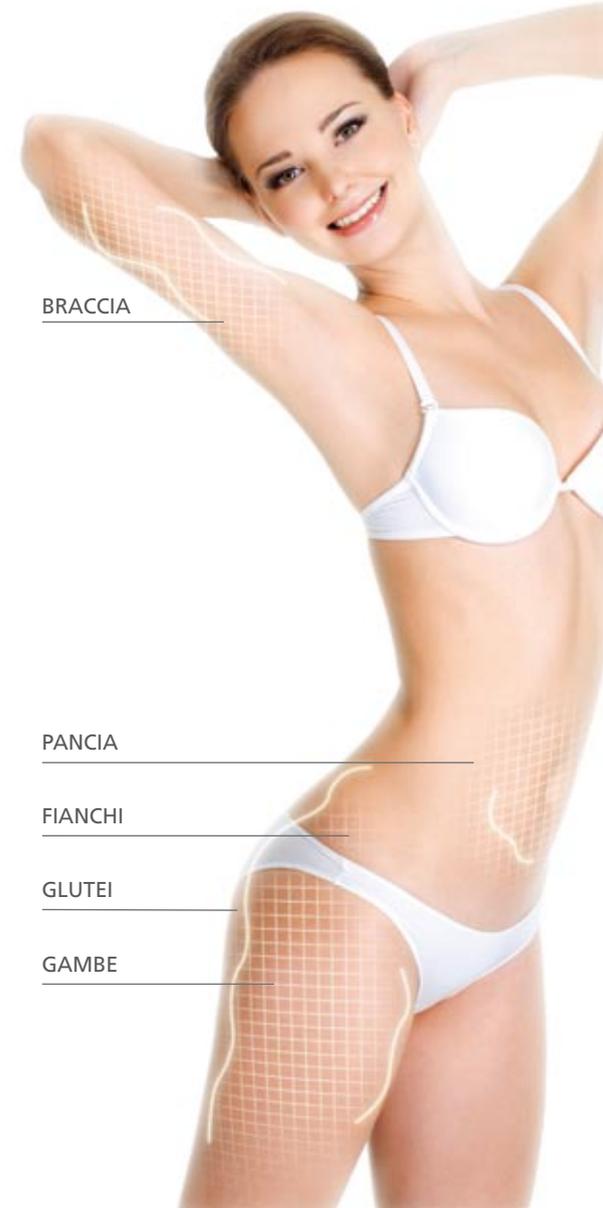

BRACCIA

PANCIA

FIANCHI

GLUTEI

GAMBE

Radiofrequenza

La radiofrequenza consiste nella generazione di calore endogeno negli strati interni della pelle mediante la trasmissione di un campo elettromagnetico. I tessuti interessati sviluppano calore in proporzione all'intensità di corrente indotta, alla resistenza opposta dai tessuti e alla durata del trattamento. In campo estetico trova applicazione nel trattamento delle lassità cutanee provocate dai

diversi processi di invecchiamento. L'effetto anti-ageing è particolarmente evidente a livello del contorno occhi, del viso e del collo, ma anche addome, interno cosce e braccia vengono notevolmente migliorati.

VISO

BRACCIA

PANCIA

COSCE



Criolettroforesi

La criolettroforesi è una tecnica che, attraverso l'utilizzo del freddo e di corrente elettrica a basso voltaggio, facilita la veicolazione transcutanea di principi attivi naturali. L'introduzione a basse temperature di diverse soluzioni cosmetiche disciolte nel ghiaccio, ne consente una maggiore e più profonda penetrazione, aumentando così la rapidità di assorbimento e ottimizzandone gli effetti.

In ambito estetico la criolettroforesi è particolarmente efficace contro gli inestetismi della cellulite, nella riduzione delle adiposità localizzate e nell'attenuazione dei segni del tempo su viso e corpo.




VISO

SENO

PANCIA

COSCE

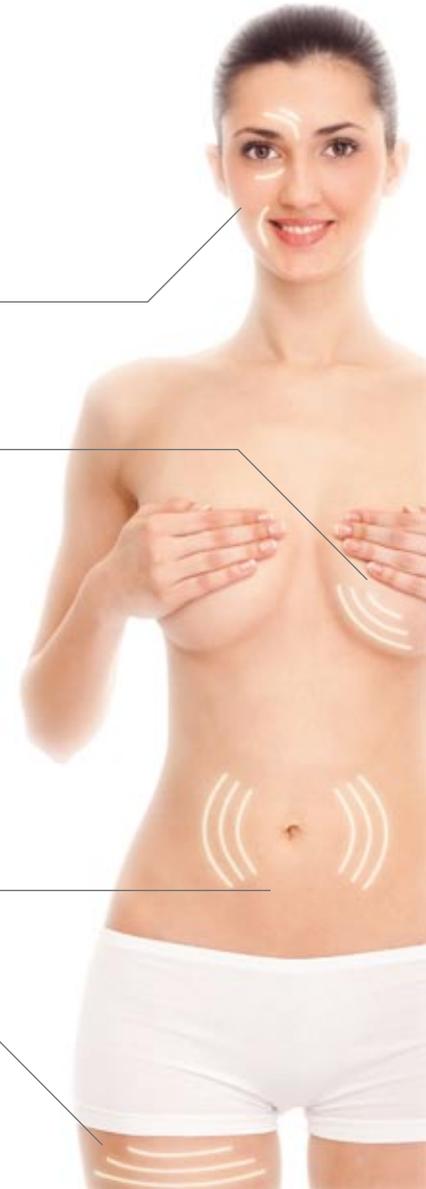

Laser estetico

Il LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ovvero amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni) è un dispositivo a elevata tecnologia in grado di amplificare in modo efficace le onde luminose. Esso interagisce con l'organismo umano in svariati modi, ragione per cui l'effetto dipende dalla tipologia di laser, dalla lunghezza d'onda

emessa, dalla potenza e dal tessuto target trattato (cromofori target). Per la sua versatilità il laser è uno strumento prezioso nell'ambito estetico per trattamenti quali: epilazione permanente, talengectasie, macchie cutanee, foto-ringiovanimento e molti altri trattamenti.



VISO

CORPO

GAMBE



Mesoporazione

La mesoporazione è un tecnica per la veicolazione trasdermica di cosmetici che vede la sinergia tra elettroporazione dei tessuti e stimolazione elettrica. Tramite l'erogazione di una forma d'onda opportunamente parametrizzata si promuove la creazione di famiglie di elettropori, con conseguente aumento della permeabilità cutanea, successivamente si veicola il cosmetico in profondità per elettrodiffusione

attraverso i nuovi percorsi intra ed extra cellulari generati nella fase di elettroporazione.

Grazie a questa tecnica si ha il vantaggio di veicolare in profondità anche molecole di grandi dimensioni nei vari strati della pelle.

VISO

SENO

PANCIA

GLUTEI

COSCE



IPL Luce Pulsata

L'IPL (Intense Pulsed Light, ovvero "luce pulsata ad alta intensità"), utilizza una sorgente di energia luminosa policromatica a elevata intensità. A seconda della lunghezza d'onda, l'energia del raggio luminoso viene assorbita a profondità diverse da alcune molecole (in particolare melanina ed emoglobina) presenti nel tessuto epiteliale. Tale interazione provoca diversi effetti biologici, quali: la fototermo-

lisi selettiva del pelo, la stimolazione dei fibroblasti, il miglioramento del tono delle pareti vasali.

L'IPL consente quindi di trattare in modo efficace e poco invasivo una vasta gamma di problematiche: macchie della pelle, peli in eccesso, couperose, rosacea, teleangectasie.

VISO

ASCELLE

BRACCIA

ADDOME

INGUINE

GAMBE



Vacuum

La vacuum consiste nell'effettuare un "massaggio" endodermico creato dalla generazione, tramite appositi applicatori, di arie di vuoto nei tessuti sottocutanei (aspirazione e depressurizzazione). Si ottiene così un effetto "ventosa" che, richiamando un maggior afflusso di sangue nella zona di applicazione, stimola l'ossigenazione dei tessuti interessati, velocizzando il ricambio di sostanze, favorendo l'elimina-

zione delle tossine e migliorando la circolazione venosa. In estetica è particolarmente efficace nei trattamenti lipolitici, anticellulitici e di ringiovanimento.




VISO

SENO

PANCIA

GLUTEI

COSCE

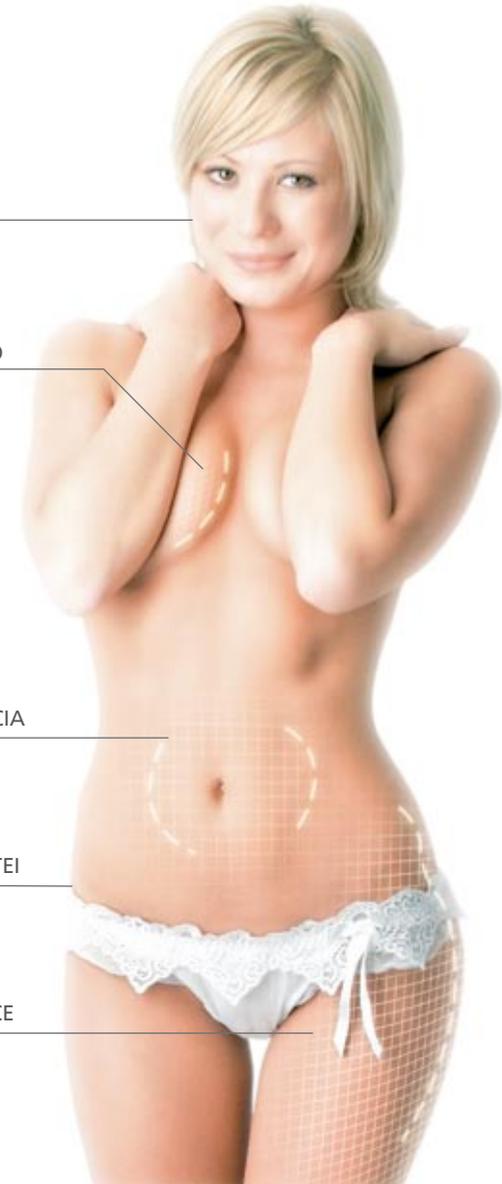

Presso

La tecnica del presso massaggio ricorre alla variazione controllata della pressione su determinati distretti corporei, migliorando notevolmente la circolazione venosa e linfatica. Questo tipo di "massaggio", eseguito mediante apposite sacche, favorisce l'eliminazione di gran parte dei liquidi di ristagno e dei residui metabolici, accumulati nei tessuti a causa della cattiva circolazione locale.

A differenza del massaggio manuale, questa tecnica provoca una pressione costante, sia per frequenza che per intensità, durante l'intera durata del trattamento; risulta quindi più simile ai normali processi circolatori, venosi e linfatici. Il ricorso alla presso migliora in modo evidente inestetismi quali: cellulite, ritenzione idrica, ectasie.

BRACCIA

PANCIA

FIANCHI

COSCE



Ultrasuoni

Gli ultrasuoni sono vibrazioni acustiche con frequenza maggiore di quelle udibili dall'orecchio umano (20.000 Hz), emesse da trasduttori in grado di trasformarle in "energia meccanica". Applicando tali trasduttori sulle zone da trattare, si provoca la penetrazione degli ultrasuoni nei tessuti interessati; a seconda della frequenza di emissione (che varia da 1 a 3 MHz) si possono ottenere diversi effetti

benefici. I principali sono una vasodilatazione reattiva, dovuta all'effetto termico, e uno scompaginamento per azione meccanica del collagene nei tessuti. Entrambi risultano particolarmente utili nei trattamenti di riduzione del grasso localizzato o altri particolari trattamenti in base al tipo di applicatore.



BRACCIA

PANCIA

FIANCHI

GLUTEI

COSCE



Elettrostimolazione

L'elettrostimolazione consiste nell'applicazione locale di impulsi elettrici al fine di ottenere un effetto biologico. Una scelta corretta sia della forma d'onda che dei parametri del trattamento (intensità, frequenza e durata) consente di ottenere una contrazione del muscolo ben visibile ma al contempo tollerabile, condizione necessaria per garantire risultati ottimali. A seconda della tipologia d'on-

da utilizzata si possono ottenere risultati quali la riduzione del grasso localizzato, il modellamento della silhouette, il rassodamento e la tonificazione muscolare. I trattamenti eseguibili con questa tecnologia sono: lifting viso e decolté, tonificazione muscolare, riduzione delle adiposità localizzate, linfo-drenaggio.



VISO


SENO

PANCIA

FIANCHI

GLUTEI

GAMBE

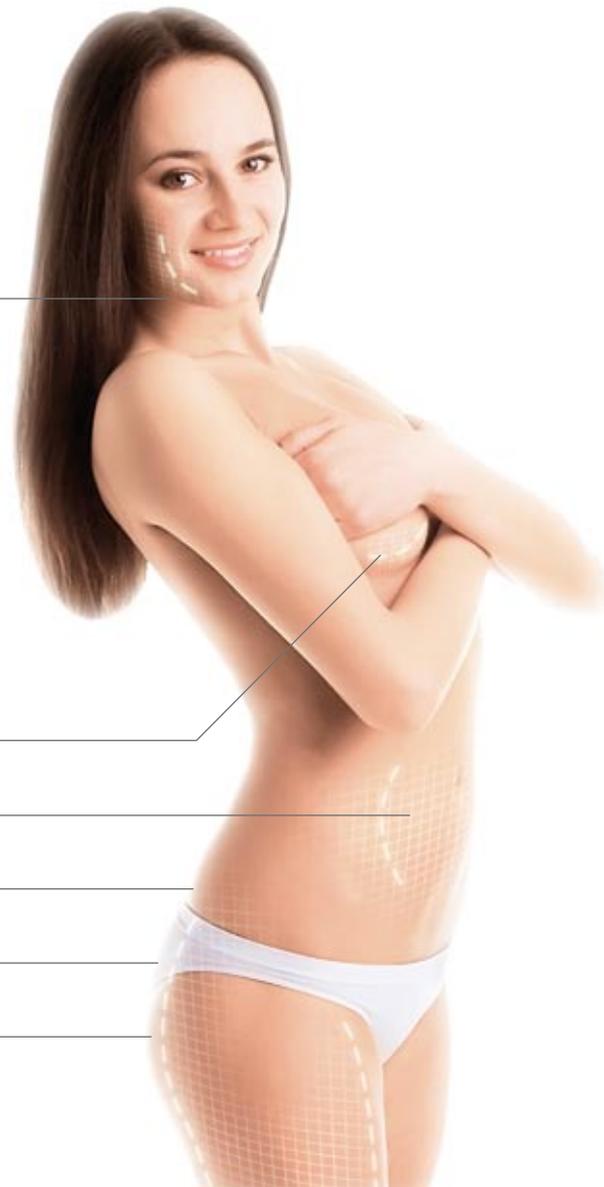

Microcorrenti

Le microcorrenti sono correnti a bassa intensità che si applicano in modo localizzato al fine di stimolare processi di rinnovamento cellulare. L'applicazione circoscritta di microcorrenti stimola a livello epidermico la fase infiammatoria essudativa (edema), con un richiamo d'acqua dagli strati più interni. Ciò provoca un'accelerazione della proliferazione dei fibroblasti, cellule deputate alla sintesi di collagene ed elastina.

Grazie a questo meccanismo il collagene non viene più introdotto dall'esterno, ma prodotto dall'organismo stesso, provocando risultati immediatamente visibili nella riduzione di rughe e solchi.

FRONTE

OCCHI

BOCCA



Thermo

La thermo consiste nell'induzione di calore, localmente o sull'intera superficie corporea attraverso diversi tipi di applicatori, che ha come primo effetto l'incremento dell'afflusso di sangue nel tessuto trattato. La vasodilatazione così ottenuta provoca un maggiore apporto di sostanze nutritive, ossigeno, globuli bianchi e anticorpi, facilitando l'eliminazione di sostanze dannose per l'organismo. A tale azione

detossinante si associano sovente anche effetti lipolitici e analgesici. La thermo, inoltre, è utilizzata per massimizzare i risultati di altri trattamenti estetici, combinati anche con i cosmetici.

CORPO

PANCIA

FIANCHI

GLUTEI

GAMBE



Fotostimolazione

La fotostimolazione consiste nell'esposizione programmata a una fonte di luce artificiale ad alta intensità e di diverse lunghezze d'onda (colore). In base al colore della luce, l'interazione tra fotoni luminosi e recettori cellulari modula una risposta biologica dei tessuti che attivano un processo definito foto-bio modulazione.

Tale attività influenza positivamente

l'equilibrio psico-fisico dell'individuo trattato e migliora i processi riparativi e rigenerativi. Non produce effetti collaterali e non ha particolari controindicazioni.

FRONTE

VISO

DENTI



Magneto

La magneto consiste nell'applicazione, locale o diffusa, di un campo magnetico sul corpo.

Gli effetti più importanti sono: la biostimolazione della riparazione tissutale, un'azione antinfiammatoria e la riduzione dei liquidi in eccesso.

In ambito prettamente estetico i campi magnetici trovano applicazione nei trattamenti mirati a contrastare la cellulite, migliorare la

circolazione locale (con conseguente beneficio sulla fragilità capillare), nella riduzione delle adiposità e nella cura di dermatosi di varia natura.

VISO

CORPO

GAMBE



UV Ultra violetti

Gli UV (o raggi attinici), sono radiazioni elettromagnetiche della banda dell'ultravioletto, che agiscono a livello cutaneo, in quanto la maggior parte di essi viene assorbita dalla cute senza raggiungere gli strati più profondi.

L'effetto più importante consiste nella stimolazione della produzione di melanina che, oltre a favorire l'abbronzatura, ha un'azione protettiva e battericida nei confronti

di molti microrganismi. I raggi UV sono quindi particolarmente indicati nella cura di malattie dermatologiche, e nella riduzione di particolari inestetismi in caso di trattamenti estetici.

VISO

CORPO



IR Infrarosso

Con il termine “infrarossi” si indicano quelle radiazioni luminose caratterizzate dalla vicinanza al colore rosso dello spettro visibile. I raggi Infrarossi vengono rapidamente assorbiti dagli strati superficiali della cute, dove provocano un incremento dell’afflusso di sangue nei tessuti interessati. Tale incremento comporta un maggior apporto di sostanze nutritive e di ossigeno attivo. Inoltre parte del calore prodotto

dagli Infrarossi, viene trasmesso nei tessuti profondi per conduzione e per mezzo dei liquidi circolanti, provocando l’aumento del metabolismo dei grassi e un buon rilascio muscolare.


VISO

CORPO

PANCIA

GLUTEI

COSCE

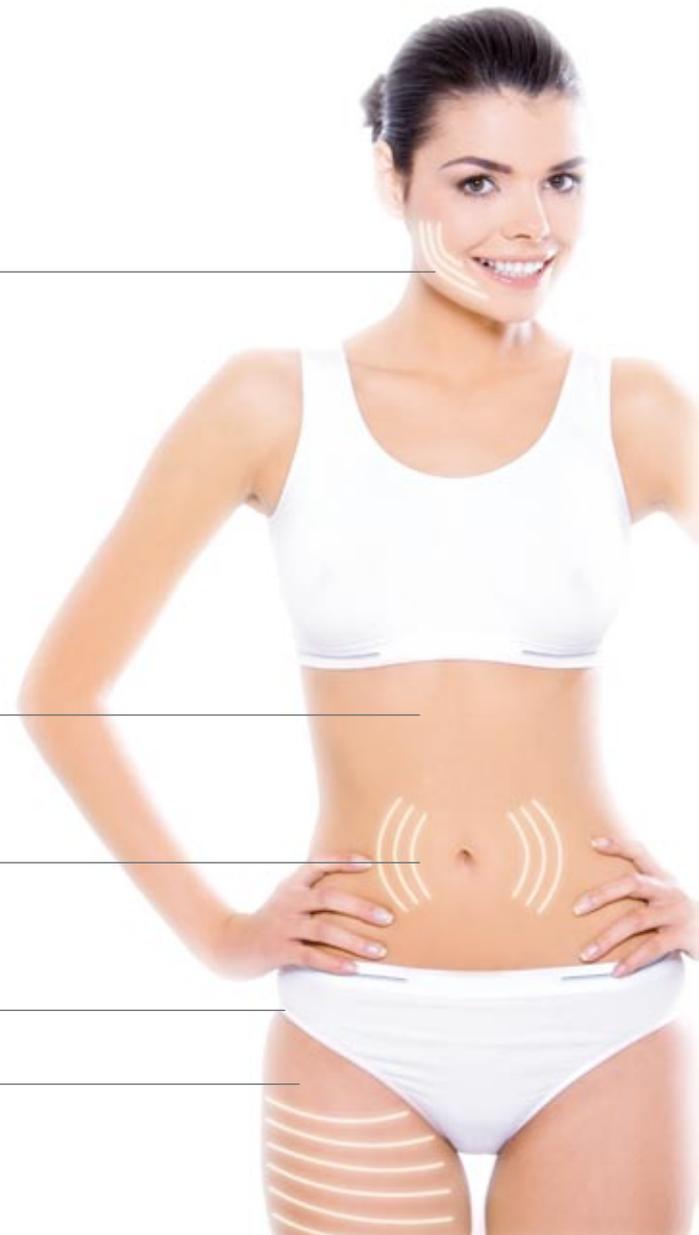

Ionoforesi

La ionoforesi (letteralmente “trasporto di ioni”) è un tipo di stimolazione elettrica che favorisce la penetrazione di un principio attivo per via transdermica. Ciò permette di introdurre, direttamente nella zona da trattare, sostanze semplici e naturali che, in tal modo, aumentano il proprio potenziale d’azione. Si ottengono così effetti uguali o superiori a quelli derivanti dalla somministrazione

di sostanze chimiche più complesse, che possono risultare nocive per l’organismo.

Trova valide applicazioni in campo estetico dove viene impiegata, ad esempio, per trattamenti anticellulite e per rassodare e tonificare i muscoli.

BRACCIA

PANCIA

FIANCHI

GLUTEI

COSCE




Cromo

La cromo è un'antica disciplina basata sull'utilizzo dell'energia dei colori, al fine di aiutare il corpo e la psiche a ritrovare il proprio naturale equilibrio. Ogni colore, a cui si può attribuire un peculiare effetto biologico, è associato a determinate caratteristiche psichiche e spirituali. Le onde elettromagnetiche della luce penetrano nei tessuti, ripristinando l'equilibrio cellulare a livello elettrico e chimico: le funzioni bio-

logiche dell'organismo ne traggono un immediato beneficio.

È importante sottolineare che la cromo non agisce semplicemente sui sintomi, ma va direttamente alle radici dello squilibrio psico-fisico; si evita in tal modo il ricorso a farmaci che spesso producono residui dannosi e difficili da smaltire.

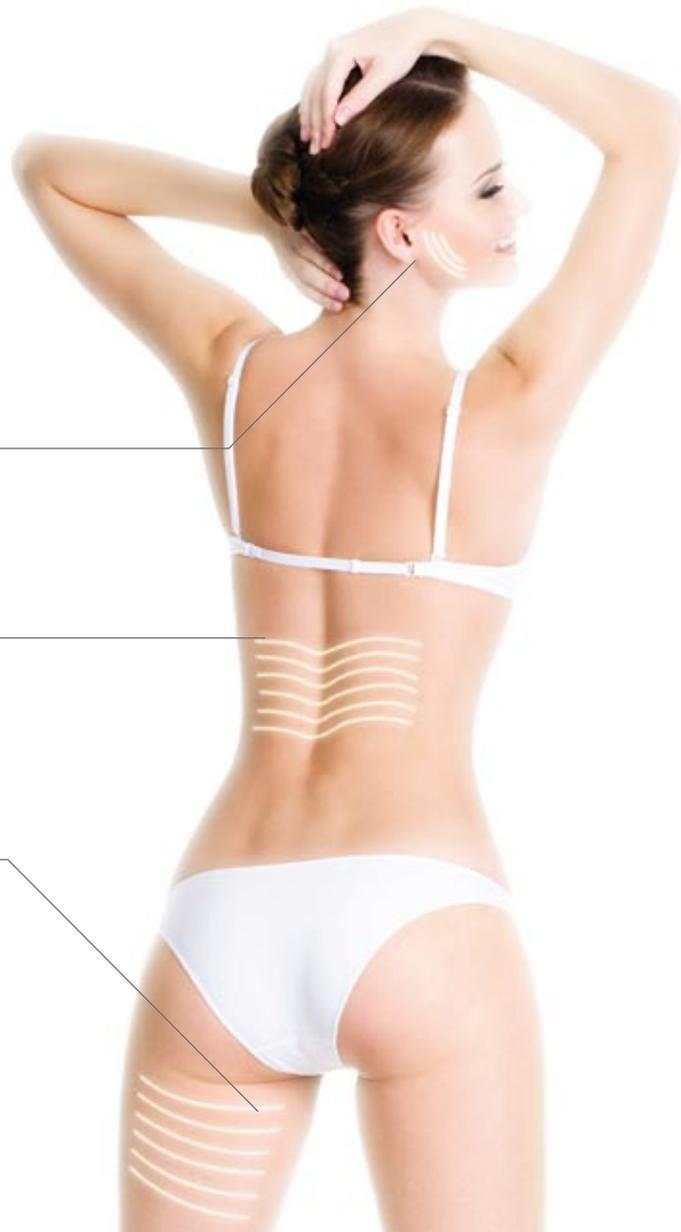

VISO

CORPO

GAMBE



Dermoabrasione

La dermoabrasione consiste nella rimozione meccanica degli strati epiteliali più superficiali, migliorando in tal modo le irregolarità della cute e donandole un aspetto più levigato e regolare. Tale rimozione produce un danno tissutale che, a sua volta, induce un'efficace stimolazione dei processi riparativi. Il risultato finale è quindi la riepitizzazione (ovvero la rinascita di nuova pelle) dell'area trattata.

Con la dermoabrasione, oltre a un significativo rinnovamento della pelle, è possibile correggere le cicatrici e le rughe più superficiali del viso, del contorno labbra e migliorare gli esiti cicatriziali da acne.

FRONTE

VISO

CONTORNO LABBRA



Ossigeno

Per trattamenti estetici con ossigeno si intende la metodica di supplementazione di ossigeno all'organismo attraverso la pelle. Questa è una tecnica di veicolazione transdermica che aumenta, in modo temporaneo, il contenuto di ossigeno disponibile a livello epidermico. L'ossigeno è erogato attraverso speciali dispositivi e manipoli: essi generano un getto pressurizzato che, a contatto con

la pelle, crea una depressione cutanea. Tale incurvamento superficiale si traduce in un'azione meccanica di distensione che allarga i pori, aumentandone la permeabilità: è così possibile la veicolazione, non solo dell'ossigeno, ma anche di miscele di principi attivi.

VISO

PANCIA

COSCE



Peeling Chimici

In questo gruppo rientrano tecniche che promuovono l'esfoliazione controllata degli strati superficiali della pelle, cioè l'eliminazione in primis dello strato corneo (Peeling Superficiali) e a seguire dei vari foglietti epidermici e del derma (Peeling Medio e Profondo), a seconda della finalità del peeling.

Le metodiche a disposizione sono diverse: ci sono peeling chimici molto delicati, da ripetere più volte

nell'arco dei mesi, e peeling aggressivi dai risultati importanti che richiedono un tempo di recupero che va da qualche giorno a una-due settimane. Il peeling è indicato a chi desidera migliorare la qualità e la luminosità della pelle. Agisce bene anche sulle rughette più sottili e nel tempo determina un aumento delle fibre collagene ed elastiche, quindi una migliore compattezza del derma.

VISO

CORPO



Tipologie

DIMAGRIMENTO

Ogni trattamento di natura fisica mirata alla riduzione dell'eccesso di grasso localizzato, senza necessariamente prevedere una riduzione ponderale, viene descritto come "dimagrimento localizzato". Il termine adiposità localizzata descrive la presenza di un tessuto adiposo sovrabbondante in una zona del corpo circoscritta, dovuta sia a un numero eccessivo di cellule adipose, sia a una iperplasia cellulare (aumento del volume della cellula adiposa). La quantità e la distribuzione di "grasso localizzato" varia per ciascun individuo in base al sesso, all'età, alla percentuale di grasso corporeo totale, ai propri geni, alla quantità e tipologia di attività fisica praticata.

ANTIAGEING

Ogni trattamento di natura cosmetologica o fisica, mirato a renaturare le fibre di collagene ed elastina viene definito trattamento "anti-ageing" (letteralmente "anti-invecchiamento"). Il processo di invecchiamento a carico del tessuto cutaneo viene invece detto ageing. Visivamente si nota un cedimento del tessuto cutaneo, la presenza di piccoli solchi o rughe, opacità cutanea, disidratazione.

TONIFICAZIONE

La tonificazione è un trattamento estetico che mira a recuperare e mantenere il tono, la luminosità e l'elasticità della pelle, attraverso la ricostituzione della sua fisiologica struttura di sostegno. La diminuzione del tono tissutale e muscolare rallenta il normale

metabolismo dei tessuti, accelerando ulteriormente il processo di invecchiamento. La pelle perde la sua normale elasticità e, appoggiandosi sui tessuti sottostanti, provoca una vera e propria compromissione della parte strutturale, vale a dire dei muscoli.

PEELING

Il peeling è una tecnica che comporta l'esfoliazione controllata degli strati superficiali della pelle. A seconda della finalità del trattamento si può ricorrere all'eliminazione del solo strato superficiale o dei foglietti epidermici più profondi. Le metodiche a disposizione sono innumerevoli: dai peeling chimici molto delicati, da ripetere più volte nell'arco dei mesi, a quelli più aggressivi, che garantiscono importanti risultati ma richiedono un tempo di recupero maggiore. Oltre ad agire sulle rughe più sottili, determina nel tempo un aumento delle fibre di collagene ed elastina. Risulta quindi particolarmente indicato per chi desidera migliorare la qualità, la luminosità e la compattezza della propria pelle.

RUGHE

Si definisce antirughe ogni trattamento finalizzato all'attenuazione e alla prevenzione delle rughe. Queste sono pieghe della superficie della pelle che si formano in aree più esposte come viso e décolleté, in seguito alla denaturazione delle fibre elastiche (elastina e collagene) e all'impoverimento della matrice di glicosamminoglicani. Le cause sono molteplici: lo scorrere del tempo, l'esposizione al sole e a climi particolarmente sfavorevoli, l'inquinamento atmosferico, agenti ossidanti (radicali liberi) nonché talune infezioni. Per contrastare l'insorgere

delle rughe e attenuare quelle esistenti, si può ricorrere a diverse strategie: dalla cosmetica preventiva o ricostitutiva alla chirurgia plastica.

LIFTING

Il lifting facciale è un intervento il cui scopo è il miglioramento dell'aspetto del viso, grazie all'attenuazione dei danni provocati dall'età e da fattori esterni. Il miglioramento viene ottenuto mediante lo stiramento della cute e dei muscoli del viso. Il risultato varia da soggetto a soggetto ed è influenzato dalle condizioni fisiche della cute, dal grado del danno prodotto dalle radiazioni solari, dalle strutture ossee sottostanti e da una varietà d'altri fattori. Oltre alla pratica chirurgica, si definiscono "lifting non invasivo" tutte quelle terapie e metodiche mirate a ottenere tale miglioramento estetico.

CAPILLARI

I capillari (teleangectasie) o vene a ragnatela sono uno degli inestetismi più comuni a carico delle zone a maggiore irrorazione sanguigna, come il volto e le gambe. Trattasi di piccoli capillari dilatati che assumono forme e colorazioni differenti: rosse lineari e ramificate (tipiche del volto), blu lineari (gambe), stellari (angiomi stellari). Gravidanza, sedentarietà, stazione eretta prolungata, sovrappeso, sono tra le cause predisponenti più frequenti. I trattamenti migliorativi spaziano dalla cosmesi preventiva e lenitiva, a trattamenti strumentali (laserterapia, veicolazione trasdermica, luce pulsata) fino a trattamenti seminvasivi come le iniezioni con sclerosanti.

CELLULITE

Si definisce trattamento anticellulite ogni pratica cosmetologica o fisica mirata alla riduzione degli inestetismi (buccia d'arancia, capillari a ragnatela, ritenzione idrica) associati alla cellulite. La cellulite consiste nell'alterazione delle cellule adipose, presenti nel tessuto sottocutaneo, che tendono ad aumentare di volume e numero fino a comprimere i capillari sanguigni, i quali iniziano a trasudare plasma. Con il passare del tempo, il plasma infiltrato tra la cellule, provoca un'inflammatione del tessuto adiposo con formazione di fibrosi nei tessuti sottocutanei. I capillari vengono ulteriormente compressi e il drenaggio dei liquidi in eccesso si fa sempre più difficile: si innesca così un circolo vizioso che porta a una progressiva degenerazione e sclerosi tissutale.

ANTISTRESS

Si definisce antistress, ogni trattamento mirato alla riduzione dei sintomi e al controllo delle cause dello stress. Lo stress è una reazione tipica di adattamento del corpo a un generico cambiamento fisico o psichico. L'organismo reagisce a tale stato aumentando o inibendo la secrezione di alcuni ormoni. Si può agire intervenendo direttamente sugli stimoli che generano l'evento stressante, tramite tecniche di rilassamento e trattamenti strumentali mirati a incrementare e migliorare i livelli delle sostanze messaggere, quali la serotonina, la noradrenalina e la dopamina.

LINFODRENAGGIO

Il linfodrenaggio è una particolare tecnica di massaggio che permette il drenaggio linfatico, ovvero l'eliminazione dei liquidi di ristagno interstiziali. Ciò provoca l'attivazione della circolazione venosa e l'eliminazione delle scorie presenti nell'organismo. Un buon linfodrenaggio svolge un ruolo fondamentale nel trattamento della cellulite, andando a contrastare la ritenzione idrica e l'edema caratteristico del tessuto liposclerotico. Tale tecnica agisce anche sul sistema neurovegetativo e sul sistema parasimpatico.

DETOSSINANTE

Si definisce detossinante ogni trattamento mirato alla riduzione delle tossine presenti nell'organismo. Innanzitutto è necessario distinguere le tossine endogene, che sono prodotte dal corpo come risultato dell'attività metabolica, dalle tossine esogene, che il corpo assorbe dall'ambiente esterno. Gran parte delle tossine endogene vengono eliminate dal fegato; quelle esogene richiedono invece trattamenti detossinanti, di natura sia alimentare che energetica. Affaticamento cronico, dolore muscolare e articolare, depressione, irritabilità, confusione, sono tra i sintomi più evidenti di un organismo "intossicato".

DEPILAZIONE

La superficie cutanea, sia nell'uomo che nella donna, è ricoperta di peli. Nella donna si ha solitamente, una sottile peluria, che talora può infittirsi e dare luogo alla formazione di veri e propri peli determinando un inestetismo. La rimozione dei peli superflui si ottiene con le tecniche più disparate che

vanno dal rasoio, agli agenti chimici, a sofisticate tecnologie elettroestetiche (IPL, elettrodepilazione, radiofrequenza, laser, etc). Si opera sempre un distinguo tra depilazione ed epilazione, infatti: la depilazione consiste nella rimozione del pelo a partire dal punto di emersione a livello della cute, l'epilazione consiste nella rimozione del pelo compreso il bulbo. Ovviamente i risultati migliori si ottengono con l'epilazione e non con la depilazione.

STIMOLANTE

Si definisce stimolo tutto ciò che riesce a eccitare un organismo o parte di esso, provocando una risposta o l'attivazione dello stesso. I nostri sensi sono continuamente colpiti da stimoli, cioè da sollecitazioni al cambiamento e il nostro sistema è pronto a recepirli per potersi riassetare. In questa ottica la stasi non è significativa, o comunque lo è meno del cambiamento: un trattamento stimolante si basa sull'erogazione di uno stimolo per contrastare proprio una situazione di stasi e produrre, di conseguenza, un effetto positivo.

Funzioni integrate



Trattamenti

The screenshot shows a software interface for a medical procedure titled "Lifting Mesoporaazione". The interface includes a search icon, a title bar, and several warning icons (exclamation mark, lightning bolt, and a pin). Below the title bar are tabs for "Istruzioni", "Precauzioni", "Cido", "Prodotti", and "Avvia".

The main area features a video player on the left showing a close-up of a person's face being treated with a device. The video has a progress bar at the bottom showing "1/4". To the right of the video is a large circular timer labeled "Minuti" with a red arc and a blue hand, displaying "-16". Below the timer are controls for "Contatto" and "Usa lo stilo".

At the bottom of the interface are two sliders for "Stilo" (set to 13%) and "Roll On" (set to 23%), each with minus and plus buttons. The interface is reflected below it.

Trattamenti

GLI STESSI COMANDI PER TUTTE LE TECNOLOGIE.

Niente comandi strani, niente sequenze da imparare.

Scegli il trattamento con il tocco di un dito, selezionandolo per Zona di applicazione, Tipologia, Tecnologia o Applicatore utilizzato, e lasciati guidare.

Ciascun trattamento è completo di istruzioni dettagliate con video e foto esplicative. Viene mostrata la posizione corretta per il soggetto e per l'applicatore, il numero e la durata dei cicli da eseguire

Ogni trattamento è anche un corso di formazione.

Puoi approfondire le tue conoscenze o apprendere nuove tecniche, prima di eseguire l'applicazione. Scorri le foto per controllare posizioni o percorsi dell'applicatore, verifica le controindicazioni e stampa l'informativa per la Cliente. Scopri i prodotti da utilizzare per il trattamento, tutti gli accessori e i consumabili. Se ne sei sprovvista puoi attivare la funzione Memo per comprarli direttamente dalla macchina successivamente.

Le principali funzioni sono:

- Aggiornamento da remoto con nuovi Trattamenti.
- Ricerca per Zona, Tecnologia, Tipologia e Applicatore.
- Istruzioni con Foto e Video per ciascun trattamento.
- Precauzioni e Controindicazioni.
- Ciclo ottimale del trattamento.
- Prodotti Associati (Cosmetici e Consumabili).
- Stampa Informativa alla Cliente.
- Funzione "Preferiti".





Clienti

		Scheda	Elenco
Nome	Cognome	Telefono	Cellulare
Samantha	Galdieri	0611111	33382263728
Mariena	Frali	0856927276	33582736332
Laura	Cherubini	08569231321	33582736332
Tommasina	Furfante	08569231321	33582736332
Genovetta	Salvi	0856922311	33582736332
Antonia	Zaffiro	0856927276	33582736332
Rosaria	Ranieri	0856922311	33582736332
Luca	De Gregori	0856927276	33582736332

Clienti

CONOSCERE I TUOI CLIENTI LI FARÀ SENTIRE A CASA.

Senza allontanarti dalla cabina puoi conoscere tutto ciò che serve alle tue Clienti. Senza acquistare altri software, puoi associare a ciascuna di loro, tutte le informazioni necessarie: le controindicazioni specifiche, le note per particolari esigenze o notizie, i trattamenti eseguiti e da eseguire. Puoi inoltre impostare e stampare, per ciascuna Cliente, il calendario degli appuntamenti e la scheda riepilogativa con tutte le informazioni o l'elenco completo. Tutto a portata di dita.



Scheda cliente

Le principali funzioni sono:

- Gestione anagrafiche Clienti.
- Visualizzazione a elenco e dettaglio scheda.
- Ricerca rapida da elenco.
- Registro trattamenti eseguiti.
- Promemoria trattamenti da eseguire.
- Anamnesi con campo note e controindicazioni.
- Salvataggio dati Cliente su smart card.
- Stampa elenco o scheda Clienti.



Trattamenti eseguiti e da eseguire



Ordini Appuntamenti Trattamenti

Download Add Calendar Print

Monday 9 August Tuesday 10 August Wednesday 11 August Thursday 12 August Friday 13 August

Time	Monday 9 August	Tuesday 10 August	Wednesday 11 August	Thursday 12 August	Friday 13 August
9:00					
10:00		Samantha Galdieri Peeling chimico viso	10.00-12.10 Samantha Galdieri Peeling viso chimico (Light)		Marlena Frati Depilazione Pinza Termolisi
11:00	Serena Cantalupi Ultrasoni glutei			Antonia Zaffro Depilazione Pinza Termolisi	
12:00					
13:00					
14:00		13.30-15.10 Marlena Frati Peeling viso spatola			
15:00	14.42-16.30 Samantha Galdieri Depilazione	14.42-17.00 Genoveffa Salmi Peeling viso Dermoab			
16:00					
17:00					

Gestionale

PIANIFICA E GESTISCI IL TUO CENTRO.

Tutto sotto controllo. Con il Planning organizzi e stampi gli appuntamenti in modo semplice. Puoi spostarli tra i giorni, trascinandoli con un dito. Puoi gestire il listino prezzi di tutti i trattamenti del Centro, anche di quelli non eseguibili con UNA, e verificare lo stato degli ordini dello Store. Con un'organizzazione così semplice e completa, potrai dedicare sempre più tempo alla promozione dei Trattamenti e a altre attività più importanti.

Le principali funzioni sono:

- Planning appuntamenti: giorno, settimana, mese, anno.
- Dettaglio appuntamento: Cliente, tipo, ora, data, note.
- Funzionalità "drag & drop" per spostare gli appuntamenti.
- Impostazione orario e giorni di lavoro.
- Gestione ordini dello Store.
- Gestione listino prezzi trattamenti.



Listino trattamenti



Gestione appuntamenti



Test

A screenshot of a software interface for skin treatments. The interface is light blue and white. At the top right, there is a search icon. Below it, a navigation bar contains four icons: a person, a target, and a star. The text "Tipologie" is centered below these icons. To the right of the navigation bar, it says "0 TRATTAMENTI DISPONIBILI" and has two buttons: "Tutti" and "Pre feriti". On the left side, there is a sidebar with a button labeled "Valutazione superficie" and a right-pointing arrow. The main area displays two treatment entries, each with a small image of a person's face and a blue device. The first entry is "Valutazione nei" and the second is "Valutazione Depilazione". Both entries have the same details: "Tipologia: Valutazione superfic", "Applicatore : Microscopio Dyno", and "Tecnologia: Dermomicroscopia". Each entry has a right-pointing arrow.

Test

NON SOLO PER FARE, MA ANCHE PER MISURARE.

UNA è anche uno strumento di Test in grado di effettuare valutazioni comparative, della pelle e della massa grassa e molti altri Test. I risultati possono essere associati alla Cliente per valutare i progressi dei trattamenti eseguiti.

Anche per i Test, come per i trattamenti, tutte le procedure sono accuratamente illustrate e guidate con istruzioni scritte, foto e video, e hanno la stessa impostazione dei trattamenti.

È possibile personalizzare la stampa dei Test con i dati del Centro e della Cliente.

Le principali funzioni sono:

- Aggiornamento da remoto con nuovi Test.
- Unica interfaccia per tutti i Test Eseguibili.
- Ricerca per Zona, Tecnologia, Tipologia e Applicatore.

- Istruzioni dettagliate con Foto e Video per ciascun Test.
- Prodotti Associati a ciascun Test.
- Selezione come "Preferiti".
- Stampa risultati dei Test con nome della Cliente.
- Stampe Personalizzabili con nome del Centro.





Formazione

Consultazione E-Learning

Controindicazioni

- Allergia ai metalli >
- Portatore di Pace-Maker >
- Cute lesa >
- Cardiopatía >
- Gravidanza in corso >
- Ciclo mestruale >
- Impianti metallici >
- Rischio o recenti trombosi >
- Portatori di spirale (IUD) >

Le allergie di questo tipo si manifestano prevalentemente nei confronti di metalli quali cobalto, mercurio, cromo e nichel.

- Il cobalto si trova nel cemento, in alcuni detersivi e oli lubrificanti.
- Il mercurio è contenuto in alcuni cosmetici, coloranti, cere e vernici.
- Il cromo si trova nel cemento, nei detersivi, nei candeggianti, nei saponi, nel cuoio, nelle sostanze antiruggine.
- Il nichel è presente nei coloranti, soprattutto quelli a base di anilina, utilizzati nella lavorazione di pelle, pellicce, gomma ma viene utilizzato anche per la placcatura di orecchini, collane, braccialetti e si può ritrovare nella composizione di cosmetici.

Codice Internazionale OMS L23.0

Formazione

PER DARE SEMPRE LE RISPOSTE GIUSTE AI CLIENTI.

UNA esegue. UNA aggiorna. UNA insegna. Le Clienti di oggi sono sempre più aggiornate grazie alla diffusione delle informazioni tramite stampa e internet, e vogliono trovare sempre interlocutori preparati. All'interno di UNA troverai i principali concetti di tutte le tecnologie, studi clinici e descrizione delle controindicazioni per poter sempre rispondere a tutte le domande.

Nasce una nuova tecnologia? Si sviluppano nuovi trattamenti? UNA si aggiorna e ti aggiorna con i concetti principali o ti propone un corso di formazione (e-Learning) per conoscerli e usarli. Con i test online di verifica, puoi ottenere attestati di preparazione. Tutto senza spostarti dal tuo Centro: scarica automaticamente il corso e aggiornati

Le principali funzioni sono:

- Dizionario tecnologie.

- Supporto scientifico per tecnologie.
- Dizionario tipologie.
- Dizionario simboli di sicurezza associati agli applicatori.
- Dizionario controindicazioni con descrizione e codice OMS.
- Test per verificare l'apprendimento dei corsi.



Dizionario warnings



Store

		Catalogo	Da acquistare	Carrello					
		Tutto	Applicatori	Cosmetici	Accessori	Consumabili	Videocorsi	Trattamenti	Altro
	Nome	Prezzo	Ricorda	Acquista					
	Elettrodi 2 CH	€ 126,00	<input type="checkbox"/>						
	Testina 1MHz	€ 249,40	<input type="checkbox"/>						
	Testina 3MHz	€ 249,40	<input type="checkbox"/>						
	Pinza depilazione	€ 134,71	<input type="checkbox"/>						
	Spatola ad Ultrasuoni	€ 779,95	<input type="checkbox"/>						
	Applicatore a sfere	€ 137,46	<input type="checkbox"/>						
	Manipolo laser	€ 525,00	<input type="checkbox"/>						
	Elettrostimolazione 8 CH	€ 760,00	<input type="checkbox"/>						
	Manipolo Microelettrodi laser	€ 152,20	<input type="checkbox"/>						

Store

UNA, IL TUO NEGOZIO SPECIALIZZATO.

Lo Store è il negozio integrato direttamente in UNA

dal quale puoi acquistare in tempo reale tutto ciò che ti serve in pochi semplici gesti.

Stai eseguendo un trattamento e ti accorgi che il prodotto sta per finire? Con un tocco lo metti nella Lista della spesa ("Memo") per ordinarlo più tardi, senza dimenticare nulla e controllando in tutta tranquillità il tuo magazzino.

Le principali funzioni sono:

- Catalogo generale dei prodotti.
- Eenco per categorie (Cosmetici, Applicatori, Accessori, ecc).
- Funzione "Memo", per ricordare i prodotti da acquistare.
- Acquisti e sconti per quantità.
- Scelta dei metodi di pagamento.
- Scelta dei metodi di spedizione.
- Accesso 24 ore su 24.



I dettagli che fanno la differenza



Ricerca trattamenti. Trova il trattamento che vuoi scegliendolo per Applicatore, Zona (gambe, viso...), Tecnologia (ultrasuoni, radiofrequenza...) o Tipologia di inestetismo (dimagrimento, tonificazione, depilazione...). Oppure inserisci l'Applicatore e immediatamente comparirà l'elenco di tutti i trattamenti che puoi fare.



Smart Card. UNA ha un lettore di Smart Card col quale puoi gestire la sicurezza (Card Proprietario) o leggere i dati delle Card delle tue Clienti. È possibile acquistare Card personalizzate con il logo e i colori del tuo Centro da rilasciare alle Clienti, per gestire campagne di fidelizzazione o di marketing.

Supporto

PER VENDERE, IMPARARE, COMUNICARE.



Corsi di Formazione

AGGIORNAMENTO CONTINUO E CERTIFICATO.

Da noi: i nostri esperti per te. Il nostro supporto al tuo lavoro inizia col garantirti formazione e competenza. Oltre ad affiancarti nell'esecuzione dei singoli trattamenti, UNA ti consente di acquisire nuove competenze tecniche durante i Corsi di Formazione e di Aggiornamento - tenuti da esperti e specialisti - che si tengono regolarmente e gratuitamente presso la nostra sede.

Da te: competenza certificata. È importante saper dare sempre la risposta giusta. Se non puoi partecipare ai Corsi organizzati presso la nostra sede, potrai comunque garantirti un aggiornamento costante e di qualità. UNA ti consente infatti di integrare o acquisire nuove competenze grazie alla funzione E-Learning. In qualsiasi momento potrai scaricare i corsi, studiare le dispense, accedere all'area Test e verificare la tua preparazione.

Attestati. Superato l'esame riceverai gli Attestati che certificano le tue competenze direttamente presso il tuo Centro. Affinché la tua professionalità sia riconosciuta anche dagli altri.





Giornata Porte Aperte

AL TUO FIANCO: PROMOZIONE E FORMAZIONE.

Con te per promuoverti. Avrai la possibilità di organizzare delle Giornate Porte Aperte, anche più volte l'anno, per promuovere nuove tecnologie con il supporto delle nostre Beauty Consultant. Ti forniamo un kit completo per pubblicizzare al meglio queste Giornate: volantini, poster, inviti, brochure, tutto personalizzato con il tuo nome.



Con te per formarti. Questi momenti non rivestono solo una funzione promozionale, ma si trasformano anche in importanti occasioni di formazione. Le nostre Beauty Consultant, infatti, mostreranno a te e ai tuoi collaboratori come eseguire al meglio ogni trattamento delle tecnologie che già hai, o di quelle a cui sei interessata.



TUO NOME

IPL LUCE PULSATA

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE



VISO

ASCELLE

BRACCIA

ADDOME

GAMBE



UNIA
EPI

www.unabeauty.it

GRATIS
FELIX
ART

Poster personalizzabili

PER TUTTE LE ESIGENZE, IN TUTTE LE MISURE CHE VUOI.

Nuovo applicatore, nuova comunicazione. Realizziamo per te Poster personalizzati con il tuo nome, dove il tuo Centro e la tecnologia che vuoi pubblicizzare sono sempre in primo piano. La proposta comunicativa cambia ogni anno, con nuove modelle o nuovi testimonial, in modo che l'immagine del tuo Centro sia sempre aggiornata.



Ampia scelta di formati. Nel nostro catalogo marketing, puoi scegliere il Poster da personalizzare tra decine di soluzioni in base ai trattamenti o alle tecnologie. I Poster sono disponibili in diverse dimensioni e materiali, per trarre il massimo vantaggio da ogni tuo spazio, dalla semplice locandina per la tua vetrina ai tabelloni stradali.





LA TECNOLOGIA
NON INVASIVA
AL SERVIZIO DEL TUO
BENESSERE.



UNIV
TECNOLOGIA

Brochure personalizzabili

COMPONILE IN BASE ALLE TECNOLOGIE CHE USI.

Promuovi ciò che vuoi, acquisti solo su richiesta. Puoi pubblicizzare le tecnologie che ancora non hai e acquistare solo gli applicatori per i trattamenti che ti vengono richiesti. Una volta ordinati, li riceverai in pochissimo tempo così da poter già pianificare gli appuntamenti. Per investimenti davvero mirati.



Scegli tu quale usare. A tre ante, per una comunicazione veloce e incisiva, o con più spazio per poter descrivere i trattamenti e le tecnologie? Oltre ad assisterti nella scelta della brochure più adatta alle tue campagne promozionali, ti assistiamo anche nella realizzazione: possiamo stamparli noi o inviare al tuo tipografo di fiducia i file definitivi.



TUO NOME

CROMO

L'ENERGIA DEI COLORI PER IL TUO BENESSERE PSICO-FISICO



- ARMONIZZAZIONE DEI RITMI
- POTENZA L'ELASTICITÀ E IL TONO DEL TUO TESSUTO
- APORTA LA RILASSAZIONE AL SUO QUOTIDIANO (NON SOLO ESTIVALE)

UNUN
TECHNOLOGY

www.unbeauty.it



TUO NOME

MESOPORAZIONE RADIOFREQUENZA PRESSO



MESOPORAZIONE

- ATTENUA LE IRREGOLARITÀ DELLA CELLULITE
- RIDUCE LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
- ATTENDE I SEGNALI DEL TEMPO: BRUCHE, SMAGLIATURE, MACCHIE SENNI
- CONTRASTA EFFICACEMENTE IPOTONIE E CEDIMENTI TISSUTALI

RADIOFREQUENZA

- ATTENUAZIONE VISIBILE DELLE RUGHE
- MIGLIORAMENTO DELL'OSSIDENAZIONE DEI TESSUTI
- RARMONIZZAZIONE DELLA FISIONOMIA DEL VISO

PRESSO

- RIDUCE GLI INTESTINI DELLA CELLULITE
- DRENA EFFICACEMENTE I LIQUIDI IN ECCESSO
- MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE VENOSA E LINFATICA

UNUN
TECHNOLOGY

www.unbeauty.it

VISO

BRACCIA

PANCA

FIANCHI

COSCE



Espositori

VALORIZZA LA TUA IMMAGINE.

Per non passare mai inosservata. Una vasta gamma di soluzioni espositive professionali per promuovere al meglio la tua immagine: fisse o mobili, monofacciali o bifacciali, con i poster che scegli e che puoi sostituire da sola. Per fare in modo che il tuo messaggio colpisca sempre nel segno.



Illumina la tua comunicazione. Potrai scegliere eleganti espositori luminosi disponibili in diversi formati per meglio adattarli agli spazi del tuo Centro. Anche in questi modelli il poster retroilluminato è intercambiabile, per sostituirlo con facilità direttamente da sola.





WINA

P O I N T

BEAUTY CENTER

CENTRO AUTORIZZATO
A NORMA DI LEGGE

2011

Insegne e vetrofanie

GUIDA LE CLIENTI NEL POSTO GIUSTO.

La tua vetrina: il tuo biglietto da visita. Personalizza le tue vetrine e la tua porta d'ingresso con le vetrofanie UNA e mostra fin da subito i servizi che puoi offrire.

Un'ampia scelta di forme e dimensioni di vetrofanie, realizzate in base ai livelli di competenze acquisiti con i corsi o alle tecnologie (applicatori) che si posseggono.



Segno di competenza e professionalità. L'uso dell'insegna UNA trasmetterà un segnale positivo alla clientela vecchia e nuova. Si saprà immediatamente che fai parte di un circuito che utilizza metodiche di trattamento collaudate e clinicamente testate. Entrare nel tuo centro significherà trovare tutto questo: competenza, professionalità e sicurezza.





UNA
L'ospitalità
virtuosa

UNA

Arredamenti dedicati

COMPLEMENTI DI ARREDO MODULARI.

L'unico limite è la tua fantasia. Ogni singolo modulo è un pezzo a sé stante, che puoi utilizzare singolarmente o associato ad altri, realizzando la composizione più funzionale e adatta alle tue esigenze.

I quattro elementi base si possono completare con un'ampia gamma di accessori, di facile integrazione.

Accessori dei moduli:

- Cassetti apribili da entrambi i lati.
- Ripiani in varie misure.
- Ante in vetro con chiave di sicurezza.
- Ganci da parete e piedini livellanti.
- Illuminazione interna per ciascun modulo.





Accessori e complementi

LA MASSIMA CURA, ANCHE NEI DETTAGLI.

Accessori. UNA fornisce tutto ciò che ti serve per svolgere al meglio il tuo lavoro. Nello Store, insieme a tutti gli altri prodotti, troverai anche molti accessori, come i comodi carrelli o i trolley antiurto per il trasporto della tua UNA, il tutto disponibile in più modelli e formati. Il catalogo è in continua evoluzione con prodotti già disponibili o in preparazione.



Ricami personalizzati. Punta su un'immagine coordinata di grande impatto: avere il camice o le semplici asciugamani personalizzate con il nome di UNA, ti darà un'immagine diversa, più professionale. Ti offriamo un servizio di ricamificio per personalizzare ogni capo che ti interessa scelto tra una vasta gamma di prodotti, con il logo del tuo Centro.



UNA Info



Made in ITALY, al 100%

PENSATA, PROGETTATA E PRODOTTA IN ITALIA.

Chi siamo. Da oltre 15 anni progettiamo e produciamo, per conto di aziende internazionali, apparecchiature elettroniche per il settore Estetico, Medico, Militare, Aereospaziale e Sicurezza. I prodotti da noi realizzati, sono validati dai più importanti enti di certificazione sia in Europa (Ministeri, Università) che negli Stati Uniti (FDA).



Tutto all'interno. UNA è stata progettata all'interno della nostra azienda: dall'elettronica, al software fino alla grafica. È costruita interamente dalle nostre linee di produzione: dalle schede elettroniche, agli assemblaggi fino ai collaudi. Grazie a questo è stato possibile realizzare quello che forse è il più evoluto sistema nel suo genere a un prezzo vantaggioso.





Acquistare UNA

COME AVERE UNA NEL TUO CENTRO.

Prima fai una prova

L'esperienza diretta è insostituibile. È molto difficile spiegare a parole la semplicità d'uso di UNA e la percezione di qualità che trasmette fin dal primo utilizzo. Solo vedendola e usandola puoi comprendere la differenza rispetto ad altri sistemi.

Un agente porterà UNA nel tuo Centro. Puoi concordare una visita, direttamente presso il tuo Centro, del nostro agente di zona che ti porterà UNA per farti conoscere tutte le sue funzioni. La visita è senza alcun impegno di acquisto.

Vieni a trovarci in fabbrica. Se vuoi informazioni più approfondite e vuoi anche vedere dove viene prodotta, puoi concordare una visita durante uno dei giorni di formazione. I nostri consulenti ti potranno far eseguire delle prove pratiche per farti apprezzare l'efficacia dei trattamenti.

Modalità

La compri in fabbrica. L'acquisto viene fatto direttamente da noi attraverso gli agenti. La nostra organizzazione commerciale non prevede distributori o rivenditori: niente costi aggiuntivi per te. Non è previsto il noleggio, il comodato, il pay per use.

Metodi di pagamento. Esistono diverse formule di pagamento per l'acquisto di UNA. Puoi concordarle con il nostro agente in base alle tue esigenze. Alcune soluzioni prevedono anche rate a partire da 200 euro al mese, consentendoti la massima flessibilità e comodità di pagamento.

Assistenza completa. Possiamo supportarti nel disbrigo delle pratiche per i finanziamenti a fondo perduto e agevolati messi a disposizione da qualsiasi ente statale, associazione artigiana e di categoria, o semplicemente per inviare alla tua banca o finanziaria, tutti i documenti necessari.



Partner Program

COLLABORIAMO CON I MIGLIORI.

UNA Partner Program è il programma rivolto a chi vuole collaborare con noi per far evolvere la piattaforma UNA. È rivolto a operatori del settore, ricercatori, industrie, che vogliono veicolare i loro prodotti e la loro tecnologia integrandole in UNA.

Partnership Sviluppatori. Rivolta a Medici, Operatori dell'Estetica, Ricercatori universitari e Ingegneri, che hanno messo a punto nuovi protocolli, metodiche e procedure di trattamento, oppure nuove tecnologie e applicatori che possono essere implementate e distribuite con la piattaforma UNA. Grazie a questo tipo di collaborazione potranno diffondere immediatamente le proprie idee e scoperte, a un elevato numero di clienti.

Partnership Aziende. Rivolta ad Aziende che già operano nel settore con tecnologie, cosmetici e accessori propri, che vogliono associarli ai protocolli di UNA.

Grazie a questo tipo di collaborazione potranno aggiungere un canale di vendita privilegiato per i propri prodotti: lo Store di UNA.





UNA e l'Ambiente

ANCHE L'AMBIENTE È PIÙ BELLO GRAZIE A UNA.

UNA contribuisce a un mondo più pulito. Abbiamo ideato e costruito UNA con in mente il rispetto dell'ambiente e la riduzione di tutti i possibili impatti, sia durante la sua vita che allo smaltimento.

Meno rifiuti da smaltire. Il rivoluzionario concetto di UNA riduce drasticamente la quantità di rifiuti da smaltire. Un solo contenitore plastico, un solo imballaggio, un solo kit di componenti elettronici anziché gli equivalenti di 20 macchine diverse.

Meno scarti. Meno prodotti inutilizzati in magazzino a rischio scadenza, meno rifiuti non necessari, meno imballaggi.

Meno carta da stampare. Grazie a UNA ci sarà meno carta da stampare, infatti i cataloghi elettronici sono integrati nel sistema e si aggiornano in continuazione, tutta la procedura di acquisto è in formato elettronico. Puoi stampare solo ciò che è strettamente necessario, come il consenso informato da far firmare alle Clienti.

Minori emissioni. Grazie alla razionalizzazione dei processi di acquisto, vendita e assistenza, molte attività potranno essere fatte anche a distanza, senza la necessità di doversi muovere dall'ufficio e riducendo così drasticamente le emissioni in atmosfera dei gas di scarico.

Applicatori

ELETTROPORAZIONE



Manipolo Diffusore - Manipolo con impugnatura in PVC e testina a sfere in acciaio. Progettato specificamente per trattamenti di diffusione dei composti, per la veicolazione transdermica e l'elettroporazione. *[MDFC-0006]*

LIPOCAVITAZIONE



Testina Cavitazione - Testina a ultrasuoni a bassa frequenza da 28 e 33 KHz. Corpo in PVC con impugnatura ergonomica e di facile utilizzo. Indicata per trattamenti di cavitazione, da usare su pannicoli adiposi. *[CAV-0001]*

RADIOFREQUENZA



Manipolo Sonda - Manipolo costituito da impugnatura curva in plexiglass, completo di due accessori: piatti in acciaio. Indicato per trattamenti di radiofrequenza. *[MRDF-0006]*



Manipolo Capacitivo - Manipolo con dischi radiali capacitivi per applicazioni



Manipolo Resistivo - Manipolo con dischi radiali resistivi per applicazioni di radiofrequenza localizzata. Dischi non inclusi. *[MRDF-0007]*



Manipolo Bipolare - Manipolo radiofrequenza bipolare particolarmente indicato per trattamenti viso e corpo. *[MRDF-0009]*



Manipolo Ago - Porta ago, costituito da impugnatura antiscivolo, utilizza un sistema a mandrino con cappuccio per l'innesto dell'ago da epilazione. Grazie alle sue forme contenute si presenta estremamente maneggevole e preciso raggiungendo i punti critici come ad esempio la zona sotto il mento. *[MRDF-0001]*



Manipolo Selettivo RF - Manipolo per Trattamento RF selettivo, composto da un applicatore e da Kit di puntali intercambiabili. *[MRDF-0003]*



Applicatore RF a Scansione - Applicatore per trattamenti di Radiofren-

quenza non presidiato, composto da una scatola di derivazione e da elettrodo da applicare sul corpo. *[MRDF-0004]*

CRIOELETTROFORESI



Kit Criolettroforesi - Cavo con bicchieri intercambiabili per trattamenti di Criolettroforesi corpo e viso. Kit completo di 2 bicchieri da 100 ml e 2 bicchieri da 50 ml. *[CTD-0001]*

LASER



Manipolo Laser *[MNLS-0001]*



Manipolo Suzione Laser - Manipolo di Suzione con Laser integrato per il trattamento delle rughe e della lassità cutanea. *[LASS-0004]*

MESOPORAZIONE



Manipolo Diffusore - Kit manipolo per trattamenti di Mesoporazione composto da elettrodo diffusore e da puntale. *[MDFC-0008]*

IPL LUCE PULSATA



Manipolo luce pulsata IPL - Manipolo e modulo IPL con finestre anteriori intercambiabili in base alla zona da trattare. Il manipolo è collegato a un modulo esterno per l'attivazione comandato dall'unità centrale UNA. *[IPL-0001]*

VACUUM



Coppette Suzione - Coppette di suzione di diametri 8 cm e 3 cm. *[VAC-0005]*



Manipolo Vacuum - Manipolo dotato di impugnatura in PVC con sistema antiscivolo (grip) e attacco rapido, per trattamenti di vacuum e stimolazione attiva del derma, completo di kit accessori intercambiabili. Indicato per il trattamento della zona viso. *[VAC-0001]*



Manipolo Elettrovacuum - Manipolo per trattamenti combinati di Vacuum, Microcorrenti e Cromoestetica. Da utilizzare sul corpo. *[VACE-0008]*



Manipolo Termovacuum - Manipolo per trattamenti Termovacuum



Manipolo Linfodrenaggio - Manipolo a rulli per massaggio linfatico e anticellulite. Corpo in plastica e presa ergonomica. *[VAC-0002]*



Cannula aspiracomedoni - Cannula di vetro per l'aspirazione dei comedoni mediante la depressione con sistema vacuum. *[VAC-0003]*



Nebulizzatore Spray - Flacone per liquidi che viene collegato all'apparecchiatura per la nebulizzazione dei prodotti cosmetici e per i trattamenti di veicolazione. *[VAC-0004]*



PRESSO

Kit Presso - Kit per pressomassaggio dotato di sacche gambali/bracciali, busta sottolettino, sacche per piedi. Il Kit comprende modulo esterno per il collegamento delle sacche, dotato di 11 uscite programmabili in base al trattamento. *[PRES-001]*



Testina 1MHz - Testina da 1 MHz con manipolo ergonomico in PVC per una facile presa e una agevole movimentazione sul corpo. *[TSUL-0001]*



Testina 3MHz - Testina con manipolo ergonomico in PVC ad ultrasuoni ad alta frequenza da 3 MHz. Indicata per trattamenti a ultrasuoni atti a contrastare la cellulite. *[TSUL-0003]*



Spatola a Ultrasuoni - Spatola ad ultrasuoni a bassa frequenza da 25 KHz con tappo di chiusura e di protezione. Indicata per trattamenti viso esfolianti e di sonoforesi. *[SPTL-0001]*



Placche Ultrasuoni - Placca ad Ultrasuoni da 3 MHz per trattamenti estetici. La particolare conformazione consente l'utilizzo della placca anche in modalità autonoma e non presidiata. Si fissa al corpo mediante bande elastiche blu (non incluse). *[ULTS-0006]*



ELETTROSTIMOLAZIONE

Elettrodi 2 CH - Elettrodi viso due canali. Per trattamenti di Elettrostimolazione o Ionoforesi. *[CVLT-0001]*



Pinza epilazione - Pinza per epilazione dotata di impugnatura ergonomica e unghia protettiva in ABS. [PNDP-0001]



Elettrostimolazione 8 CH - Kit a 8 canali di uscita per trattamenti corpo e viso. Il kit comprende scatola di derivazione per elettrostimolazione sequenziale. [CEC-0002]



Elettrodo di massa - Elettrodo di massa che viene tenuto in mano dalla Cliente durante i trattamenti per poter chiudere l'anello di massa del circuito. [MNA-0002]

MICROCORRENTI



Applicatore a sfere - Manipolo per trattamenti di stimolazione e riflessologia. Costituito da corpo in alluminio satinato, completo di sfere in ottone cromato diametro 15 mm. [APSF-0001]



Manipolo Microelettrodi-laser
Manipolo per trattamenti rughe per microstimolazione. Dotato di un puntale intercambiabile da 5 e da 9 microelettrodi da utilizzarsi a seconda della lunghezza della ruga. [MNA-0001]



Manipolo Puntale - Manipolo con impugnatura in alluminio satinato, e attacco M4 completo di kit accessori. Indicato per trattamenti viso di mesoporazione. [MMC-0003]



Manipolo Sfera - Manipolo costituito da una impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M4. Indicato per applicazioni di elettrodrenaggio e microstimolazione. N.B. Accessorio non incluso. [MMC-0004]



Manipolo Miolift - Manipolo costituito da una impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M6 completo di accessorio cilindrico in acciaio. [MMC-0002]



Microstimolatore 3 sfere - Manipolo con impugnatura in PVC, completo di 3 sfere in ottone cromato diametro 20 mm, indicato per trattamenti di microstimolazione corpo. [MMC-0006]



Microstimolatore 6 sfere - Manipolo con impugnatura in PVC, completo di 6 sfere in ottone cromato diametro 20 mm montate su bracci regolabili, per adattarsi alle varie parti del corpo, indicato per trattamenti di microstimolazione. [MMC-0005]



Manipolo Roller Corpo - Manipolo costituito da una impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M4. Indicato per trattamenti corpo, ottimo per un uso prolungato. N.B. Accessorio non incluso. [MMC-0007]

THERMO



Applicatore Thermo - Manipolo per trattamenti Thermo a contatto, con temperatura regolabile dai programmi. [PTT-0001]



Coperta Termica - Termocoperta a 3 settori indipendenti (Addome, Glutei Gambe) per trattamenti termici. Chiusura a velcro. [THER-0001]



Fascia Termica - Kit fascie composto da 2 gambali e un corpetto per trattamenti termici. Chiusura a velcro. [THER-0002]

FOTOSTIMOLAZIONE



Manipolo Ringiovanimento - Manipolo Luce blu per Fotoringiovanimento [MAN-RIN001]



Manipolo Fotostimolazione -
 Manipolo Fotostimolazione luce mix.
[MAN-CF52]

MAGNETO



Placca magneto - Placca magneto con
 ansa per fissaggio con banda elastica.
[PMT-0001]

INFRAROSSO



Placche Infrarosso - Placche per
 trattamenti IR. Si fissano sul corpo
 mediante le fasce di velcro non incluse.
[IRPL-0004]

IONOFORESI



Puntale Spugna - Manipolo con
 impugnatura in alluminio satinato,
 e attacco M4 completo di kit porta
 spugna. Indicato per ricerca e stimola-
 zione punti motore. Disponibili anche
 solo kit porta spugna (vedere alla voce
 Accessori). *[IOPT-0004]*



Manipolo Spugna - Manipolo dotato
 di impugnatura ergonomica e sistema

antiscivolo grip, con attacco M4 com-
 plete di kit porta spugna. Disponibili
 anche ricambi spugna (diametro 50
 mm) in confezione da 10 pezzi.
[IOMS-0005]

CROMO



Placche Cromo - Placche per tratta-
 menti estetici di Cromo. *[LACR-001]*



Manipolo Cromo IR - Manipolo co-
 stituito da un corpo in PVC e lampada
 Cromo riscaldante. Indicato per tratta-
 menti di cromoterapia e vasodilatazio-
 ne per veicolazione prodotti o lozioni.
[CRMA-0007]



Penna Cromo - Manipolo costituito da
 un corpo in PVC e micro-lampada per
 trattamenti Cromo. Particolarmente
 indicato nei trattamenti rughe viso.
[CRPN-0006]



Testina Cromoriscaldante - Manipolo
 costituito da una testina cromori-
 scaldante con possibilità di controllo
 temperatura digitale. Range da 42-45
 gradi. *[CRTS-0004]*



Maschera Termica - Per trattamenti
 Thermo sul viso. *[THER-0003]*.

DERMOABRASIONE



Spazzola dermoabrasione- Manipolo
 con spazzole intercambiabili a seconda
 della zona da trattare. La velocità di
 rotazione delle spazzole è regolabile
 per un'azione modulata e specifica per
 ogni esigenza.
[DAM-0001]



**Manipolo per Microdermoabrasio-
 ne** - Manipolo con impugnatura in
 alluminio satinato, dotato di cappuccio
 usa e getta intercambiabile. Creato
 specificamente per trattamenti di der-
 moabrasione con Cristalli di Corindone.
 Modulo esterno. *[MDA-0001]*





Manipolo Scrub - Manipolo dotato
 di testina oscillante, completo di kit
 porta spugne per trattamento peeling
 superficiale, da utilizzare con prodotti
 scrub. *[MDA-0004]*

ALTRO




Microscopio a contatto - Applicatore
 microscopio con ingrandimento da 50
 a 200 X. *[MIC-C054]*

Dati e informazioni tecniche

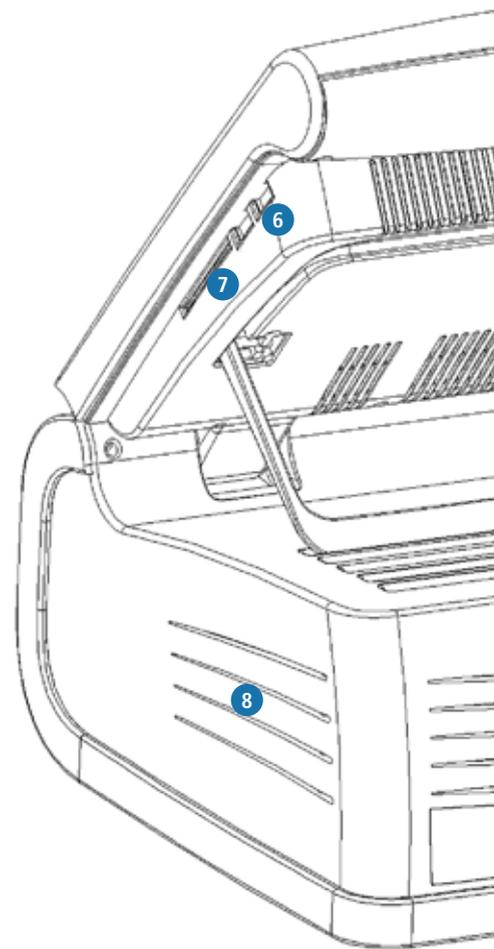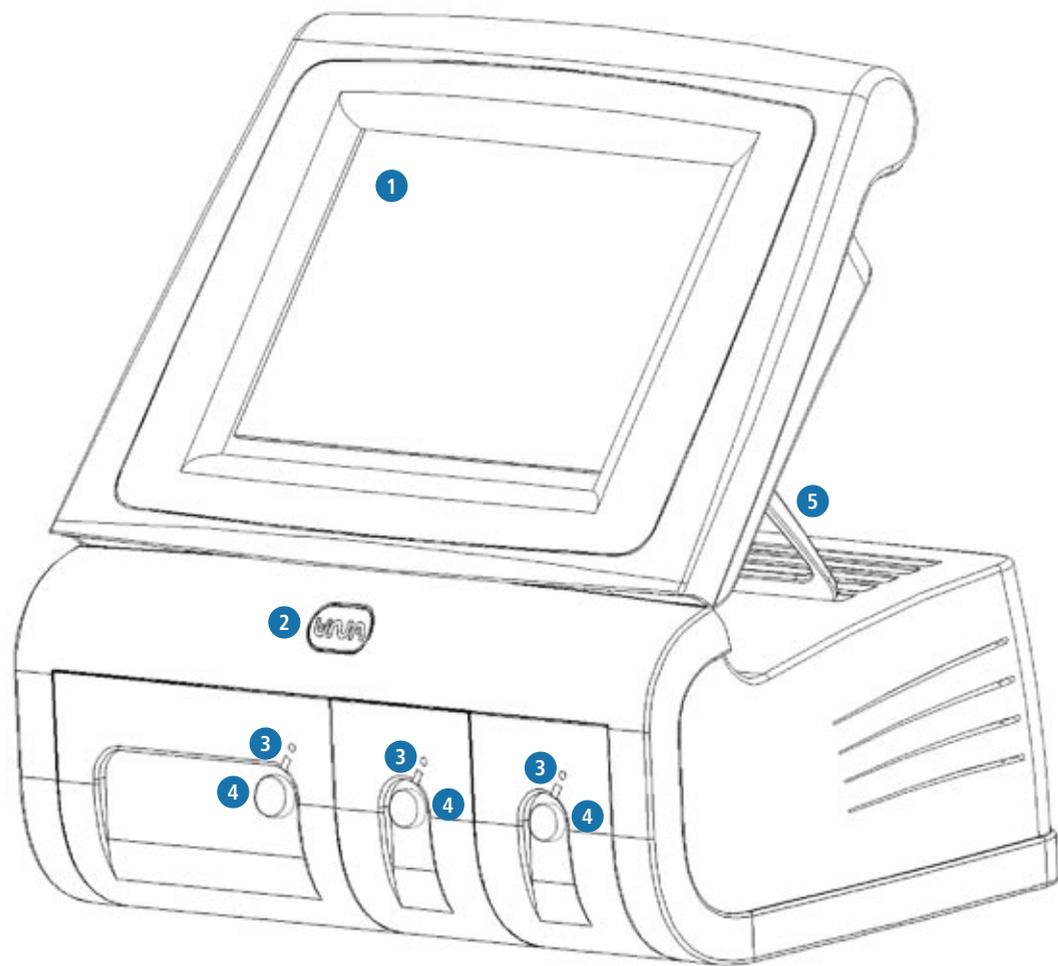

Conosciamo UNA

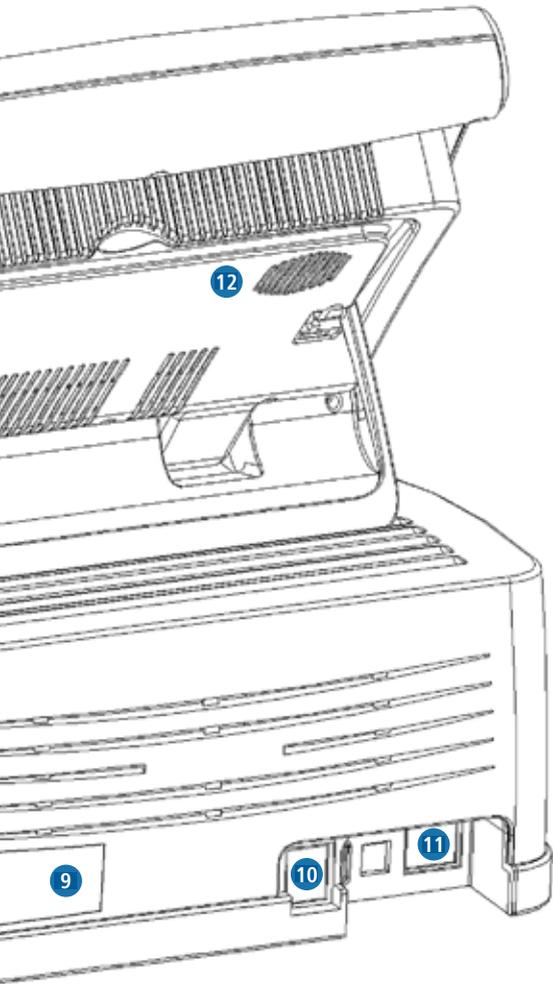

- 1 Touch screen
- 2 Pulsante UNA multifunzione
- 3 Spie di stato moduli
- 4 Prese universali per applicatori
- 5 Staffa regolazione display
- 6 Prese USB
- 7 Presa smart card
- 8 Griglie aereazione
- 9 Etichetta dati macchina
- 10 Interruttore generale
- 11 Vano fusibili
- 12 Altoparlante



Moduli e Tecnologie

	GENERA01*	GENERA02*	PUMP01*	LightPulse	MicroDerm	OXYGEN
ELETTROPORAZIONE	•	•				
LIPOCAVITAZIONE **		•				
RADIOFREQUENZA	•	•				
CRIOELETTROFORESI	•	•				
LASER ESTETICO	•	•				
MESOPORAZIONE	•	•				
IPL LUCE PULSATA				•		
VACUUM			•			
PRESSO			•			
ULTRASUONI	•	•				
ELETTROSTIMOLAZIONE	•	•				
MICROCORRENTI	•	•				
THERMO	•	•				
FOTOSTIMOLAZIONE	•	•				
MAGNETO	•	•				
U.V. ULTRAVIOLETTI	•	•				
IR INFRAROSSO	•	•				
IONOFORESI	•	•				
CROMO	•	•				
DERMOABRAZIONE	•	•				
MICRODERMOABRAZIONE					•	
OSSIGENO						•

* Moduli presenti nella configurazione standard

** Non eseguibile dal Centro estetico

⚠ Leggere l'apposita documentazione di riferimento per le singole funzionalità

← Nella pagina precedente UNA è rappresentata con carrello di supporto e modulo IPL (LightPulse)

ULTRASUONI**Frequenze di uscita:**

- 1 MHz +/-5% sia continua che pulsata
- 3 MHz +/-5% sia continua che pulsata
- 30 KHz (28-33 KHz) Metodica chiamata Cavitazione (*)

Massima densità energetica in uscita per tutte le frequenze:

- 3W/cmq in modalità pulsata
- 2W/cmq in modalità continua

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
- Auto Calibrazione frequenza Testina
- Auto Calibrazione sensibilità (Solo alcuni modelli di testine)
- Selezione tipo di programma in modo pulsato 25%-50%-75%
- Erogazione in modo continuo 100%
- Attivazione a pedale o continuo

RADIOFREQUENZA**Segnale in uscita:** sinusoidale**Frequenze di uscita:**

- 500 KHz - 1.500 KHz - 2.500 KHz

Tipologia applicativa in base ai manopoli:

- Monopolare – Bipolare
- Resistiva – Capacitiva

Potenza W in riferimento all'applicatore e alla frequenza

- 2.500 KHz – 70 W
- 500 KHz – 50 W
- 1.500 KHz – 80 W

Regolazioni :

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

RF PER DEPILAZIONE

Segnale in uscita: sinusoidale con frequenza di 2,8 MHz

Modi di erogazione:

- Termolisi (erogazione abilitata con la pressione del pedale)
- Flash (erogazione attivata dal pedale di erogazione, ma con regolazione della durata indipendente);
- Pulsata (erogazione multi pacchetto dal pedale con durata dell'impulso regolabile da 50 a 1000 mSec.)

Potenza Massima di uscita:

- Max 10 Watt RMS @150 Ω.

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
- In modalità pulsata numero di pacchetti: da 1 a 4 .
- Attivazione a pedale o continuo

MICROCORRENTI

Segnale in uscita: sinusoidale modulato

Frequenza portante:

6.000 Hz (6 KHz)

Modulazione di frequenza:

diadynamica difase a 100Hz

Massima corrente di uscita:

8mA@1KΩ

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

MAGNETO**Frequenza della pulsazione:**

da 1 a 100 Hz .

Massima tensione di uscita: 25Vpp**Durata della semionda:** 10ms.

Mod. 25Hz T = 2 semionde + pausa di 20ms
Mod. 50Hz T = 1 semionda + pausa da 10ms
Mod. 100Hz T = 2 semionda senza pausa
Mod. 10Hz T = 5 semionde + pausa da 5ms.

Potenza massima induzione magnetica:

da 1 a 50 Gauss (v. Applicatore)

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

I valori di potenza riportati in tabella **sono stati limitati** in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 2 A (punto A2)

- 1,5 W Max al cmq per frequenza $\geq 0,8$ < 1,2 MHz
- 3 W Max al cmq per frequenza < 1,2 = < 3,5
- (*) non eseguibile dall'estetista

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 13 (b-c)

- Punto b) RF Resistiva ≤ 25 W Max
- Punto c) RF Capacitiva ≤ 50 W Max
- Frequenza compresa tra 400–1.500 KHz
- Massima durata del trattamento: 30 minuti

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 16 (a-b)

- Punto a) Ad ago. Potenza Max 50 W
- Punto b) Pinza e Sonda. Potenza Max 50 W
- Frequenza massima inferiore a 30 MHz

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Non prevista dalla normativa

CORRENTI BIPOLARI

Segnale in uscita: sinusoidale modulato

Frequenza portante: 0.1-4250Hz

Modulazione di frequenza: 0-250Hz

Tipo oscillazione:
variabile in durata e ampiezza da 1 a 6 sec

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ

- Regolazioni:**
- Potenza da 0–100%
 - Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
 - Attivazione a pedale o continuo

CORRENTI DI KOTZ

Segnale in uscita: sinusoidale modulato

Frequenza portante: 2500Hz

Onda modulante: Quadra a 6-12-25-50-100-200 Hz

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ

- Regolazioni:**
- Potenza da 0–100%
 - Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
 - Attivazione a pedale o continuo

CORRENTE RETTANGOLARE

Segnale in uscita: rettangolare

Durata della fase: t 0.1msec – 1.000msec

Durata della pausa: T 1sec – 10sec

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
90Vpp @ 1KΩ

- Regolazioni:**
- Potenza da 0–100%
 - Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
 - Attivazione a pedale o continuo

CORR. DIADINAMICHE DIFASE

Segnale in uscita: difase con frequenza 100Hz (Df)

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ

- Regolazioni:**
- Potenza da 0–100%
 - Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
 - Attivazione a pedale o continuo

CORR. DIADINAMICHE MONOFASE

Segnale in uscita:

- Monofase con frequenza 50Hz (MF)
- Monofase profonda con frequenza 143Hz (Mp)

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ

- Regolazioni:**
- Potenza da 0–100%
 - Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
 - Attivazione a pedale o continuo

I valori di potenza riportati in tabella **sono stati limitati** in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm²
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm²
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm²
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm²
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm²
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

CORRENTE T.E.N.S.**Segnale in uscita:**

bifasica asimmetrica pulsata

Durata della fase:

50-200 microsecondi

Frequenza: 5-400Hz**Massima corrente in uscita:**

90mA @ 1K Ω

Massima tensione di uscita:

180Vpp @ 1K Ω

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

CORRENTE FARADICA**Segnale in uscita:** rettangolare**Durata della fase:** 1msec**Frequenza:** 5-400Hz**Massima corrente di uscita:**

90mA @ 1K Ω

Massima tensione di uscita:

90Vpp @ 1K Ω

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

IONOFRESI**Segnale in uscita:**

corrente continua positiva e negativa non interrotta, unidirezionale, senza variazioni di intensità.

Massima corrente in uscita:

30 mA @ 500 Ohm

Massima tensione di uscita:

25V @ 1K Ω

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

DISINCROSTANTE**Segnale in uscita:**

corrente continua positiva e negativa non interrotta, unidirezionale, senza variazioni di intensità.

Massima corrente in uscita:

30 mA @ 500 Ohm

Massima tensione di uscita:

25V @ 1K Ω

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale o continuo

PRESSO-MASSAGGIO**Pressione massima in compressione:**

3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)

Portata: 30 litri/min.**Pressione massima in aspirazione:**

850 mBar (-85 kPa)

Caratteristiche:

- Canali di uscita: n° 11 settori
- Sicurezza: 1 sensore di pressione
- Accessori: sacca coprilettino
- Sacche: corpo 2 settori, gambe 7 settori, braccia 4 settori.

Regolazioni :

- Regolazione Pressione: 0-180 mmHg e relativa lettura pressione sacche durante il trattamento.
- Durata dei trattamenti da 0 a 59 minuti
- Impostazione tempo di mantenimento: 0-10 sec.
- Impostazione tempo ciclo: 0-25 sec.

I valori di potenza riportati in tabella **sono stati limitati** in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm 2
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cm 2
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 15

- Massima densità di corrente 1 mA ogni 10 cm 2

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico informativa n° 3

- Massima densità di corrente 4 mA
- Massima densità di corrente per elettrodo 0,1 mA/cm 2
- Generatore a corrente continua Max 24 V
- Regolazione da 0 a 4 mA

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 18

- Sterilizzare le parti a contatti con il soggetto
- Controllo della pressione dei cuscini con dispositivo di sicurezza

ASPIRACOMEDONI

Pressione massima in aspirazione:
850 mBar (-85 kPa)

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Attivazione a pedale o continuo

SPATOLA ULTRASUONI

Frequenza:
22.000 –28.000 Hz

Massima tensione applicata: 400Vpp

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Auto calibrazione frequenza oscillazione
- Attivazione a pedale o continuo

BRUSH A SPAZZOLE

Manipolo con spazzole intercambiabili diverse tipologie.

Regolazioni:

- Velocità di rotazione
- Inversione senso di rotazione
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale

LASER ESTETICO

Lunghezza d'onda: 760 -1.200 nm

Densità Max: 10 mW/cmq

Regolazioni:

- Start, Stop
- Modalità di impulso (continua o pulsata)
- Durata dell'impulso
- Frequenza dell'impulso
- Tempo Max trattamento 1.200 secondi (20 minuti)

IR - INFRAROSSI

Lunghezza d'onda: 770 nm

Potenza:

da 20mW (a 50 mA con angolo 20° 5 mm clear epoxy)

Potenza complessiva:

Dipende dal tipo di applicatore utilizzato

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Attivazione a pedale o continuo

I valori di potenza riportati in tabella **sono stati limitati** in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 4 (a)

- Massima pressione di aspirazione 80 kPa

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 2 A (punto A1)**Vibrazione meccanica Peeling**

- Potenza emissione: Max 10 W
- Frequenza $\geq 22\text{KHz}$ $< 28\text{KHz}$
- Potenza Max assorbita di alimentazione 70 W – 230 Vac

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 6 (punto b)

- Sterilizzare le parti a contatti con il soggetto

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 21a

- Lunghezza d'onda : tra 760- 1.200 nm (nanometri)
- Potenza Max (densità) : 10 mW/cmq
- Tempo Max trattamento 1.200 secondi
- Vietato laser classi 3B o classe 4

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 7 (punto b)

- Potenza Max (irradianza) : 0,3 W/mq

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 13 (a)

THERMO	CRIOELETTROFORESI	CROMO	U.V. ULTRAVIOLETTI	FOTOSTIMOLAZIONE
<p>Range temperatura: 34 – 45 °C</p> <p>Applicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termocoperta: dim. 160x170 cm, 3 aree indipendenti (addome, glutei, gambe). Chiusura laterale a velcro. 100 W • Maschera facciale: dim. 30 x 30 cm - 25 W 100% Poliestere. Chiusura a velcro e bottone. • Fascia Addominale: dim. 150x50 cm - chiusura a velcro, 100 W • Fascia Coscia: dim. 90x40 cm chiusura a velcro, 80 W (2 pz.) • Manipolo a contatto: Range: 34 – 45 °C <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza da 0– 100% • Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti 	<p>Segnale in uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • singoli impulsi quadri positivi di valore medio non nullo • Frequenza impulsi: 100 Hz- 1700Hz • Duty Cycle: 50 %. • Incremento massimo 0,8 V/sec <p>Controlli:</p> <p>Attivazione con rilevazione automatica paziente partendo da 0V con riporto a 0V in caso di perdita paziente</p> <p>Corrente massima di uscita: 30mA @ 500Ω</p> <p>Tensione massima di uscita: 25Vpp @1KΩ</p> <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza da 0– 100% • Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti 	<p>Fluenza in joule a cmq: Dipende dal tipo di applicatore</p> <p>Dimensioni dello spot: Dipende dal tipo di applicatore</p> <p>Applicatori specifici con colori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso, Arancio, Verde, Giallo, Blu <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza da 0– 100% • Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti 	<p>Lunghezza d'onda: 375 nm</p> <p>Potenza: 10 mW a 20mA 15 ° apertura</p> <p>Potenza complessiva: Dipende dal tipo di applicatore utilizzato</p> <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza da 0– 100% • Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti 	<p>Lunghezza d'onda: da 100-1200 nm Cluster o applicatori specifici da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 590-650 epilazione • 550-590 fotoringiovanimento derma • 420-440 acne • 520-540 fotoringiovanimento epidermide • 650 discromie <p>Fluenza in joule a cmq: Dipende dal tipo di manipolo</p> <p>Dimensioni dello spot: Dipende dal tipo di manipolo</p> <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durata degli impulsi, tempo di intervallo, sequenze • Potenza da 0– 100% • Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.				

Parametri massimi scheda tecnico-informativa n° 13 (punto a)

- Dispositivo di controllo corrente dispersa
- Isolamenti termici adeguati
- Regolazione Temperatura

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico informativa n°15

- Massima densità di corrente 1 mA ogni 10 cmq

Non prevista dalla normativa

Parametri massimi scheda tecnico-Informativa n° 7 (punto b)

- Potenza Max (irradianza) : 0,3 W/mq

Non prevista dalla normativa

ELETTROPORAZIONE**Forma d'onda:**

Singoli impulsi quadri positivi di valore medio non nullo.

Frequenza : 2 – 5.000Hz,

Duty Cycle: 50 % . Impulsi

Incremento massimo 0,8 V/sec

Corrente massima di uscita:

30mA @ 500Ω

Tensione Massima di uscita:

25Vpp @1KΩ

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

MESOPORAZIONE**Forma d'onda:**

Singoli impulsi quadri positivi di valore medio non nullo, modulati con onda triangolare.

Frequenza portante: 2.000 – 1.800Hz.

Controlli:

- Attivazione con rilevazione automatica paziente partendo da 0V con riporto a 0V in caso di perdita paziente
- Indicazioni sonore in base al tipo di manipolo da usare.

Corrente massima di uscita:

60 mA @ 1 KΩ

Tensione massima:

60 Vpp @1KΩ

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

VACUUM CON COPPE**Pressione massima in aspirazione:**

850 mBar (-85 kPa)

Portata compressore:

30 l/min.

Ritmo di azione:

da 0 a 85 dec./sec.,

Frequenza Max.:

0,1 dec/sec

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
- Attivazione a pedale

MASSAGGIO MECCANICO**Applicatori:**

- Manipolo Rulli: combinato tra rulli e Vacuum
- Termovacuum: combinato tra Sfere, Vacuum e Thermo

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

MICRODERMOABRASIONE**Pressione massima in compressione:**

3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)

Portata: 30 litri/min.

Pressione massima in aspirazione:

850 mBar (-85 kPa)

Materiali utilizzati:

Polvere minerale o materiale equivalente monouso

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

I valori di potenza riportati in tabella **sono stati limitati** in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico informativa n°15

- Massima densità di corrente 1 mA ogni 10 cmq

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 19

- Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
- Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
- Attivazione erogazione solo partendo da 0 con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
- Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico informativa n°15

- Massima densità di corrente 1 mA ogni 10 cmq

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 14

- Massima pressione di aspirazione 80 kPa

Parametri massimi riferiti alle schede tecnico-informative per manipolo:

- Manipolo rulli : Scheda 6 (c), Scheda 14
- Termovacuum : Scheda 6 (a), Scheda 14, Scheda 13 (a)

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 4 (punto b)

- Massima pressione di aspirazione 80 kPa
- Cristalli (polveri) monouso
- Idonee sterilizzazioni e disinfezioni delle parti a contatto con il soggetto da trattare

Moduli esterni

MODULO LIGHTPULSE

Lunghezza d'onda

- Filtro 590-650 nm per depilazione
- Filtro 520-540 nm per stimolaz. epidermica *

Regolazioni:

- Fluenza: da 1,0 a 70,50 Joule/cm² – incrementi di 0.1 J/cm² gestiti dal microprocessore
- Durata impulso: da 1 a 50 msec.

Max Energia rilasciata 1100 Joule (a livello lampada).

Tempo di ricarica:

2 secondi in base alla fluenza impostata

Dimensioni dello spot:

- 35 x 15 mm:
- 20 x 10 mm:

Controllo uscita:

- Scarica controllata dall'interruttore a manipo (con footswitch di sicurezza)
- Allarmi Temperatura

Dati modulo.

- Alimentazione 220–240 V.
- Potenza assorbita 200 VA
- Corrente assorbita 1 A
- Assorbimento elettrico: 750VA
- Fusibili 2 x 4 AT ver. 220 ÷ 240 V
- Peso 12 kg
- Dimensioni L 420 x P 350x H 200 mm

Condizioni di esercizio:

- Temperatura ambiente: 15°C < T < 35°C
- Umidità ambiente: max 70%

Condizioni di conservazione e trasporto

- Temperatura ambiente: -10°C < T < 70°C
- Umidità ambiente: max 90%

Classe I - Tipo B

Numero di Spot: 13.000–15.000 flash con una lampada.

MODULO MICRODERM

Pressione massima in compressione:

3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)

Pressione massima in aspirazione:

850 mBar (-85 kPa)

Materiali utilizzati:

Polvere minerale o materiale equivalente monouso

Regolazioni:

- Potenza da 0–100%
- Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

In corso di definizione le specifiche elettromeccaniche del modulo

MODULO OXYGEN

In corso di definizione le specifiche elettromeccaniche.

I valori di potenza riportati in tabella **sono stati limitati** in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell'allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n°16 (c)

- Fluenza Max: 26 J/cm² con sistema raffreddamento pelle a 10 °C
- Fluenza Max: 13 J/cm² senza raffreddamento pelle
- Durata impulso: tra 2 e 50 ms
- Area di trattamento > 5 cm²
- Lunghezza onda: 600 e 1.100 nm
- Frequenza massima inferiore a 30 MHz
- (*) non eseguibile dall'estetista

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 4 (punto b)

- Massima pressione di aspirazione 80 kPa
- Uso di cristalli (polveri) monouso
- Idonee sterilizzazioni e disinfezioni delle parti a contatto con il soggetto da trattare

Parametri massimi previsti dalla scheda tecnico-informativa n° 5

- Massima pressione 1 Atm

Modello	UNA Beauty v.1.0
Classificazione	Classe I tipo BF
Finalità d'Uso	Il Dispositivo è per USO ESTETICO e NON MEDICALE finalizzato alla riduzione dell'apparenza degli inestetismi. USO Professionale per Operatori Abilitati NON DOMICILIARE
Dimensioni	Larghezza: 41,5 cm Profondità: 34 cm Altezza Chiusa: 22,3 cm Peso Configurazione Standard: 11,7 Kg
Display	Touch Screen 12"
Tipo di Case	ABS V0 Autoestingente
Slot di Espansione	Vano a 4 slot per moduli di configurazione ed espansione.
Moduli configurazione standard	N° 1 Modulo mod. GENERA01 a 1 slot. (1 uscita) N° 1 Modulo mod. GENERA02 a 1 slot (1 uscita) N° 1 Modulo mod. PUMP01 a 2 slot (1 uscita + 1 uscita aria)
Caratteristiche di alimentazione	Tensione Alimentazione: 90-260Vac - Frequenza Alimentazione: 47-63Hz Corrente Max assorbita: 4,6 A con 90 Vac, 2,2° con 260 Vac Potenza: 300 W
Parametri ambientali Funzionamento	Temperatura: -20 / 70 ° C. — Umidità: 85 %.
Parametri ambientali Conservazione	Temperatura: -40 / 80 ° C. — Umidità: 90 %.
Certificazione CE	CEI 62-39. "Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida Generale per la sicurezza" Prove per Sicurezza Elettrica, Termica, funzionamento anormale, primo guasto e controllo marcature. CEI EN 60601-1-4/A1 (Class. CEI 62-81; V1): Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza – Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili.
Sicurezza Elettrica Alimentatore	Safety standards UL60601-1 CSA C22 No 606.1 - TÜV EN60601-1 pending EMC performance (EN60601-1-2: 2001) EN55011 Class B conducted, Class B radiated. EN61000-3-2 Harmonic distortion, Class A&D EN61000-3-3 Line flicker EN61000-4-2 ESD, ±8KV air and ±6KV contact EN61000-4-3 Radiated immunity, 3V/m EN61000-4-4 Fast transient/burst, ±2KV EN61000-4-5 Surge, ±1KV diff., ±2KV com. EN61000-4-6 Conducted immunity, 3Vrms EN61000-4-8 Magnetic field immunity, 3A/m EN61000-4-11 Voltage dips, 30% reduction for 500ms, 60% reduction for 100ms and >95% reduction for 10ms
Sistemi di Sicurezza Integrati	Sistemi di Sicurezza Software, Hardware, Visivi e Acustici
Connessione WI-FI	Integrata.

Gruppo Fatrotek s.p.a.

Sede legale:

via Matteo Greco, 3
84131 Salerno

www.unabeauty.it
info@unabeauty.it

Show Room e produzione:

via Case Rosse, 22
84131 Salerno

tel. +39 089 38 13 39
fax +39 089 38 54 016



Info Legali

Brevetti. Il Principio di funzionamento, l'interfaccia grafica, il protocollo di comunicazione, le logiche interne, i moduli, il riconoscimento degli applicatori, le metodiche di auto calibrazione, gli schemi di connessione, il collegamento modulare, sono protetti da Brevetti.

Marchi registrati. I loghi, le immagini, i nomi citati in questa brochure sono dei rispettivi proprietari anche in assenza di specifiche indicazioni.

Privacy. Alcune funzionalità prevedono il rispetto degli obblighi della Legge sulla Privacy per la gestione dei dati dei Clienti (D.Lgs. 196/2003).

Specifiche tecniche. I dati, le immagini e quant'altro descritto, non assumono valore contrattuale e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione sia per eventuali espansioni che per riduzioni di caratteristiche e funzionalità.

Tecnologie. Alcune tecnologie o applicatori possono non essere ancora disponibili al momento della commercializzazione in Italia.

Brochure e Termini. I termini utilizzati per le Tipologie si intendono come inestetismi della pelle e del corpo. I termini e le informazioni in questa Brochure sono riportati a solo scopo pubblicitario e non esonerano l'utilizzatore dal verificare le normative vigenti.

Connessione Internet. Alcune funzionalità di UNA (assistenza, aggiornamento, ordini...) richiedono l'accesso alla rete Internet non fornito dalla società.

Configurazioni. Alcune tecnologie descritte in questa brochure richiedono il carrello di supporto e il relativo modulo. La configurazione di base non include gli applicatori, che si acquistano separatamente in base alle proprie esigenze.



www.unabeauty.it