

WINA  
beauty system





Bienvenue dans le monde de 



# SOMMAIRE

---

## LE MONDE DE UNA

Une nouvelle espèce	5
Une encyclopédie de protocoles	7
Multitraitement et Multitechnologie	9
Facile à utiliser	11
Mise à jour à distance	13
Modulable	15
Connecteurs intelligents	17
Cosmétiques associés	19
Un magasin toujours ouvert	21
Assistance technique à distance	23
Tests Cliniques	25
Sécurité, pour vous et vos Clientes	27
Toujours en règle du point de vue légal	29
Le compte est bon, enfin	31
Solutions financières sur mesure	33
Electronique avancée	35

## TECHNOLOGIES ET TYPOLOGIES

Mille questions, la réponse est UNA	39
Technologies	40
Typologies	62

## FONCTIONS INTÉGRÉES

Traitements	67
Clients	69
Gestion	71
Test	73

---

Formation	75
Store	77
Les détails qui font la différence	78

## SUPPORT

Cours de Formation	83
Journée Portes Ouvertes	85
Posters à personnaliser	87
Brochures à personnaliser	89
Présentoirs	91
Enseignes et vitrauphanies	93
Ameublement dédié	95
Accessoires et compléments	97

## UNA INFO

Made in Italy, à 100%	101
Acheter UNA	103
Partner Program	105
UNA et l'Environnement	107

## LES APPLICATEURS

Les Appicateurs	110
-----------------	-----

## DONNÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Faisons connaissance avec UNA	116
Modules et Technologies	119
Données techniques	120

- UV 
- Lipocavitation 
- Infrarouge 
- Presso 
- Dermoabrasion 
- Laser esthétique 
- Chromo 
- Ultrasons 
- Électrostimulation 
- Micro-courants 



- Radio fréquence 
- Vacuum 
- Thermo 
- Photo stimulation 
- Ionophorèse 
- Magnéto 
- Mésoporation 
- Lumière pulsée IPL 
- Cryo-électrophorèse 
- Électro poration 

# Une nouvelle espèce

TOUTES LES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES, DANS "UNE" SEULE MACHINE.

**Qu'est-ce que UNA ?** C'est une plateforme multi-technologique pour les traitements esthétiques professionnels. C'est non seulement une machine, mais aussi un système complet de fonctions, poignées, accessoires, cosmétiques, instruments de marketing et de vente. Elle met à jour les nouveaux traitements et fonctionnalités à distance.

**Elle se complète en ajoutant des applicateurs.** Toutes les technologies, qu'elles soient évoluées ou de base, sont intégrées dans « une » seule machine. Pour les activer, il suffit de brancher l'applicateur à l'un des canaux libres et effectuer le traitement.





# Une encyclopédie de protocoles

ELLE VOUS GUIDE AVANT, PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT.

**Encyclopédie de Protocoles.** UNA contient une véritable encyclopédie de protocoles, grâce au grand effort scientifique qu'ont fait nos médecins, pour rendre accessibles à travers le même langage et la même forme tous les protocoles de toutes les technologies. Grâce à UNA vous n'aurez plus besoin d'étudier un mode d'emploi pour chaque machine.

**Une image a plus de valeur que mille mots.** Non seulement UNA décrit étape par étape la procédure de chaque traitement, en précisant les précautions et les contre-indications, mais elle vous guide aussi tout au long de l'exécution grâce à des images et vidéos claires et efficaces. Elle vous montre comment positionner la Cliente, comme empoigner

correctement l'applicateur, quelles sont les zones à traiter et celles à éviter, comme faire les mouvements, où placer les applicateurs. Avec UNA chaque traitement est un véritable cours de formation.





# Multitraitement et Multitechnologie

PLUS DE VARIETE DE TRAITEMENT, SIMULTANEMENT.

**Plus de traitements en même temps.** Grâce à ses canaux indépendants, UNA vous permet d'effectuer jusqu'à trois traitements sur la même Cliente, même si elles emploient des technologies différentes. Vous pouvez par exemple traiter les jambes avec la presso tout en exécutant un traitement de radiofréquence sur le visage. Le temps que vous gagnez vous permet de proposer des offres plus intéressantes à vos Clientes.

**En toute sécurité.** Vous n'êtes pas sûre de pouvoir effectuer les traitements demandés ensemble ? Aucun problème : il suffit de choisir le nouveau traitement et UNA vous dira s'il est compatible avec celui qui est en cours. Chaque traitement fonctionne de manière indépendante et a des commandes séparées, pour votre plus grande sécurité, et celle de votre Cliente.



# Medica



# Facile à utiliser

UN SEUL BOUTON ET L'ÉCRAN TACTILE.

**Un seul bouton qui vous informe.** UNA vous permet de vous concentrer sur ce que vous devez faire, en rendant votre travail facile et agréable. Le bouton UNA vous permet d'allumer et éteindre la machine, mais aussi de voir la phase de fonctionnement : vert si elle est allumée, orange si elle est en veille, rouge pour signaler une alarme.

**Ecran tactile.** UNA est si simple et intuitive à utiliser que vous aurez la sensation de l'avoir toujours connue. A partir

de l'écran tactile, vous lancez directement les traitements, vous gérez les Clientes, vous achetez les produits et faites les mises à jour ; les commandes sont claires et immédiates, il suffit de faire glisser les doigts sur l'écran de grandes dimensions pour tout faire. Une simplicité dont vous ne pourrez plus vous passer.





# Mise à jour à distance

TOUJOURS A LA PAGE, ELLE NE VIEILLIT JAMAIS.

**Un simple geste pour se mettre à jour et vous mettre à jour.** Grâce à UNA, vous connaîtrez toujours les tendances et technologies du moment, en appuyant sur une seule touche. Quelques minutes lui suffisent pour se connecter à notre système et se mettre à jour toute seule. Vous aurez ainsi les nouveaux traitements et connaîtrez les nouvelles tendances et découvertes.

**Mise à jour facile de UNA.** Il suffit d'une connexion à l'Internet par Wi-Fi, réseau LAN ou une clé Internet avec une carte SIM, quel que soit le fournisseur d'accès. Inutile de se déplacer, pas de temps perdu, de problèmes d'heures ou de technicien à attendre.

**Toujours disponible, 7 jours sur 7.** Le service est toujours actif et vous permet de télécharger les mises à jour de : sécurité, nouvelles fonctions, traitements, applicateurs, technologies, nouvelles vidéos, cours de formation, nouveaux produits du Magasin, offres spéciales et réductions.



UNA



# Modulable

POUR LES EXTENSIONS FUTURES ET L'ASSISTANCE RAPIDE.

**La première machine “à modules” du monde.** Grâce à l'étroite collaboration entre les designer et les ingénieurs électroniques, nous avons pu créer un merveilleux système modulable qui vous donne une flexibilité jamais vue encore.

**De nouvelles technologies naissent ?** Pas de nouvelle machine, juste de nouveaux modules. Quand des nouvelles technologies voient le jour, elles peuvent être incorporées en installant simplement de nouveaux modules et en mettant à jour les traitements. Vous serez donc toujours à la page, à un prix modique, puisque vous ne devez pas acheter une machine complète.

**Facile à changer, une personne suffit.** Les modules “à tiroir” sont si faciles à extraire et installer que vous pourrez le faire vous-même, sans demander l'assistance d'un technicien ou devoir utiliser des instruments particuliers : il suffit d'une pièce pour dévisser la vis de fixation et extraire le module.

**Vous continuez à travailler, sans interruption.** En cas de dysfonctionnement d'un module, vous pourrez continuer à travailler avec les autres, car ils sont indépendants. De plus, si une réparation est nécessaire, il vous suffira de nous envoyer le module, non pas toute la machine !





# Connecteurs intelligents

IL RECONNAIT ET VERIFIE LES APPLICATEURS.

**Une multitude d'applicateurs, une seule façon de les connecter.** UNA simplifie aussi le branchement des applicateurs : ils ont tous le même type de connecteur, qui peut être branché à chacun des canaux disponibles. Il s'insère en un clic et s'extrait facilement, sans erreur possible et en toute sécurité.



**Elle les reconnaît et les vérifie. Chaque fois.** Quand vous connectez un applicateur, UNA vérifie s'il fonctionne correctement et de manière sécurisée. Elle le reconnaît et vous montre la liste des traitements disponibles. Vous choisissez celui que vous voulez effectuer et vous le lancez sans perdre de temps. Un voyant lumineux vous signale si l'applicateur doit être recalibré, remplacé ou réparé.





# Cosmétiques associés

NOUS NE CHOISSISSONS POUR VOUS QUE LES MEILLEURES REFERENCES.

**Les meilleurs pour la meilleure.** Votre professionnalisme est lié à vos résultats. C'est pourquoi nous avons choisi pour vous les meilleurs producteurs de cosmétiques, en créant une synergie idéale entre leurs produits et nos traitements. Tous les cosmétiques sont caractérisés par un plaisir unique, sensoriel, non seulement pour la Cliente, mais aussi pour l'Opérateur qui les applique.

**Plus qu'une simple cabine.** Grâce à nos partenaires, nous pouvons également proposer une vaste gamme de produits pour le soin de la maison de vos Clientes. Vous pourrez donc prendre soin d'elles en cabine, mais aussi chez elles, pour obtenir des résultats encore meilleurs grâce à l'action combinée des produits.





# Un magasin toujours ouvert

VOUS NE COMMANDEZ QUE CE DONT VOUS AVEZ BESOIN,  
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN ET QUAND VOUS VOULEZ.

**Un assortiment complet.** Cosmétiques, applicateurs, consommables, accessoires, cours, instruments de marketing et de communication : une gamme complète de tous les produits nécessaires à votre activité.

**Vous commandez quand vous voulez.** Vous passez votre commande directement dans notre Store UNA quand vous voulez, quelle que soit l'heure, dans la plus grande tranquillité. Vous n'aurez pas besoin d'appeler l'Entreprise et d'être gênée par un représentant qui essaie de tout vous vendre, même des produits que vous n'utilisez pas ou que vous avez encore en stock.

**Pas de commande minimum.** Vous pouvez acheter un seul flacon de cosmétique ou un seul produit monodose, il n'y a pas de nombre d'articles ou de montant minimum.

Vous pourrez ainsi acheter les produits dont vous avez vraiment besoin, sans avoir de stocks inutilisés.

**Des produits toujours frais.** Le dépôt centralisé pour tous nos clients nous permet d'avoir des produits toujours frais. Les lots de production sont ainsi consommés rapidement et il n'y a pas de pertes.





# Assistance technique à distance

NOUS RESOLVONS LE PROBLEME SANS QUE VOUS DEVIEZ VOUS INTERROMPRE.

**Vous avez un problème ? Nous le résolvons à distance.** UNA peut se connecter avec nous pour les procédures d'assistance télématique, et un expert résoudra les problèmes à distance. Si ce n'est pas possible, nous vous enverrons directement le module que vous pourrez remplacer vous-même, sans technicien.



**UNA contrôle son état de santé.** UNA a un système d'autodiagnostic qui lui permet de vérifier à tout moment le bon fonctionnement de tous ses composants et de ses systèmes de sécurité. Les voyants lumineux vous informent toujours de l'état de santé de votre UNA, des modules et des applicateurs qui y sont branchés.





# Tests Cliniques

UNE DES MACHINES QUI A LE PLUS DE TESTS CLINIQUES AU MONDE.

**Plus de 40 Etudes Cliniques** attestent l'efficacité des Technologies intégrées de UNA. Ces études, réalisées par des Universités de première importance, des Centres de Recherche et des Médecins, font de UNA l'une des machines présentes sur le marché qui sont soumises au plus grand nombre de Tests Cliniques.

**Technologies Brevetées.** Grâce au Partner Program, nous avons stipulé des accords avec les inventeurs et propriétaires d'importantes Technologies et nous les avons incorporées dans UNA, en y ajoutant toutes les exigences de sécurité prévues par les normatives. Nous avons ainsi pu vous offrir les techniques esthétiques les meilleures et les plus consolidées, ainsi que les produits qui y sont associés.

**Tests continus.** En étroite collaboration avec de nombreux Organismes de Recherche, Universités et Chercheurs, nous

continuons à créer et tester de nouveaux protocoles de traitement, à intégrer dans UNA, pour vous offrir des solutions qui soient toujours à l'avant-garde.



Università degli  
Studi di Napoli



Università degli  
Studi di Siena



Dipartimento di Fisica  
Nucleare e Teorica Università  
degli Studi di Pavia



Seconda Università  
degli Studi di Napoli



Università degli  
Studi di Firenze



Università degli  
Studi di Bari



Università degli  
Studi di Catania



CNR  
Consiglio Nazionale delle  
Ricerche



Institute for Bioprocessing  
and Analytical Measurement  
Techniques



Agorà - Società di  
Medicina ad indirizzo  
Estetico



# Sécurité, pour vous et vos Clientes


SYSTEMES ACTIFS POUR NE JAMAIS RIEN LAISSER AU HASARD.

**Systemes de Sécurité active.** Nous avons intégré dans UNA plusieurs systèmes de sécurité active qui interviennent immédiatement, au moindre problème, et répondent aux normes de sécurité les plus sévères, entre autres du secteur médical. Nous visons un concept de sécurité complète, qui vous permette de travailler sans incidents possibles.

**Réduisez les risques de contentieux légal.** La plupart des incidents commencent avant le traitement : une simple distraction, un produit inadéquat, une mauvaise procédure ou une information non parvenue à la Cliente sont autant d'éléments qui provoquent en quelques instants des situations dangereuses.

**Connaître pour prévenir.** UNA prévient les risques éventuels en vous indiquant pour chacun des traitements les précautions à prendre, les contrôles à faire et les zones à ne pas traiter pour l'effectuer en toute sécurité.

**Liste de contrôle.** UNA ne vous permet de lancer le traitement qu'après avoir vérifié qu'aucune des contre-indications de la liste n'est présente (allergies, thérapies pharmacologiques, maladies, problèmes de peau, etc). Vous pouvez imprimer le document d'information et le faire signer à la Cliente.

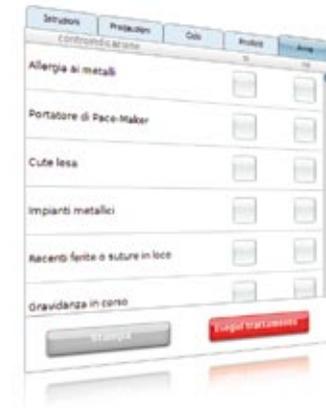



# Toujours en règle du point de vue légal

ELLE S'ADAPTE A DISTANCE AUX CHANGEMENTS DES NORMATIVES.

**Les normes changent, UNA s'adapte.** La normative concernant les activités de l'esthéticienne ont évolué récemment. Comme toutes les autres fonctionnalités, les paramètres de puissance de UNA se mettent à jour à distance, s'adaptant ainsi aux nouvelles lois. Un simple geste suffit, l'intervention d'un technicien n'est pas nécessaire.

**Si une technologie est interdite, vous pouvez utiliser les autres.** Le dernier décret a interdit l'utilisation de certaines technologies dans le secteur de l'esthétique et les a confiées à l'usage médical. Les centres qui les avaient déjà achetées ne peuvent plus les utiliser, bien qu'ils doivent encore payer les machines. Avec UNA vous n'avez pas ce problème, car l'exclusion d'une technologie n'oblige pas à supprimer toute la machine, mais uniquement l'applicateur " interdit ". Vous pouvez donc continuer à travailler avec les autres technologies de UNA, sûre de ne pas avoir perdu votre argent.

**Abrogation de la loi.** Si le décret devait être révoqué, vu le nombre de recours qui ont été présentés auprès des associations de la catégorie, vous pourrez à nouveau ressortir de son tiroir l'applicateur « interdit » et continuer à travailler, sans rien perdre.





# Le compte est bon, enfin

NEE POUR VOUS FAIRE GAGNER.

**Gagner de l'argent ou payer des mensualités ?** Vous pourrez enfin travailler et gagner, et non plus seulement travailler pour payer un mauvais achat. Il vous est sans doute arrivé de « pousser » un traitement parce que vous aviez acheté ou loué une machine que vous deviez payer. Avec UNA, grâce à la vaste gamme de poignées et à leur prix abordable, vous pourrez vendre uniquement les traitements qui sont réellement adaptés à votre Cliente, les pratiquer avec la technologie adaptée, sans courir le risque de les perdre parce qu'elles n'ont pas de résultat.

**Des Clientes toujours satisfaites.** Pourquoi perdre des Clientes ? Avec UNA, en achetant un seul nouvel applicateur et non pas une nouvelle machine, vous pourrez satisfaire toutes leurs demandes en évitant qu'elles s'adressent à des centres plus équipés.

**Etudes de secteur.** Pour les études de secteur, les recettes

sont proportionnelles au nombre de machines que vous avez, et elles ne tiennent pas compte du fait que certaines technologies sont rarement utilisées. Avec UNA vous n'aurez plus ces problèmes, car vous utilisez une seule machine pour tous les traitements.





# Solutions financières sur mesure

UN PARTENAIRE FIABLE A VOS COTES.

**Gagner de l'argent, tout-de-suite.** Crédit à la Consommation, Leasing traditionnel ou Location Financière, nous avons toujours la solution adaptée à vos besoins. Grâce à ces formules financières, vous pouvez avoir UNA tout-de-suite et gagner de l'argent, en proposant à vos Clientes des offres intéressantes pour l'achat des traitements que vous pouvez faire.



**Pour toutes les phases de l'activité.** Pas seulement pour vous assister avec votre machine, mais aussi pour vendre des traitements. Nous pouvons conseiller des solutions spéciales proposées par des sociétés financières pour vendre des traitements à vos Clientes en leur proposant des paiements par mensualités. Vous aurez tous les instruments nécessaires à votre activité, avec un seul partenaire financier.





# Electronique avancée

UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIE.


**Une seule tête pour une multitude de cœurs.** Tout le monde se demande comment nous avons pu concentrer autant de technologies dans une seule machine. Nous n'avons pris que le cœur de chaque technologie, sa partie de puissance, et nous les avons reliés à un seul cerveau, en mesure de toutes les gérer avec la plus grande efficacité, simplicité et sécurité.



**Composants miniature.** Nous avons construit pour UNA des cartes électroniques en SMT. Cette technologie, employée pour construire les téléphones portables, utilise des composants jusqu'à 50 fois plus petits que les composants traditionnels. Grâce à cela, nous avons pu exploiter tous les espaces vides et placer plus de 5 000 composants électroniques dans UNA.

Technologie traditionnelle

Technologie SMT

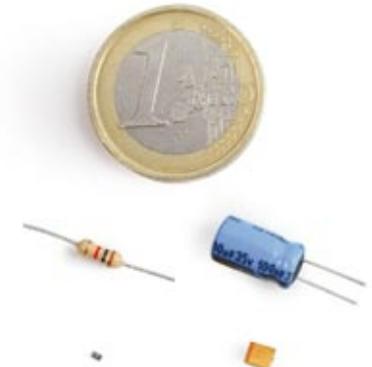



Technologies et typologies

	AMAIGRISSEMENT	ANTI-ÂGE	TONIFICATION	PEELING	RIDES	LIFTING	CAPILLAIRES	CELLULITE	ANTISTRESS	LYMPHODRAINAGE	DÉTOXIFIANT	DÉPILATION	STIMULANT	HYGIÈNE BUCCALE
ELECTROPORATION	☐	☐	☐			☐	☐					☐		
LIPOCAVITATION	☐													
RADIOFREQUENCE		☐	☐	☐			☐				☐			
CRYOELECTROPHORESE	☐		☐				☐							
LASER ESTHETIQUE		☐				☐	☐				☐			
MESOPORATION	☐	☐	☐				☐							
IPL LUMIERE A IMPULSIONS		☐	☐								☐			
VACUUM	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐			☐		
PRESSO							☐							
ULTRASONS	☐	☐	☐	☐			☐							☐
ELECTROSTIMULATION	☐		☐						☐			☐		
MICROCOURANTS			☐		☐	☐						☐		
THERMO	☐											☐		
PHOTOSTIMULATION		☐									☐	☐	☐	
MAGNÉTO						☐	☐	☐		☐		☐		
U.V. ULTRAVIOLETS												☐		
IR INFRAROUGES	☐						☐	☐				☐		
IONOPHORESE	☐			☐			☐					☐		
CHROMO					☐		☐	☐		☐		☐		
MICROABRASION DERMIQUE				☐										
OXYGENE		☐	☐		☐	☐		☐						

# Mille questions, la réponse est **UNA**

UNE QUANTITE D'ARMES POUR COMBATTRE LE MEME INESTHETISME.

## **Différentes solutions pour le même inesthétisme.**

Avec UNA, vous pouvez traiter plusieurs inesthétismes avec la même technologie, tout comme il existe des protocoles de différentes technologies pour chaque inesthétisme. Le tableau ci-contre vous indique les combinaisons possibles.

**Toujours le traitement adapté.** Chacun de nous a des caractéristiques physiques et un type de peau différent. Grâce à sa versatilité, UNA vous permet de résoudre tout les types de problèmes esthétiques en respectant ces différences. Si une technologie n'est pas efficace pour une Cliente, vous pouvez en utiliser une autre et donc toujours obtenir le meilleur résultat.

**Lequel choisir ?** Avec la fonction Recherche, il suffit de sélectionner le type de problème esthétique à traiter : la liste des traitements possibles et des applicateurs nécessaires

s'affichera. Rien de plus facile. Si l'applicateur vous manque, il suffit de l'ajouter pour effectuer le traitement.



# Electroporation

L'électroporation (également appelée mésothérapie sans aiguilles) est une méthode qui provoque l'ouverture des canaux aqueux (électropores) de la peau par l'effet de formes d'ondes spécifiques. On obtient une meilleure véhiculation des principes actifs des cosmétiques utilisés. Il existe différentes techniques, selon la forme d'onde et les modalités d'application utilisées. L'électroporation a une durée d'application plus courte que la

ionophorèse traditionnelle, elle est entièrement indolore et permet une véhiculation contrôlée de grandes quantités de principes actifs.



VISAGE

VENTRE

CUISSES




# Lipocavitation

L'effet "cavitation" est la formation de micro-bulles de vapeur due au traitement d'un liquide par ultrasons à basse fréquence (de 20 KHz à 35 KHz).

Si l'intensité des ultrasons est adaptée, elle peut engendrer la formation, la croissance et une rapide explosion des bulles de vapeur, qui délivrent alors de l'énergie.

Si l'énergie des ondes de choc est libérée à proximité des cavités adipeuses, on observe une véri-

table lyse cellulaire, avec un effet marqué de réduction des adiposités localisées (appelée la lipolyse par cavitation).

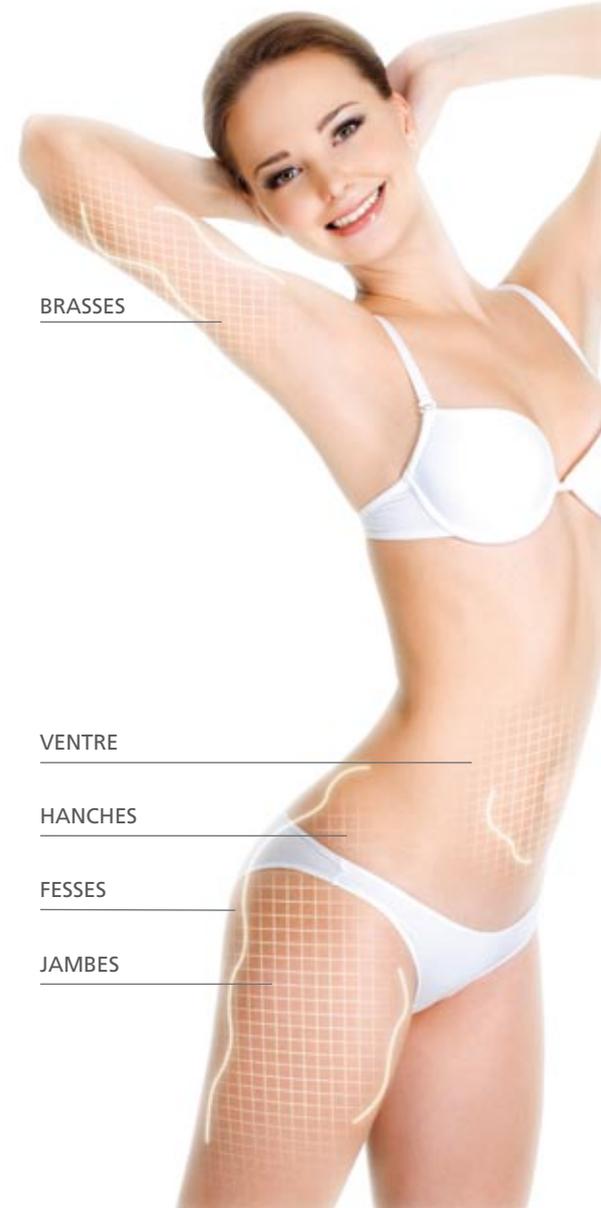

BRASSES

VENTRE

HANCHES

FESSES

JAMBES

# Radiofréquence

La radiofréquence consiste en la génération de chaleur endogène dans les couches internes de la peau par la transmission d'un champ électromagnétique. Les tissus concernés développent de la chaleur proportionnellement à l'intensité de courant induite, à la résistance opposée par les tissus et à la durée du traitement. Dans le domaine esthétique, cette méthode est appliquée pour le traitement des laxités cutanées provoquées par

les différents processus de vieillissement. L'effet anti-âge est particulièrement évident sur le contour des yeux, le visage et le cou, mais aussi sur l'abdomen, l'intérieur des cuisses et les bras qui s'améliorent nettement.

VISAGE

BRASSES

VENTRE

CUISSES



# Cryoélectrophorèse

La cryoélectrophorèse est une technique qui facilite la véhiculation transcutanée de principes actifs naturels à travers l'utilisation du froid et d'un courant électrique à faible voltage. L'introduction à basse température de différentes solutions cosmétiques dissoutes dans la glace permet de les faire mieux pénétrer, et plus en profondeur, ce qui accélère l'absorption et l'optimisation des effets. Dans le domaine esthétique, la

cryoélectrophorèse est particulièrement efficace contre les inesthésismes de la cellulite, la réduction des adiposités localisées et l'atténuation des signes du temps sur le visage et le corps.




VISAGE

SEIN

VENTRE

CUISSES

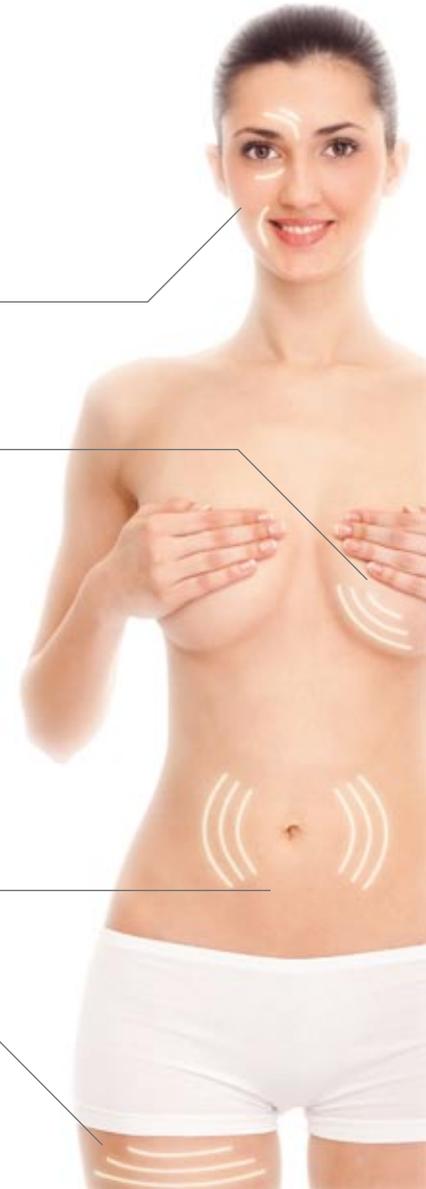

# Laser esthétique

Le LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, c'est-à-dire l'amplification de la lumière à travers l'émission stimulée de radiations) est un dispositif de haute technologie en mesure d'amplifier efficacement les ondes lumineuses. Il interagit avec l'organisme humain de différentes manières, et c'est la raison pour laquelle l'effet dépend de la typologie de laser, de

la longueur des ondes émises, de la puissance et du tissu ciblé par le traitement (chromophore-cible). Grâce à sa versatilité, le laser est un instrument précieux dans le domaine de l'esthétique pour les traitements de : épilation permanente, télangiectasie, taches cutanées, photo-rajeunissement et de nombreux autres traitements.



VISAGE

---

CORPS

---

JAMBES

---



# Mésoporation

La mésoporation est une technique pour la véhiculation transdermique de cosmétiques basée sur la synergie entre l'électroporation des tissus et la stimulation électrique. Grâce à l'émission d'une forme d'onde expressément paramétrée, on stimule la création de familles d'électropores, ce qui augmente la perméabilité cutanée, puis on véhicule le cosmétique en profondeur par électrodifusion, à travers de nouveaux parcours intra et extra

cellulaires générés durant la phase d'électroporation.

Cette technique a l'avantage de véhiculer en profondeur les molécules de grandes dimensions dans les différentes couches de la peau.


VISAGE

SEIN

VENTRE

FESSES

CUISSES

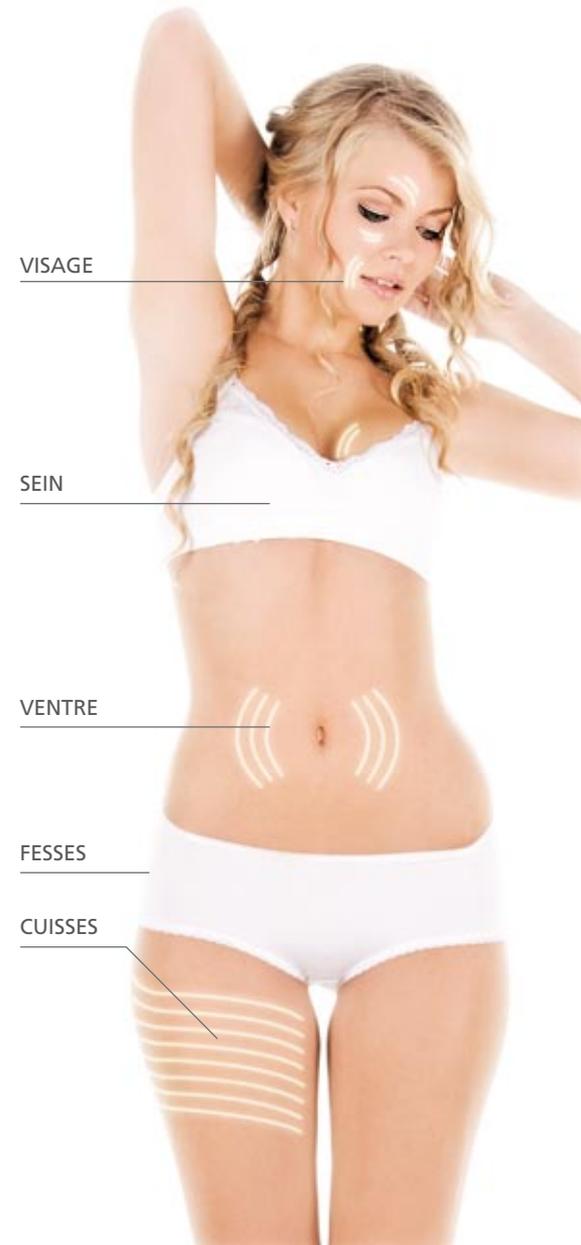

# IPL, Lumière par Impulsions

L'IPL (Intense Pulsed Light, c'est-à-dire « lumière par impulsions à haute intensité ») utilise une source d'énergie lumineuse polychromatique à haute intensité. Selon la longueur d'ondes, l'énergie du rayon lumineux est absorbée à différentes profondeurs par certaines molécules (en particulier la mélanine et l'hémoglobine) présentes dans le tissu épithélial. Cette interaction provoque différents effets biologiques, comme par exemple : la

photothermolyse sélective du poil, la stimulation des fibroblastes, l'amélioration du tonus des parois des vaisseaux.

L'IPL permet donc de traiter efficacement et de façon peu invasive une vaste gamme de problèmes : taches de la peau, poils en excès, couperose, rosacée, télangiectasie.

VISAGE

---

AISELLES

---

BRASSES

---

ABDOMEN

---

AINE

---

JAMBES

---



# Vacuum

Le vacuum consiste en un "massage" endodermique créé par la génération, grâce à des applicateurs spécifiques, de zones de vide dans les tissus sous-cutanés (aspiration et dépressurisation). On obtient ainsi un effet « ventouse » qui, provoquant un afflux de sang plus important dans la zone d'application, stimule l'oxygénation des tissus concernés, ce qui accélère le changement de substances, favorise l'élimination des toxines et

améliore la circulation veineuse. Dans le domaine de l'esthétique, cette méthode est particulièrement efficace dans les traitements lipolytiques, anti-cellulite et de rajeunissement.




VISAGE

SEIN

VENTRE

FESSES

CUISSES

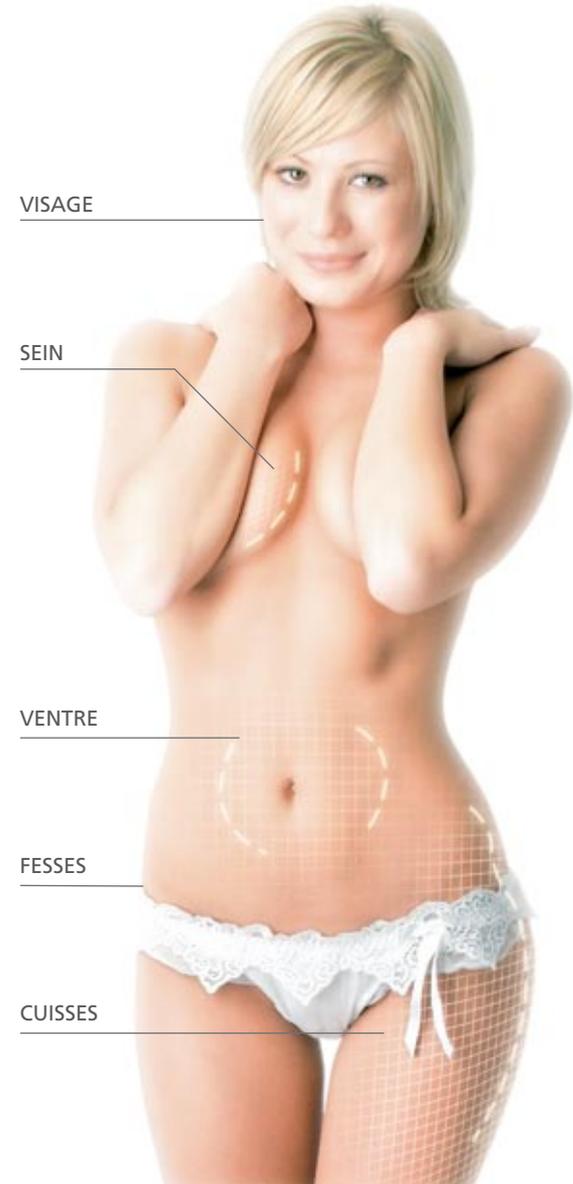

# Presso

La technique du presso-massage recourt à la variation contrôlée de la pression dans des régions spécifiques du corps, améliorant considérablement la circulation veineuse et lymphatique. Ce type de « massage », effectué à l'aide de poches spéciales, favorise l'élimination d'une grande partie des liquides stagnants et des résidus métaboliques accumulés dans les tissus à cause de la mauvaise circulation locale. A la différence du massage manuel,

cette technique provoque une pression constante, aussi bien en fréquence qu'en intensité, durant toute la durée du traitement. Elle est donc semblable aux processus circulatoires veineux et lymphatiques normaux. L'utilisation de la presso améliore de manière évidente les inesthétismes tels que la cellulite, la rétention d'eau, l'ectasie.

BRASSES

VENTRE

HANCHES

CUISSES



# Ultrasons

Les ultrasons sont des vibrations acoustiques dont la fréquence est supérieure à celles que l'oreille humaine peut percevoir (20 000 Hz), émises par des transducteurs en mesure de les transformer en « énergie mécanique ». En appliquant ces transducteurs sur les zones à traiter, on provoque la pénétration des ultrasons dans les tissus concernés ; selon la fréquence d'émission (qui varie de 1 à 3 MHz), on peut obtenir diffé-

rents effets bénéfiques. Les effets principaux sont une vasodilatation réactive due à l'effet thermique et une destructuration due à l'action mécanique du collagène présent dans les tissus. Tous deux sont particulièrement utiles pour les traitements de réduction de la graisse localisée ou d'autres traitements particuliers, selon le type d'applicateur.



BRASSES

VENTRE

HANCHES

FESSES

CUISSES



# Electrostimulation

L'électrostimulation consiste à appliquer localement des impulsions électriques afin d'obtenir un effet biologique. Un bon choix, aussi bien de la forme d'onde que des paramètres du traitement (intensité, fréquence et durée) permet d'obtenir une contraction du muscle bien visible mais en même temps tolérable, condition nécessaire pour garantir un résultat optimal. Selon la typologie d'onde utilisée, on peut obtenir des résultats com-

me la réduction de la graisse localisée, le modelage de la silhouette, le raffermissement et la tonification musculaire. Les traitements que l'on peut effectuer à l'aide de cette technologie sont : lifting visage et décolleté, tonification musculaire, réduction des adiposités localisées, lymphodrainage.

VISAGE


SEIN

VENTRE

HANCHES

FESSES

JAMBES

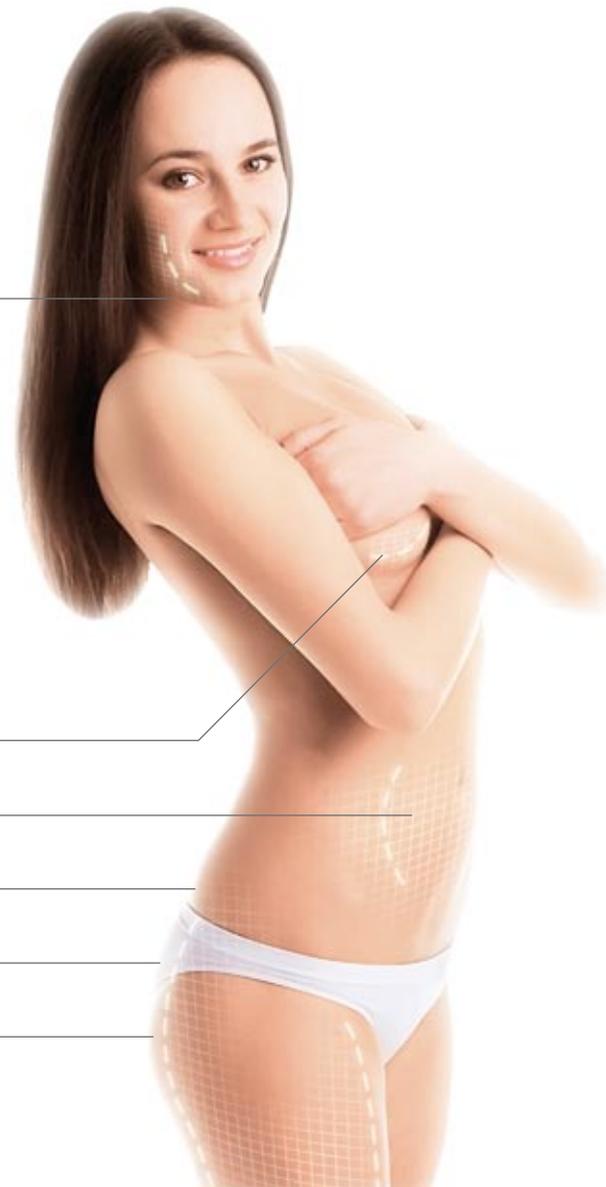

# Microcourants

Les microcourants sont des courants de faible intensité qui s'appliquent de manière localisée afin de stimuler les processus de renouvellement cellulaire. L'application de microcourants dans une zone limitée stimule, au niveau épidermique, la phase inflammatoire exsudative (œdème), en rappelant l'eau des couches les plus profondes. Cela provoque une accélération de la prolifération des fibroblastes, les cellules qui synthétisent

le collagène et l'élastine. Grâce à ce mécanisme, le collagène n'est plus introduit par l'extérieur, mais produit par l'organisme lui-même, ce qui engendre des résultats immédiatement visibles sur la réduction des rides et ridules.

FRONT

YEUX

BOUCHE



# Thermo

La thermo consiste en l'induction de chaleur, localement ou sur toute la surface du corps, à travers différents types d'applicateurs. Son premier effet est l'augmentation de l'afflux de sang dans le tissu traité. La vasodilatation ainsi obtenue provoque un apport majeur de substances nutritives, d'oxygène, de globules blancs et d'anticorps, facilitant l'élimination de substances néfastes pour l'organisme. Cette action détoxifiante est souvent

associée à des effets lipolithiques et analgésiques. La thermo est également utilisée pour amplifier les résultats d'autres traitements esthétiques, également associés à des cosmétiques.

CORPS

VENTRE

HANCHES

FESSES

JAMBES



# Photostimulation

La photostimulation consiste à l'exposition programmée à une source de lumière artificielle à haute intensité et différentes longueurs d'ondes (couleur). Selon la couleur de la lumière, l'interaction entre les photons lumineux et les récepteurs cellulaires module une réponse biologique des tissus qui activent un processus appelé photobiomodulation.

Cette activité influence de manière

positive l'équilibre psycho-physique de l'individu traité et améliore les processus de réparation et régénération. Elle n'a pas d'effets secondaires, ni aucune contre-indication particulière.

FRONT

VISAGE

DENTS



# Magnéto

La magnéto consiste à appliquer un champ magnétique localement ou sur tout le corps.

Les effets les plus importants sont : la biostimulation de la réparation des tissus, une action anti-inflammatoire et la réduction des liquides en excès.

D'un point de vue strictement esthétique, les champs magnétiques sont appliqués dans les traitements visant à lutter contre la cellulite, améliorer la circulation

locale (avec des effets bénéfiques sur la fragilité capillaire), réduire les adiposités et traiter les dermatoses de différentes natures.

VISAGE

CORPS

JAMBES



# UV Ultraviolets

Les UV (ou rayons actiniques), sont des radiations électromagnétiques de la bande de l'ultraviolet, qui agissent au niveau cutané, car la plupart de ceux-ci sont absorbés par la peau et n'atteignent pas les couches plus profondes.

L'effet le plus important consiste à stimuler la production de mélanine, qui favorise le bronzage, mais également une action protectrice et bactéricide envers de nombreux micro-organismes. Les rayons UV

sont donc particulièrement indiqués dans le traitement des maladies dermatologiques et dans la réduction de certains inesthétismes en cas de traitements esthétiques.

VISAGE

CORPS



# IR Infrarouge

Le terme « infrarouge » indique les radiations lumineuses caractérisées par la proximité de la couleur rouge du spectre visible. Les rayons infrarouges sont rapidement absorbés par les couches superficielles de la peau, où ils provoquent une augmentation de l'afflux de sang dans les tissus. Cette augmentation comporte un plus grand apport de substances nutritives et d'oxygène actif. De plus, une partie de la chaleur produite par les infrarouges

est transmise aux tissus profonds par conduction et au moyen de liquides en circulation, engendrant l'augmentation du métabolisme des graisses et une bonne émission musculaire.

VISAGE

---

CORPS

---

VENTRE


---

FESSES

---

CUISSES

---

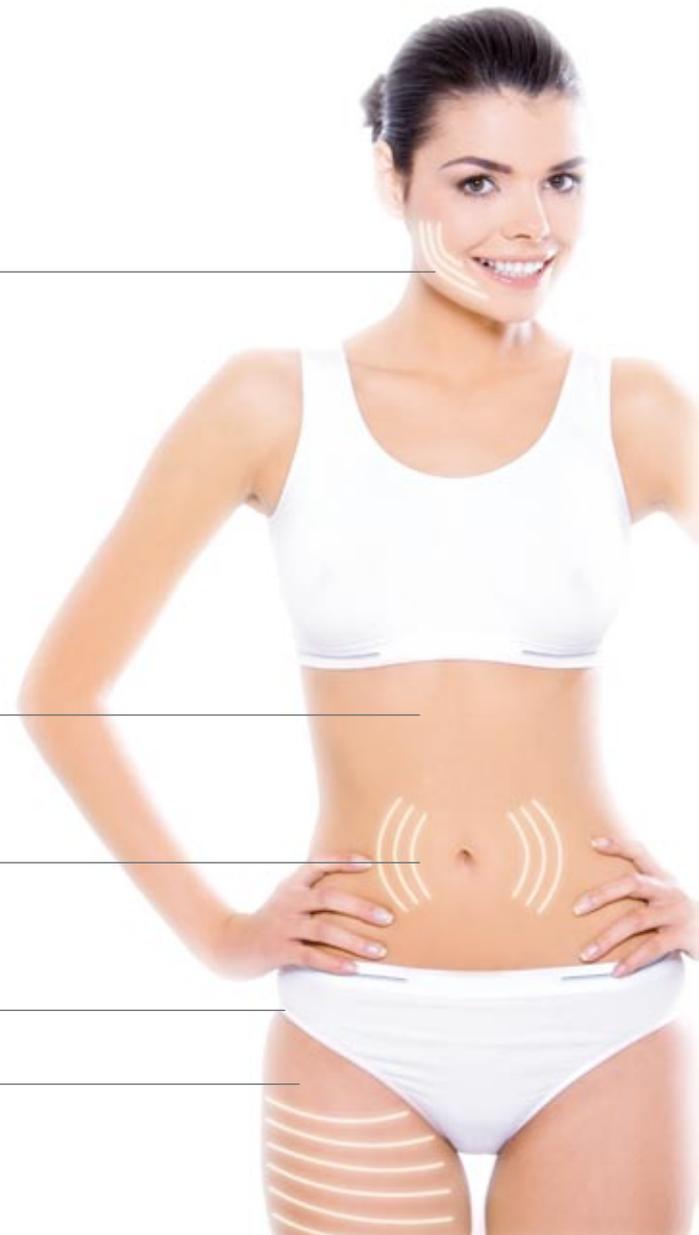

# Ionophorèse

La ionophorèse (littéralement « transport d'ions ») est un type de stimulation électrique qui favorise la pénétration d'un principe actif par voie transdermique. Cela permet d'introduire, directement dans la zone à traiter, des substances simples et naturelles qui augmentent ainsi leur potentiel d'action. On obtient donc des effets semblables ou supérieurs à ceux de la prise de substances chimiques plus complexes, qui peuvent s'avé-

rer nocives pour l'organisme. Elle est appliquée avec efficacité dans le domaine esthétique, où elle est utilisée par exemple pour les traitements anticellulite et pour raffermir et tonifier les muscles.

BRASSES

VENTRE

HANCHES

FESSES

CUISSES




# Chromo

La chromo est une discipline antique basée sur l'utilisation de l'énergie des couleurs, afin d'aider le corps et le psychisme à retrouver leur équilibre naturel. Chaque couleur, à laquelle on peut attribuer un effet biologique particulier, est associée à certaines caractéristiques psychiques et spirituelles. Les ondes électromagnétiques de la lumière pénètrent dans les tissus, rétablissent l'équilibre cellulaire au niveau électrique et chimique : les fonc-

tions biologiques de l'organisme en tirent un bénéfice immédiat.

Il est important de souligner que la chromo n'agit pas simplement sur les symptômes, mais elle agit directement sur la source du déséquilibre psycho-physique ; on évite ainsi de recourir à des médicaments qui provoquent souvent des résidus néfastes et difficiles à éliminer.

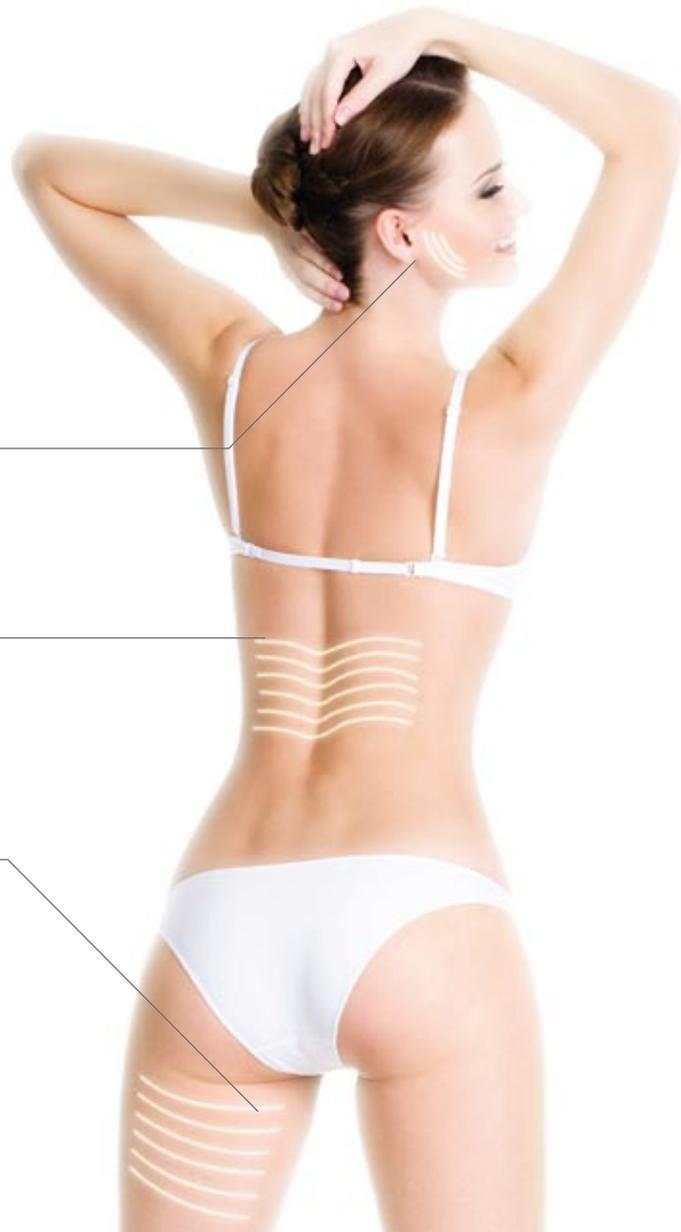

VISAGE

CORPS

JAMBES



# Abrasion dermique


L'abrasion dermique consiste en l'élimination mécanique des couches épithéliales les plus superficielles, en améliorant ainsi les irrégularités de la peau et en lui donnant un aspect plus lisse et régulier. Cette élimination endommage le tissu, qui induit à son tour une stimulation efficace des processus de réparation. Le résultat final est donc la réépithélialisation (c'est-à-dire la naissance d'une nouvelle peau) de la zone traitée.

L'abrasion dermique permet de renouveler de manière significative la peau, mais aussi de corriger les cicatrices et les rides les plus superficielles du visage, du contour des lèvres, et d'améliorer la cicatrisation de l'acnée.

FRONT

VISAGE

CONTOUR DES LEVRES

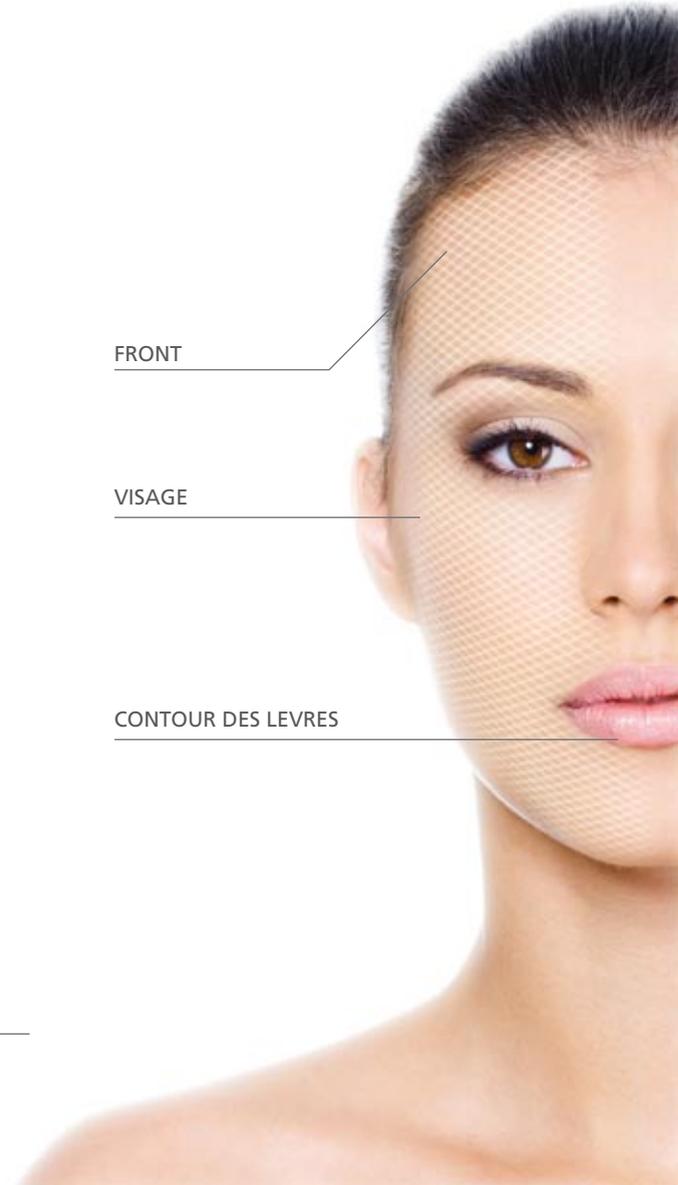

# Oxygène

Par traitement esthétique à l'oxygène on entend la méthode d'ajout d'oxygène à l'organisme à travers la peau. Il s'agit d'une technique de véhiculation transdermique qui augmente simultanément le contenu en oxygène disponible au niveau épidermique. L'oxygène est transmis à travers des dispositifs et poignées spéciaux : ils génèrent un jet pressurisé qui, au contact de la peau, crée une dépression cutanée. Cette incurvation superficielle se

traduit par une action mécanique de détente qui élargit les pores, augmentant ainsi leur perméabilité : il est donc possible de véhiculer non seulement l'oxygène, mais aussi des mélanges de principes actifs.

VISAGE

---

VENTRE

---

CUISSES

---



# Peeling Chimiques

Ce groupe comprend les techniques qui stimulent l'exfoliation contrôlée des couches superficielles de la peau, c'est-à-dire avant tout l'élimination de la couche cornée (Peeling Superficiels), puis des autres feuillets épidermiques et du derme (Peeling Moyen et Profond), selon les finalités du peeling. Plusieurs méthodes sont disponibles : les peeling chimiques sont déliacts et se répètent plusieurs fois durant des mois, les peeling

agressifs ont des résultats importants qui demandent un temps de récupération allant de quelques jours à une ou deux semaines. Le peeling est indiqué pour ceux qui souhaitent améliorer la qualité et la luminosité de leur peau. Il a aussi une bonne action sur les ridules plus fines et provoque au fil du temps une augmentation des fibres collagènes et élastiques, et rendent donc la peau plus compacte.

VISAGE

CORPS



# TYPOLOGIES

## AMAIGRISSEMENT

---

Tout traitement de nature physique ciblé sur la réduction de l'excès de graisse localisé, sans forcément chercher une réduction du poids, est décrit comme « amaigrissement localisé ». Le terme adiposité localisée décrit la présence d'un tissu adipeux en abondance dans une zone circonscrite du corps, due aussi bien à un nombre excessif de cellules adipeuses qu'à une hyperplasie cellulaire (augmentation du volume de la cellule adipeuse). La quantité et la répartition de « graisse localisée » varie pour chaque individu selon son sexe, son âge, le pourcentage de graisse corporelle totale, à ses gènes, à la quantité et la typologie d'activité physique pratiquée. .

## ANTI-ÂGE

---

Tout traitement de nature cosmétologique ou physique visant à renaturer les fibres collagènes et l'élastine est défini comme « anti-âge » (et donc « anti-vieillesse »). Le processus de vieillissement du tissu cutané est en revanche appelé « ageing ». Le tissu cutané se relâche visiblement, de petites rides ou rides apparaissent, la peau devient opaque et est déshydratée.

## TONIFICATION

---

La tonification est un traitement esthétique qui vise à récupérer et garder le tonus, la luminosité et l'élasticité de la peau à travers la reconstruction de sa structure physiologique de soutien. La diminution de tonus des tissus et des muscles ralentit le métabolisme des tissus, en accélérant le processus de vieillissement. La peau perd son élasticité normale et, en s'appuyant sur les tissus plus profonds, il compromet littéralement la partie structurale, c'est-à-dire les muscles.

## PEELING

---

Le peeling est une technique qui comporte l'exfoliation contrôlée des couches superficielles de la peau. Selon la finalité du traitement, on peut recourir à l'élimination uniquement de la couche superficielle ou des feuillets épidermiques plus profonds. Nombreuses sont les méthodes disponibles : des peelings chimiques très délicats, à recommencer plusieurs fois pendant quelques mois, aux peelings plus agressifs, qui garantissent des résultats importants mais requièrent un temps de récupération plus long. Il agit sur les rides les plus fines, mais provoque également une augmentation des fibres collagènes et de l'élastine avec le temps. Il est donc particulièrement indiqué pour ceux qui cherchent à améliorer la qualité et la luminosité de leur peau, tout en la rendant plus compacte.

## RIDES

---

On appelle anti-rides tout traitement visant à atténuer et à prévenir la formation des rides. Il s'agit de plis de la surface de la peau qui se forment dans les zones les plus exposées comme le visage et le décolleté, suite à la dénaturation des fibres élastiques (élastine et collagène) et à l'appauvrissement de la matrice de glycosaminoglycane. Les causes sont multiples : le temps qui passe, l'exposition au soleil et aux climats particulièrement défavorables,

la pollution atmosphérique, les agents oxydants (radicaux libres) et certaines infections. Pour lutter contre l'apparition des rides et atténuer celles qui existent, on peut recourir à différentes stratégies, de la cosmétique préventive ou reconstructive à la chirurgie plastique.

## LIFTING

---

Le lifting du visage est une intervention dont l'objectif est d'améliorer l'aspect du visage en atténuant les dommages provoqués par l'âge et les facteurs externes. Cette amélioration est obtenue en étirant la peau et les muscles du visage. Le résultat varie d'une personne à l'autre et est influencé par l'état physique de la peau, le degré du dommage produit par les rayons du soleil, par les structures osseuses situées au-dessous et par différents autres facteurs. Outre la pratique chirurgicale, on appelle « lifting non invasif » toutes les thérapies et méthodes visant à obtenir une amélioration esthétique.

## CAPILLAIRES

---

Les capillaires (télangiectasie), ou veines en toile d'araignée, constituent l'un des inesthétismes les plus communs dans les zones les plus irriguées par le sang, comme le visage et les jambes. Il s'agit de petits vaisseaux capillaires dilatés qui prennent des formes et colorations différentes : rouges linéaires et ramifiées (typique du visage), bleu linéaire (jambes), en étoile (angiomes stellaires). La grossesse, la sénescence, une station debout prolongée, l'excès de poids, sont certaines des causes les plus fréquentes de prédisposition. Les traitements d'amélioration

vont de la cosmétique préventive et lénitive aux traitements à partir d'instruments (thérapie au laser, véhicularisation transdermique, lumières par impulsions), jusqu'aux traitements semi-invasifs comme les injections par sclérosants.

## CELLULITE

---

On appelle traitement anti-cellulite toute pratique cosmétologique ou physique visant la réduction des inesthétismes (peau d'orange, capillaires en toile d'araignée, rétention hydrique) associés à la cellulite. La cellulite est l'altération des cellules adipeuses du tissu sous-cutané, qui tendent à augmenter en volume et en nombre jusqu'à comprimer les capillaires sanguins qui commencent à libérer du plasma. Avec le temps, le plasma qui s'est infiltré dans les cellules provoque une inflammation du tissu adipeux, avec la formation de fibroses dans les tissus sous-cutanés. Les capillaires sont plus comprimés encore et le drainage des liquides en excès est de plus en plus difficile : on entre ainsi dans un cercle vicieux qui provoque une dégénération progressive et la sclérose du tissu.

## ANTISTRESS

---

On appelle antistress tout traitement visant à réduire les symptômes et à contrôler les causes du stress. Le stress est une réaction typique d'adaptation du corps à un changement physique ou psychique générique. L'organisme réagit à cet état en augmentant ou en bloquant la sécrétion de certaines hormones. On peut agir en intervenant directement

sur les stimuli qui génèrent l'événement stressant à l'aide de techniques de relaxation et de traitements instrumentaux visant à augmenter et améliorer les niveaux des substances messagères telles que la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine.

## LYMPHODRAINAGE

---

Le lymphodrainage est une technique spécifique de massage qui stimule le drainage lymphatique, c'est-à-dire l'élimination des liquides interstitiels stagnants. Cela provoque l'activation de la circulation veineuse et l'élimination des scories de l'organisme. Un bon lymphodrainage joue un rôle fondamental dans le traitement de la cellulite, car il agit sur la rétention hydrique et l'œdème caractéristique du tissu liposclérotique. Cette technique agit également sur le système neurovégétatif et le système parasympathique.

## DÉTOXIFIANT

---

On appelle détoxifiant tout traitement visant à réduire la présence de toxines dans l'organisme. Il faut avant tout distinguer les toxines endogènes, qui sont produites par le corps comme résultat de l'activité métabolique, et les toxines exogènes, que le corps absorbe depuis l'environnement externe. Une grande partie des toxines endogènes sont éliminées par le foie, tandis que les toxines exogènes requièrent des traitements détoxifiants, de nature aussi bien alimentaire qu'énergétique. La fatigue chronique, les douleurs musculaires et articulaires, la dépression, l'irritabilité, la confusion, sont les symptômes les plus évidents d'un organisme "intoxiqué".

## DÉPILATION

---

La surface cutanée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, est recouverte de poils. Chez les femmes il s'agit souvent de petits poils fins, qui peuvent parfois se densifier et provoquer la formation de véritables poils qui créent un inesthétisme. L'élimination des poils superflus est obtenue à l'aide des techniques les plus variées, qui vont du rasoir aux agents chimiques, en passant par des technologies électroesthétiques sophistiquées (IPL, électro-épilation, radiofréquence, laser, etc). On distingue toujours la dépilation et l'épilation : la dépilation consiste à éliminer le poil à partir du point auquel il émerge au niveau cutané, l'épilation consiste à éliminer le poil et le bulbe. Les meilleurs résultats sont évidemment ceux de l'épilation et non pas de la dépilation.

## STIMULANT

---

On appelle stimulant tout ce qui parvient à exciter l'organisme ou une partie de celui-ci, en provoquant une réponse ou son activation. Nos sens sont constamment touchés par des stimuli, c'est-à-dire des sollicitations au changement, et notre système est prêt à les recevoir afin de pouvoir se remettre en ordre. Dans cette optique, la stase n'est pas significative, ou du moins elle l'est moins que le changement : un traitement stimulant se base sur l'émission d'un stimuli afin de lutter justement contre une situation de stase et donc de produire un effet positif..



# Fonctions intégrées



Trattamenti

The screenshot shows a software interface for a medical procedure titled "Lifting Mesoporation". The interface includes a search icon, a magnifying glass, and a title bar. Below the title bar are several warning icons: a yellow triangle with an exclamation mark, a yellow lightning bolt, and a blue pushpin. A navigation bar contains tabs for "Istruzioni", "Precauzioni", "Ciclo", "Prodotti", and "Avvia".

The main content area features a video player on the left showing a close-up of a person's face being treated with a device. Above the video is a diagram of a person lying down and a close-up of the treatment device. To the right of the video is a large circular timer labeled "Minuti" with a red arc and a blue needle, showing a time of -16. Below the timer are two sliders: "Stilo" at 13% and "Roll On" at 23%. There are also several control buttons, including play, pause, and stop, and a "Contatto" button with a download icon.

At the bottom of the interface, there are additional control elements, including a video player with a progress bar and a "Roll On" slider at 59%.

# Traitements

LES MEMES COMMANDES POUR TOUTES LES TECHNOLOGIES.

**Pas de commande compliquée, pas de séquence à apprendre.** Choisissez le traitement par une simple pression, en sélectionnant par Zone d'application, Typologie, Technologie ou Applicateur utilisé, et laissez-vous guider. Chaque traitement comprend les instructions détaillées, avec des photos et vidéos explicatives. On vous montre la bonne position pour le sujet et l'applicateur, le nombre et la durée de cycles à effectuer.

## Chaque traitement est aussi un cours de formation.

Vous pouvez approfondir vos connaissances ou apprendre de nouvelles techniques avant de faire l'application. Faites défiler les photos pour vérifier les positions ou les parcours de l'applicateur, vérifiez les contre-indications et imprimez le document d'information pour la Cliente. Découvrez les produits à utiliser pour le traitement, tous les accessoires et les consommables. Si vous n'en avez pas, vous pouvez activer la fonction Mémo pour vous l'acheter plus tard, directement à partir de la machine.

## Les principales fonctions sont les suivantes :

- Mise à jour de nouveaux Traitements à distance.
- Recherche par Zone, Technologie, Typologie et Applicateur.
- Instructions avec des Photos et Vidéos pour chaque traitement.
- Précautions et Contre-indications.
- Cycle optimal du traitement.
- Produits Associés (Cosmétiques et Consommables).
- Impression Informations pour la Cliente.
- Fonction "Favoris".





Clienti

		Scheda	Elenco
Nome	Cognome	Telefono	Cellulare
Samantha	Galdieri	0611111	33382263728
Mariena	Frali	0856927276	33582736332
Laura	Cherubini	08569231321	33582736332
Tommasina	Furfante	08569231321	33582736332
Genovetta	Salvi	0856922311	33582736332
Antonia	Zaffiro	0856927276	33582736332
Rosaria	Ranieri	0856922311	33582736332
Luca	De Gregori	0856927276	33582736332

# Clients

SI VOUS CONNAISSEZ VOS CLIENTS, ILS SE SENTIRONT CHEZ EUX.

**Sans vous éloigner de la cabine** vous pouvez savoir tout ce dont vos Clientes ont besoin. Sans acheter d'autre logiciel, vous pouvez associer à chacune d'elle toutes les informations nécessaires : les contre-indications spécifiques, les notes pour les exigences particulières ou les nouvelles, les traitements effectués et à effectuer. Vous pouvez en outre paramétrer et imprimer, pour chacun d'elle, le calendrier des rendez-vous et la fiche résumant toutes les informations ou la liste complète. Le tout à portée de doigt.

## Les principales fonctions sont :

- Gestion renseignements personnels Clients.
- Affichage de la liste ou des détails de la fiche.
- Recherche rapide à partir de la liste.
- Registre des traitements effectués.
- Rappel des traitements à effectuer.
- Anamnèse avec champs des notes et contre-indications.
- Sauvegarde des données des Clients sur smart card.
- Impression liste ou fiche Clients.



Fiche client



Traitements effectués et à effectuer



Ordini Appuntamenti Trattamenti

Download Add Calendar Print

Monday 9 August Tuesday 10 August Wednesday 11 August Thursday 12 August Friday 13 August

Time	Monday 9 August	Tuesday 10 August	Wednesday 11 August	Thursday 12 August	Friday 13 August
9:00					
10:00		Samantha Galdieri Peeling chimico viso	10.00-12.10 Samantha Galdieri Peeling viso chimico (Light)		Marlena Frati Depilazione Pinza Termolisi
11:00	Serena Cantalupi Ultrasoni glutei			Antonia Zaffro Depilazione Pinza Termolisi	
12:00					
13:00					
14:00		13.30-15.10 Marlena Frati Peeling viso spatola			
15:00	14.42-16.30 Samantha Galdieri Depilazione	14.42-17.00 Genoveffa Salmi Peeling viso Dermoab			
16:00					
17:00					

# Gestion

## PLANIFIEZ ET GEREZ VOTRE CENTRE.

**Tout est contrôlé.** Grâce au Planning, vous organisez et imprimez facilement les rendez-vous. Vous pouvez les passer d'un jour à l'autre en les faisant glisser avec le doigt. Vous pouvez gérer le bordereau des prix de tous les traitements du Centre, même ceux qui ne peuvent pas être effectués avec UNA, et vérifier l'état des commandes dans le Magasin.

Avec une organisation aussi simple et complète, vous pourrez dédier toujours plus de temps à la promotion des Traitements et aux autres activités plus importantes.

### Les principales fonctions sont :

- Planning rendez-vous : jour, semaine, mois, année.
- Détail rendez-vous : Cliente, type, heure, date, notes.
- Fonctionnalité "drag & drop" pour déplacer les rendez-vous.
- Paramétrage heure et jours de travail.
- Gestion commandes du Magasin.
- Gestion bordereau des prix des traitements.



Liste traitements



Gestion rendez-vous



Test

A screenshot of a software interface for skin treatments. The interface is light blue and white. At the top right, there is a search icon. Below it, a navigation bar contains four icons: a person, a target, and a star. The text "Tipologie" is centered below these icons. To the right of the navigation bar, it says "0 TRATTAMENTI DISPONIBILI" and has two buttons: "Tutti" and "Pre feriti". On the left side, there is a sidebar with a button labeled "Valutazione superficie" and a right-pointing arrow. The main area displays two treatment entries, each with a small image of a person's face and a blue device. The first entry is "Valutazione nei" and the second is "Valutazione Depilazione". Both entries have the same details: "Tipologia: Valutazione superfic", "Applicatore : Microscopio Dyno", and "Tecnologia: Dermomicroscopia". Each entry has a right-pointing arrow.

# Test

NON SEULEMENT POUR FAIRE, MAIS AUSSI POUR MESURER.

**UNA est aussi un instrument de Test** en mesure de faire des évaluations comparatives de la peau, de la masse grasse et bien d'autres encore. Les résultats peuvent être associés à la Cliente afin d'évaluer les progrès des traitements effectués.

Comme pour les traitements, toutes les procédures de Test sont soigneusement illustrées et guidées par des instructions écrites, des photos, des vidéos, et elles suivent la même disposition que les traitements.

Vous pouvez personnaliser l'impression des Tests avec les données du Centre et de la Cliente.

## Les principales fonctions sont :

- Mise à jour des nouveaux Tests à distance.
- Une seule interface pour tous les Tests à effectuer.
- Recherche par Zone, Technologie, Typologie et Applicateur.

- Instructions détaillées avec Photos et Vidéos pour chaque Test.
- Produits Associés à chaque Test.
- Sélection comme "Favoris".
- Impression résultats des Tests avec nom de la Cliente.
- Impressions personnalisables avec le nom du Centre.





Formazione

Consultazione E-Learning

Controindicazioni

- Allergia ai metalli >
- Portatore di Pace-Maker >
- Cute lesa >
- Cardiopatía >
- Gravidanza in corso >
- Ciclo mestruale >
- Impianti metallici >
- Rischio o recenti trombosi >
- Portatori di spirale (IUD) >

Le allergie di questo tipo si manifestano prevalentemente nei confronti di metalli quali cobalto, mercurio, cromo e nichel.

- Il cobalto si trova nel cemento, in alcuni detersivi e oli lubrificanti.
- Il mercurio è contenuto in alcuni cosmetici, coloranti, cere e vernici.
- Il cromo si trova nel cemento, nei detersivi, nei candeggianti, nei saponi, nel cuoio, nelle sostanze antiruggine.
- Il nichel è presente nei coloranti, soprattutto quelli a base di anilina, utilizzati nella lavorazione di pelle, pellicce, gomma ma viene utilizzato anche per la placcatura di orecchini, collane, braccialetti e si può ritrovare nella composizione di cosmetici.

Codice Internazionale OMS L23.0

# Formation

POUR DONNER DE PLUS EN PLUS DE BONNES REPONSES A VOS CLIENTES.

**UNA exécute. UNA met à jour. UNA enseigne.** Les Clientes d'aujourd'hui sont toujours plus informées, grâce à la diffusion des informations par la presse et l'Internet, et elles veulent toujours trouver des interlocuteurs prêts à répondre. Vous trouverez dans UNA les principaux concepts de toutes les technologies, études cliniques et description des contre-indications, pour pouvoir toujours répondre à leurs questions. Une nouvelle technologie voit le jour ? De nouveaux traitements sont développés ? UNA se met à jour et vous met à jour avec les principaux concepts, ou vous propose un cours de formation (e-Learning) pour que vous puissiez les connaître et les utiliser. Grâce aux tests de vérification en ligne, vous pourrez obtenir des attestations de préparation. Le tout sans sortir de votre Centre : téléchargez automatiquement le cours et mettez-vous à jour.

## Les principales fonctions sont :

- Dictionnaire technologies.

- Assistance scientifique pour technologies.
- Dictionnaire typologies.
- Dictionnaire symboles de sécurité associés aux applicateurs.
- Dictionnaire contre-indications avec description et code OMS.
- Test pour vérifier l'apprentissage durant le cours.



*Dictionnaire avertissements*



Store

		Catalogo	Da acquistare	Carrello					
		Tutto	Applicatori	Cosmetici	Accessori	Consumabili	Videocorsi	Trattamenti	Altro
	Nome	Prezzo	Ricorda	Acquista					
	Elettrodi 2 CH	€ 126,00	<input type="checkbox"/>						
	Testina 1MHz	€ 249,40	<input type="checkbox"/>						
	Testina 3MHz	€ 249,40	<input type="checkbox"/>						
	Pinza depilazione	€ 134,71	<input type="checkbox"/>						
	Spatola ad Ultrasuoni	€ 779,95	<input type="checkbox"/>						
	Applicatore a sfere	€ 137,46	<input type="checkbox"/>						
	Manipolo laser	€ 525,00	<input type="checkbox"/>						
	Elettrostimolazione 8 CH	€ 760,00	<input type="checkbox"/>						
	Manipolo Microelettrodi laser	€ 152,20	<input type="checkbox"/>						

# Store

UNA, VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ.

**Le Store est le magasin intégré directement dans UNA**, à partir duquel vous pouvez acheter en temps réel tout ce qui vous sert, en quelques gestes simples.

Vous êtes entrain de faire un traitement et vous vous apercevez que le produit est presque fini ? Une touche suffit pour le mettre dans la Liste des courses (« Memo ») pour le commander plus tard, sans rien oublier et en contrôlant votre stock en toute tranquillité.

**Les principales fonctions sont :**

- Catalogue général des produits.
- Liste par catégories (Cosmétiques, Applicateur, Accessoires, etc).
- Fonction "Memo", pour se souvenir des produits à acheter.
- Achats et réductions quantité.
- Choix des méthodes de paiement.
- Choix des méthodes d'expédition.
- Accès 24 heures sur 24.



# Les détails qui font la différence



**Recherche traitements.** Trouvez le traitement que vous voulez en le choisissant par Applicateur, Zone (jambes, visage, etc.), Technologie (ultrasons, radiofréquence, etc.) ou Typologie d'inesthésisme (amaigrissement, tonification, épilation, etc.). Vous pouvez également introduire l'Applicateur, et la liste de tous les traitements que vous pouvez faire s'affichera automatiquement.

**Smart Card.** UNA a un lecteur de Smart Card avec lequel vous pouvez gérer la sécurité (Carte Propriétaire) ou lire les données des Cartes de vos Clientes. Vous pouvez acheter les Cartes personnalisées avec le logo et les couleurs de votre Centre à donner aux Clientes, pour gérer les campagnes de fidélisation ou de marketing.



**Niveaux d'accès.** Vous gérez très facilement l'accès aux différentes fonctionnalités de UNA à l'aide de la Smart Card. Vous pouvez garantir la confidentialité des données concernant les Clientes (dans le respect des normes), décider quel collaborateur peut acheter des produits, accéder à la Formation, consulter l'historique des traitements ou gérer l'agenda des rendez-vous.



**Connexions à l'Internet.** Certaines fonctionnalités de UNA requièrent l'accès au réseau Internet (assistance, mises à jour, commandes). UNA peut se connecter à l'Internet par Wi-Fi, câble Ethernet ou à l'aide d'une clé internet USB avec la carte du fournisseur d'accès, quel qu'il soit.



# Support

POUR VENDRE, APPRENDRE, COMMUNIQUER.



# Cours de Formation

MISE A JOUR CONTINUE ET CERTIFIEE.

**Chez nous : nos experts pour vous.** Notre soutien à votre travail commence en vous garantissant la formation et la compétence.

UNA vous suit dans l'exécution de chacun des traitements et vous permet également d'acquérir de nouvelles compétences techniques lors des Cours de Formation et Mise à Jour – tenus par des experts et spécialistes – organisés régulièrement et gratuitement chez nous.

**Chez vous : compétence certifiée.** Il est important de toujours savoir donner la bonne réponse. Si vous ne pouvez pas participer aux Cours organisés chez nous, vous pourrez vous garantir une mise à jour constante et de qualité. UNA vous permet d'intégrer ou d'acquérir de nouvelles compétences grâce à la fonction E-Learning. Vous pourrez à tout moment télécharger les cours, étudier les documents, accéder à la zone de Test et vérifier vos compétences.

**Attestations.** Lorsque vous aurez réussi l'examen, vous recevrez les Attestations qui certifient vos compétences directement dans votre Centre. Pour que votre professionisme soit reconnu par les autres aussi.





# Journée Portes Ouvertes

A VOS CÔTES : PROMOTION ET FORMATION.

**A vos côtés pour vous mettre en valeur.** Vous pourrez organiser des Journées Portes Ouvertes, même plusieurs fois par an, pour promouvoir les nouvelles technologies avec l'aide de nos Beauty Consultant. Nous vous fournissons un kit complet pour la meilleure publicité de ces Journées : prospectus, posters, invitations, brochures, le tout personnalisé à votre nom.

**Avec vous pour vous former.** Ces moments n'ont pas uniquement une fonction promotionnelle : ils se transforment en d'importantes occasions de formation. Nos Beauty Consultant vous montreront, à vous et à vos collaborateurs, comment effectuer au mieux chacun des traitements des technologies que vous avez déjà ou celles qui vous intéressent.



TUO NOME

# IPL LUCE PULSATA

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE



VISO

ASCELLE

BRACCIA

ADDOME

GAMBE



[www.unabeauty.it](http://www.unabeauty.it)

UNIA  
SALON & SPA

GARY  
FELIX  
ART

# Posters à personnaliser

POUR TOUTES LES EXIGENCES, DE TOUTES LES TAILLES QUE VOUS VOULEZ.

**Nouvel applicateur, nouvelle communication.** Nous réalisons pour vous des Posters personnalisés à votre nom, où votre Centre et les technologies que vous voulez mettre en valeur sont toujours au premier plan. La proposition de la communication change tous les ans, avec de nouvelles mannequins et de nous témoins, pour que l'image de votre Centre soit toujours nouvelle.



**Vaste gamme de formats.** Vous pouvez choisir dans notre catalogue marketing le Poster que vous voulez personnaliser, parmi des dizaines de solutions selon les traitements ou les technologies. Les Posters existent en différentes tailles et matériaux, pour tirer le meilleur avantage de chacun de vos espaces, de la simple affiche pour votre vitrine aux panneaux à placer dans la rue.





LA TECNOLOGIA  
NON INVASIVA  
AL SERVIZIO DEL TUO  
BENESSERE.



UNIV  
TECNOLOGIA

# Brochures à personnaliser

A COMPOSER SELON LES TECHNOLOGIES QUE VOUS UTILISEZ.

**Vous mettez en valeur ce que vous voulez, vous n'achetez que sur demande.** Vous pouvez faire de la publicité pour les technologies que vous n'avez pas encore et n'acheter que les applicateurs pour les traitements qui vous sont demandés. Lorsque vous les aurez commandés, vous les recevrez en si peu de temps que vous pourrez déjà planifier les rendez-vous. Pour des investissements réellement ciblés.



**C'est vous qui choisissez lequel utiliser.** A trois volets, pour une communication rapide et incisive, ou avec plus de place pour pouvoir décrire les traitements et technologies ? Non seulement nous vous assistons dans le choix de la brochure la plus adaptée à vos campagnes promotionnelles, mais nous vous assistons aussi dans la réalisation : nous pouvons nous charger de l'imprimer, ou envoyer les fichiers définitifs à votre typographe de confiance.



TUO NOME

## CROMO

L'ENERGIA DEI COLORI PER IL TUO BENESSERE PSICO-FISICO

VISO

CORPO

GANCI



- ARMONIZZAZIONE DEI RITMI
- POTENZA L'ELASTICITÀ E IL TONO DEL TUO TESSUTO
- APORTA LA RILASSAZIONE AL SUO CORPO (NON BRUCIATURA)

UNUN  
TECHNOLOGY

www.unbeauty.it



TUO NOME

## MESOPORAZIONE RADIOFREQUENZA PRESSO



VISO

BRACCIA

PANCA

FIANCHI

COSCE

### MESOPORAZIONE

- ATTENUA LE IRREGOLARITÀ DELLA CELLULITE
- RIDUCE LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
- ATTENDE I SIGNI DEL TEMPO: RUGHE, SMAGLIATURE, MACCHIE SENNI
- CONTRASTA EFFICACEMENTE IPOTONIE E CEDIMENTI TISSUTALI

### RADIOFREQUENZA

- ATTENUAZIONE VISIBILE DELLE RUGHE
- MIGLIORAMENTO DELL'OSSIDENAZIONE DEI TESSUTI
- RARMONIZZAZIONE DELLA FISIONOMIA DEL VISO

### PRESSO

- RIDUCE GLI INTESTINI DELLA CELLULITE
- DRENA EFFICACEMENTE I LIQUIDI IN ECCESSO
- MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE VENOSA E LINFATICA

UNUN  
TECHNOLOGY

www.unbeauty.it



# Présentoirs

METTEZ VOTRE IMAGE EN VALEUR.

**Pous ne jamais passer inaperçue.** Une vaste gamme de solutions professionnelles pour l'exposition, afin de mettre au mieux votre image en valeur : fixes ou mobiles, à une ou deux faces, avec les posters que vous choisissez et que vous pouvez remplacer toute seule. Pour faire en sorte que votre message aille toujours droit au but.



**Illuminez votre communication.** Vous pourrez choisir d'élégants présentoirs lumineux, disponibles en différents formats pour mieux les adapter aux espaces de votre Centre. Dans ces modèles aussi le poster illuminé par derrière est interchangeable, pour que vous puissiez le changer directement toute seule.





WINA

P O I N T

BEAUTY CENTER

CENTRO AUTORIZZATO  
A NORMA DI LEGGE

2011

# Enseignes et vitrauphanies

GUIDEZ LES CLIENTES AU BON ENDROIT.

**Votre vitrine : votre carte de visite.** Personnalisez vos vitrines et votre porte d'entrée avec les vitrauphanies UNA et montrez tout-de-suite les services que vous pouvez offrir. Une vaste gamme de formes et dimensions de vitrauphanies, réalisées selon les niveaux de compétence acquis en suivant les cours, ou en fonction des technologies (applicateurs) que vous possédez.



**Marque de compétence et de professionnalisme.** L'utilisation de l'enseigne UNA transmettra un message positif à la clientèle, ancienne et nouvelle. Le public saura tout-de-suite que vous faites partie d'un circuit qui utilise des méthodes de traitement soumises à des essais et testées en clinique. Entrer dans votre centre entendra trouver tout ceci : compétence, professionnalisme et sécurité.





UNA  
L'ambasciata  
della moda

UNA

# Ameublement dédié

## COMPLÉMENTS D'AMEUBLEMENT MODULABLES.

**La seule limite est celle de votre fantaisie.** Chaque module est indépendant, et vous pouvez l'utiliser seul ou associé à d'autres, en réalisant la composition la plus fonctionnelle et adaptée à vos besoins. Les quatre éléments de base peuvent être complétés par une vaste gamme d'accessoires, faciles à intégrer.

### Accessoires des modules :

- Tiroirs à ouvrir des deux côtés.
- Etagères de différentes tailles.
- Portes en verre avec clé de sécurité.
- Crochets de mur et pieds réglables.
- Eclairage interne pour chaque module.





# Accessoires et compléments

LE PLUS GRAND SOIN, JUSQUE DANS LES DETAILS.

**Accessoires.** UNA fournit tout ce dont vous avez besoin pour faire au mieux votre travail. Dans le Store, en plus de tous les autres produits, vous trouverez aussi un nombre d'accessoires, comme les chariots ou les trolley antichoc, pratiques pour le transport de votre UNA, le tout en plusieurs modèles et formats. Le catalogue est en évolution continue, avec des produits déjà disponibles et en préparation.



**Broderies personnalisées.** Visez une image à l'impact important : avoir une blouse, ou simplement les serviettes personnalisées avec le nom de UNA, vous donnera une image différente, plus professionnelle. Nous vous proposons un service de broderie pour personnaliser tous les vêtements qui vous intéressent, choisis parmi une vaste gamme de produits, avec le logo de votre Centre.





UNA Info



# Made in ITALY, à 100%

PENSEE, CONÇUE ET PRODUITE EN ITALIE.

**Qui sommes-nous ?** Nous concevons et produisons depuis plus de 15 ans, pour des entreprises internationales, des appareils électroniques pour les secteurs Esthétique, Médical, Militaire, Aérospatial et Sécurité. Les produits que nous réalisons sont approuvés par les plus grands organismes de certification aussi bien en Europe (Ministères, Universités) qu'aux Etats-Unis (FDA).



**Tout est chez nous.** UNA a été conçue dans notre entreprise même : l'électronique, le logiciel, jusqu'au graphisme. Et tout est fait par nos lignes de production : les cartes électroniques, les assemblages, les tests. Cela nous a permis de réaliser ce qui est peut-être le système le plus évolué de son genre à un prix avantageux.





# Acheter UNA

COMMENT AVOIR UNA DANS VOTRE CENTRE.

## Avant, faites un essai

**L'expérience directe est irremplaçable.** Il est très difficile d'expliquer par des mots la simplicité de l'utilisation de UNA et la perception de qualité qu'elle transmet dès le premier usage. Ce n'est qu'en la voyant et en l'utilisant que vous pourrez comprendre la différence par rapport à d'autres systèmes.

**Un agent amènera UNA dans votre Centre.** Vous pouvez décider d'une visite directement dans votre Centre de notre agent de secteur, qui vous amènera UNA pour vous faire connaître toutes ses fonctions. La visite ne vous engage pas à l'achat.

**Venez nous rendre visite à l'atelier.** Si vous voulez des informations plus approfondies et si vous voulez voir où elle est produite, vous pouvez organiser une visite durant l'un des jours de formation. Nos consultants pourront vous faire faire des essais pratiques, afin que vous appréciiez l'efficacité des traitements.

## Modalités

**Vous l'achetez chez le fabricant.** L'achat se fait directement chez nous, à travers les agents. Notre organisation commerciale ne prévoit pas de distributeur ou de revendeur : aucun coût supplémentaire pour vous. Nous ne prévoyons pas la location, le leasing, ou le pay per use.

**Méthodes de paiement.** Il existe différentes formules de paiement pour l'achat de UNA. Vous pouvez les établir avec notre agent, selon vos exigences. Certaines solutions prévoient des mensualités à partir de 200 euro par mois et vous donnent la plus grande flexibilité et commodité de paiement.

**Assistance complète.** Nous pouvons vous aider dans la gestion des dossiers pour les financements à fonds perdu et facilités mis à disposition par tout organisme national, association artisanale et de catégorie, ou simplement pour envoyer tous les documents nécessaires à votre banque ou société financière.



# Partner Program

NOUS COLLABORONS AVEC LES MEILLEURS.

**UNA Partner Program** est le programme qui s'adresse à ceux qui veulent collaborer avec nous dans le but de faire évoluer la plateforme UNA. Il s'adresse aux opérateurs du secteur, chercheurs, industries qui veulent véhiculer leurs produits et leur technologie en les intégrant dans UNA.

**Partenariat Développeurs.** Il s'adresse aux Médecins, Opérateurs en Esthétique, Chercheurs universitaires et Ingénieurs qui ont mis au point de nouveaux protocoles, méthodes et procédures de traitement, ou de nouvelles technologies et applicateurs qui peuvent être implémentés et distribués avec la plateforme UNA. Grâce à ce type de collaboration, ils pourront diffuser immédiatement leurs idées et découvertes à un grand nombre de clients.

**Partenariat Entreprises.** Il s'adresse aux Entreprises qui évoluent déjà dans le secteur avec des technologies, cos-

métiques et accessoires, qui souhaitent les associer aux protocoles de UNA.

Grâce à ce type de collaboration, ils pourront ajouter un canal de vente privilégié pour leurs produits : le Store de UNA.





# UNA et l'Environnement

L'ENVIRONNEMENT S'EMBELLIT AUSSI AVEC UNA.

**UNA contribue à un monde plus propre.** Nous avons conçu et construit UNA en pensant au respect de l'environnement et à la réduction de tous les impacts possibles, aussi bien durant sa vie que lors de sa mise au rebut.

**Moins de déchets à éliminer.** Le concept révolutionnaire de UNA réduit considérablement la quantité de déchets à éliminer. Un seul conteneur, un seul emballage, un seul kit de composants électroniques, au lieu de ceux de 20 machines différentes.

**Moins de produits à jeter.** Moins de produits inutilisés dans un stock qui risque d'arriver à la date de péremption, moins de déchets qui ne sont pas nécessaires, moins d'emballages.

**Moins de papier à imprimer.** Grâce à UNA il y aura beaucoup moins de papier à imprimer, car les catalogues électroniques sont intégrés dans le système et se mettent à jour continuellement. Toute la procédure d'achat est au format électronique.

Vous pouvez imprimer uniquement ce qui est strictement nécessaire, comme l'autorisation à faire signer aux Clientes.

**Moins d'émissions.** Grâce à la rationalisation des processus d'achat, de vente et d'assistance, de nombreuses activités pourront être faites à distance, sans qu'il faille sortir du bureau, réduisant ainsi les émissions de gaz d'échappement dans l'atmosphère.



Les applicateurs

## ELECTROPORATION



**Poignée Diffuseur** - Poignée avec manche en PVC et tête à sphères en acier. Conçue spécialement pour les traitements de diffusion des composés pour le transfert transdermique et l'électroporation. [MDFC-0006]

## LIPOCAVITATION



**Tete Cavitation** - Tête à ultrasons basse fréquence 28 et 33 Khz. Corps en PVC avec poignée ergonomique facile à utiliser. Indiquée pour les traitements de cavitation, à utiliser sur les pannicules adipeux. [CAV-0001]

## RADIOFREQUENCE



**Poignée Sonde** - Poignée constituée d'un manche courbé en plexiglas, comprenant deux accessoires plats en acier A7 et A8 avec raccord M4, indiqué pour les traitements par radiofréquence. [MRDF-0006]



**Poignée Capacitive** - Poignée avec



**Poignée résistive** - Poignée avec disques radiaux résistifs pour les applications de radiofréquences localisées. Disques non inclus. [MRDF-0008]



**Poignée Bipolaire** - Poignée radiofréquences bipolaire particulièrement indiquée pour les traitements Visage et Corps. [MRDF-0009]



**Poignée Aiguille** - Porte-aiguille, constitué d'un manche anti-glisse ; il utilise un système à mandrin avec couvercle pour brancher l'aiguille d'épilation. Grâce à ses formes restreintes, il est extrêmement maniable et précis, puisqu'il atteint les points critiques comme par exemple la zone du menton. [MRDF-0001]



**Poignée Sélective RF** - Poignée pour traitement RF sélectif, composée d'un applicateur et d'un Kit de pointes interchangeables. [MRDF-0003]



**Applicateur RF à Scanner** - Appli-

cateur pour traitement de radio fréquence non surveillé, composé d'une boîte de dérivation et d'électrodes à appliquer sur le corps. [MRDF-0004]

## CRYOELECTROPHORESE



**Kit Cryoelectroforese** - Câble avec Verres interchangeable pour les traitements de Cryoélectrophorèse Corps et Visage. Kit comprenant 2 Verres de 100 ml et 2 verres de 50 ml. [CTD-0001]

## LASER ESTHETIQUE



**Poignée Laser** [MNLS-0001]



**Poignée Aspiration Laser** - Poignée d'Aspiration avec Laser intégré pour le traitement des rides et de la laxité cutanée. [LASS-0004]

## MESOPORATION



**Poignée Mésoporation** - Kit Poignée pour les traitements de Méroporation composé d'électrode Diffuseur et de Pointe. [MDFC-0008]

## IPL LUMIERE A IMPULSIONS



**Poignée lumière pulsations IPL** - Poignée et module IPL avec fenêtres antérieures interchangeables selon la zone à traiter. La Poignée est dotée d'une module externe pour l'activation commandée de l'unité centrale UNA. *[IPL-0001]*

## VACUUM



**Coupelles Aspiration** - Coupelles d'aspiration de 8 et 3 cm de diamètre. *[VAC-0005]*



**Poignée Vacuum** - Poignée avec manche en Pvc, système anti-glisse (grip) et raccord rapide, pour les traitements sous vide et la stimulation active du derme, avec kit d'accessoires interchangeables. Indiqué pour le traitement du visage. *[VAC-0001]*



**Poignée Electrovacuum** - Poignée pour traitements combinés de Vide, Microcourants, Chromoesthétique. A utiliser sur le corps. *[VACE-0008]*



**Poignée Thermovacuum** - Poignée pour les traitements Thermovacuum à



**Poignée Lymphodrainage** - Poignée à coussinets pour massage lymphatique et anticellulite. Corps en plastique et manche ergonomique. *[VAC-0002]*



**Cannule aspire-comédons** - Cannule de verre pour l'aspiration des comédons par dépression avec système sous vide. *[VAC-0003]*



**Nébulisateur Spray** - Flacon pour liquide à relier à l'appareil de nébulisation des produits cosmétiques et pour les traitements de transfert. *[VAC-0004]*

## PRESSO



**Kit Presso** - Kit pour le pressomassage doté de sacs jambières/brassières, poche sous-lit, sacs pour les pieds. Le Kit comprend un module externe pour connecter les sacs, doté de 11 sorties programmables selon le traitement. *[PRES-001]*

action combinée de stimulation thermique et massage Vacuum. Le massage est particulièrement agréable, grâce aux sphères qui agissent au contact de la peau. *[VACT-0001]*

## ULTRASONS



**Tête 1MHz** - Tête de 1 MHz avec poignée ergonomique en PVC pour une prise facile et des mouvements faciles sur le corps. *[TSUL-0001]*



**Tête 3MHz** - Tête avec poignée ergonomique en PVC à ultrasons haute fréquence de 3 Mhz. Indiquée pour les traitements par ultrasons visant à traiter la cellulite. *[TSUL-0003]*



**Spatule à Ultrasons** - Sspatule à Ultrasons basse fréquence de 25 Khz avec bouchon de fermeture et de protection. Indiquée pour les traitements du visage exfoliants et de sonophorèse. *[SPTL-0001]*



**Plaques Ultrasons** - Plaque à ultrasons 3 MHz pour les traitements esthétiques. La conformation particulière permet d'utiliser la plaque en mode autonome et non dirigé. Elle est fixée sur le corps par des bandes élastiques bleues (non incluses). *[ULTS-0006]*

## ELECTROSTIMULATION



**Electrodes 2 CH** - Electrodes visage deux Canaux. Pour les Traitements d'électrostimulation et diélectrolyse. *[CVLT-0001]*



**Pince à épiler** -Pince à épiler dotée d'une poignée ergonomique et ongle de protection en ABS. *[PNDP-0001]*



**Electro-stimulation 8 CH** - Kit à 8 Canaux de Sortie pour les traitements du Corps et du Visage. Le kit comprend la boîte de dérivation pour l'électro-stimulation séquentielle. *[CEC-0002]*



**Electrode de Masse** - Electrode de Masse à tenir en main par le Client durant les traitements afin de fermer l'anneau de masse du circuit. *[MNA-0002]*

## MICROCOURANTS



**Applicateur à sphères** - Poignée pour les traitements de stimulation et reflexologie. Constituée d'un corps en aluminium satiné, dotée de sphères en laiton chromé diamètre 15 mm. *[APSF-0001]*



**Poignée Microrélectrodes-laser** Poignée pour le traitement des Rides par Micro-stimulation. Dotée d'une pointe interchangeable de 5 et 9 microélectrodes à utiliser selon la longueur de la ride. *[MNA-0001]*



**Poignée Pointe** - Poignée avec manche en aluminium satiné et raccord M4 et kit accessoires. Indiqué pour les traitements du visage de méso-poration. *[MMC-0003]*



**Poignée Sphère** - Poignée constituée d'un manche ergonomique avec système anti-glisse grip et raccord M4. Indiquée pour l'application d'électro-drainage et de microstimulation. N.B. Accessoire non inclus. *[MMC-0004]*



**Poignée Miolift** - Poignée constituée d'un manche ergonomique avec système anti-glisse grip et raccord M6, doté d'accessoire cylindrique en acier A24. *[MMC-0002]*



**Microstimulateur 3 sphères** - Poignée avec manche en PVC, dotée de trois sphères en laiton chromé diamètre 20, indiqué pour la microstimulation du corps. *[MMC-0006]*



**Microstimulateur 6 sphères** - Poignée avec manche en PVC, dotée de six sphères en laiton chromé diamètre 20 montées sur des bras réglables, pour s'adapter aux différentes parties du corps, indiqué pour les traitements de microstimulation. *[MMC-0005]*



**Poignée Roller Corps** - Poignée constituée d'un manche ergonomique avec système anti-glisse et raccord M4. Indiqué pour les traitements du corps, excellent pour une utilisation prolongée. N.B. Accessoire non inclus. *[MMC-0007]*

## THERMO



**Applicateur thermo** - Poignée pour traitements Thermo à contact, avec température réglable par les programmes. *[PTT-0001]*



**Couverture Thermique** -Thermo-couverture à 3 secteurs indépendants (Abdomen, Fessiers, Jambes) pour traitements Thermiques. Fermeture velcro. *[THER-0001]*



**Bandes Thermiques** - KIT Bandes composé de 2 Jambières et un Corset pour traitements Thermiques. Fermeture velcro. *[THER-0002]*

## PHOTOSTIMULATION



**Poignée rejuvenissement** - Poignée Lumière BLEU pour Photo-rajeunissement *[MAN-RIN001]*



**Poignée photo-stimulation** -  
MPoignée Photothérapie Lumière Mix  
[MAN-CF52]

## MAGNÉTO



**Plaquette magnéto** - Plaquette magnétique avec anse pour fixation avec grip.  
[PMT-0001]

## IR INFRAROUGES



**Plaquettes infra-rouge** - Plaquettes pour les traitements IR. A fixer directement sur le corps central à l'aide des bandes de velcro non incluses. [IRPL-0004]

## IONOPHORESE



**Pointe Eponge** - Poignée avec manche en aluminium satiné et raccord M4 avec kit porte-éponge. Indiqué pour la recherche et la stimulation des points moteur. Le kit porte-éponge seul est également disponible (voir sous la mention accessoires). [IOPT-0004]



**Poignée Eponge** - Poignée avec manche en aluminium satiné et raccord M4



avec kit porte-éponge. Indiqué pour la recherche et la stimulation des points moteur. Le kit porte-éponge seul est également disponible (voir sous la mention accessoires). [IOMS-0005]

## CHROMO

**Plaquettes chromo** - Plaquettes pour traitement esthétique de chromo. [LACR-001]

**Poignée Chromo IR** - Poignée constituée d'un corps en PVC et lampe chromo chauffante. Indiquée pour les traitements de chromothérapie et vasodilatation pour véhiculer les produits ou lotions. [CRMA-0007]

**Stylo Chromo** - Poignée constituée d'un corps en PVC et micro-lampe pour les traitements Chromo. Particulièrement indiquée pour le traitement des Rides du Visage. [CRPN-0006]

**Tête Chromo-chauffante** - Poignée constituée d'une tête chromo-chauffante avec la possibilité de contrôle numérique de la température. Marge de 42 à 45 degrés. [CRTS-0004]

**Masque Thermique** - Pour traitements Thermo sur le visage. [THER-0003].



## ABRASION DERMIQUE

**Brosse dermo-abrasion**- Poignée Brush avec brosses interchangeables selon la zone à traiter. La vitesse de rotation des brosses est réglable, pour une action modulée et spécifique pour toutes les exigences. [DAM-0001]



**Poignée pour Microdermoabrasion**  
Poignée avec manche en aluminium satiné, dotée de capuchon jetable interchangeable. Créé spécialement pour les traitements de dermoabrasion aux Cristaux de Corindon. [MDA-0001]



**Poignée Scrub** - Poignée dotée de tête oscillante, avec kit porte-éponge pour le traitement par peeling superficiel, à utiliser avec les produits de scrub. [MDA-0004]



## AUTRE




**Microscope à contact** - Applicateur Microscope avec agrandissement de 50 à 200 X.. [MIC-C054]



Données et informations techniques

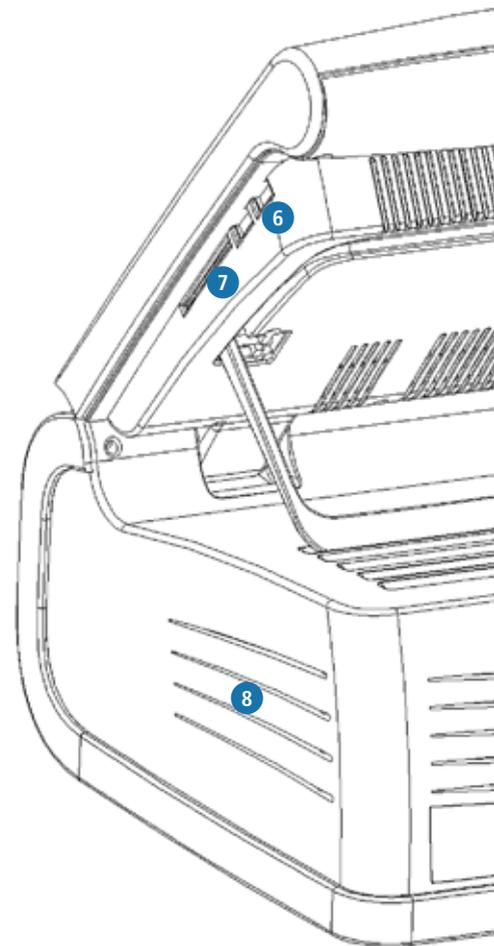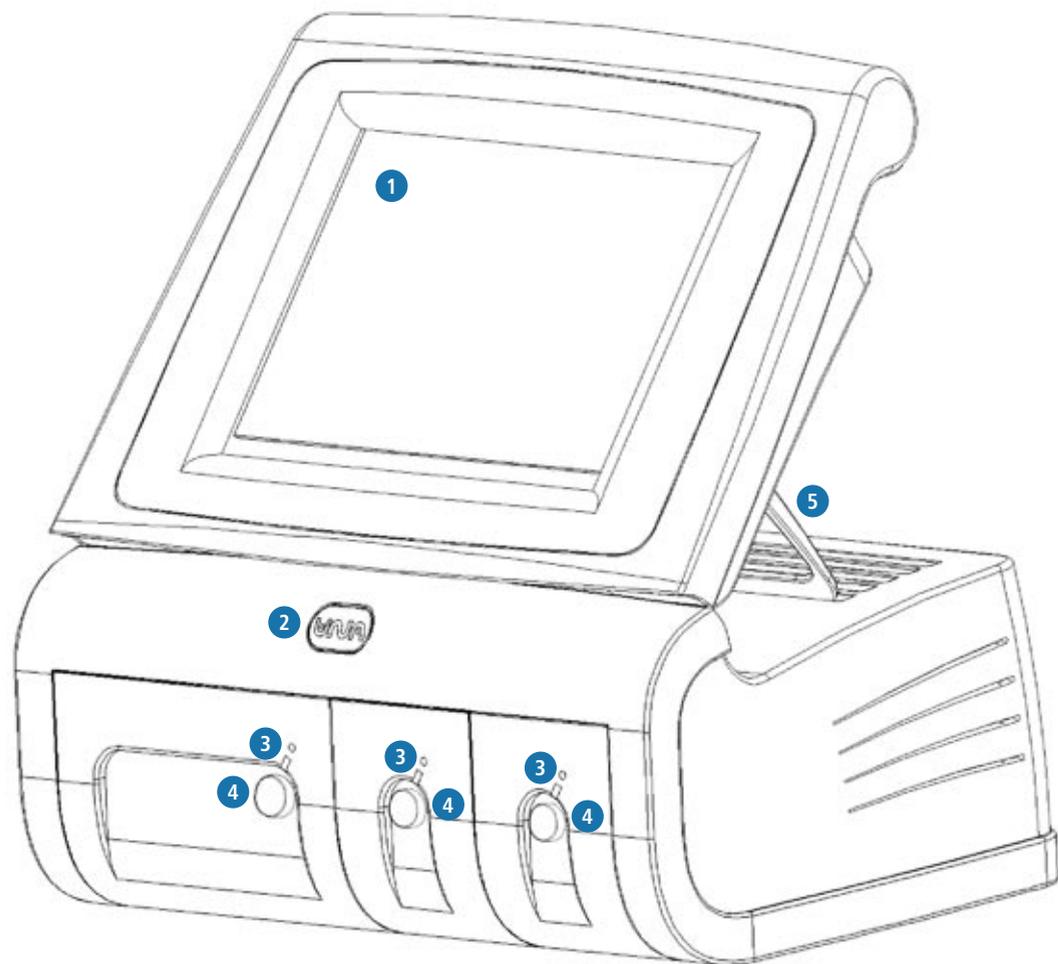

# Faisons connaissance avec UNA

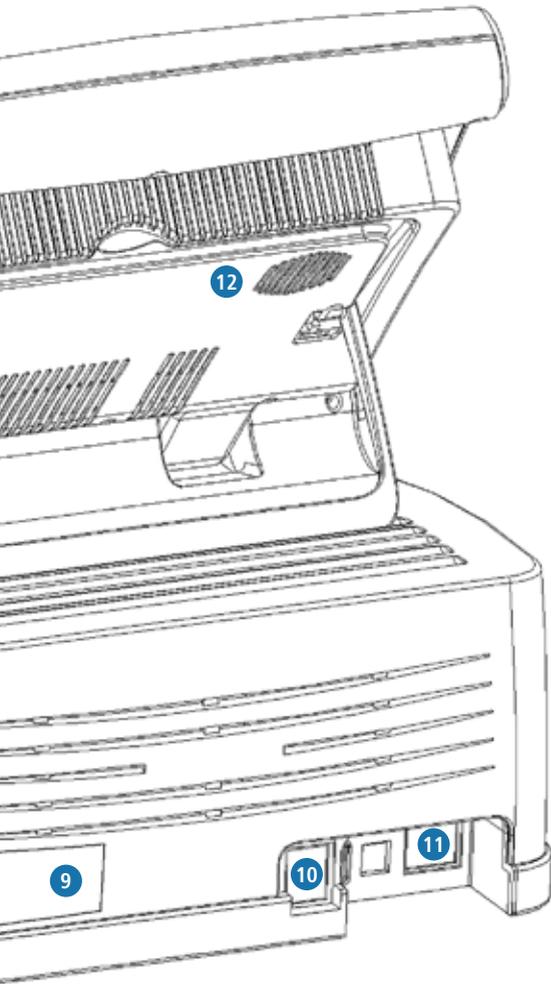

- |   |   |    |                           |
|---|---|----|---------------------------|
| 1 | Ecran tactile                             | 7  | Prise smart card          |
| 2 | Bouton UNA multi-fonctions                | 8  | Grilles d'aération        |
| 3 | Voyants d'état des modules                | 9  | Etiquette données machine |
| 4 | Prises universelles pour les applicateurs | 10 | Interrupteur général      |
| 5 | Etrier de réglage écran                   | 11 | Boîtier fusible           |
| 6 | Prises USB                                | 12 | Haut-parleur              |



# Modules et Technologies

	GENERA01*	GENERA02*	PUMPF01*	LIGHTPULSE	MICRODERM	OXYGEN
ELECTROPORATION	•	•				
LIPOCAVITATION **		•				
RADIOFREQUENCE	•	•				
CRYOELECTROPHORESE	•	•				
LASER ESTHETIQUE	•	•				
MESOPORATION	•	•				
IPL LUMIERE A IMPULSIONS				•		
VACUUM			•			
PRESSO			•			
ULTRASONS	•	•				
ELECTROSTIMULATION	•	•				
MICROCOURANTS	•	•				
THERMO	•	•				
PHOTOSTIMULATION	•	•				
MAGNÉTO	•	•				
U.V. ULTRAVIOLETS	•	•				
IR INFRAROUGES	•	•				
IONOPHORESE	•	•				
CHROMO	•	•				
ABRASION DERMIQUE	•	•				
MICROABRASION DERMIQUE					•	
OXYGENE						•

\* Modules présents dans la configuration standard

\*\* Ne peut être effectué par le Centre esthétique

⚠ Lire la documentation de référence pour chacune des fonctionnalités

← A la page précédente, UNA est représentée avec le chariot de support et le module IPL (LightPulse)

**ULTRASONS****Fréquences de sortie :**

- 1 MHz +/-5% continue et par impulsions
- 3 Mhz +/-5% continue et par impulsions
- 30 KHz (28-33 KHz) Méthodique, dite Cavitation (\*)

**Densité énergétique maximum en sortie pour toutes les fréquences :**

- 3W/cm2 en mode pulsations
- 2W/cm2 en mode continu

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des Traitements de 0 à 60 minutes
- Auto-Calibrage fréquence Tête
- Auto-Calibrage sensibilité (uniquement certains modèles de tête)
- Sélection type de programme en mode pulsations 25%-50%-75%
- Emission en mode continu 100%
- Activation à pédale ou continue

**RADIOFREQUENCE****Signal de sortie :** sinusoïdal**Fréquence de sortie :**

- 500 KHz – 1,500 KHz – 2,500 KHz

**Type d'application selon les poignées :**

- Monopolaire – Bipolaire
- Résistive – Capacitive

**Puissance W selon l'applicateur et la fréquence**

- 2,500 KHz – 70 W
- 500 KHz – 50 W
- 1,500 KHz – 80 W

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**RF POUR EPILATION****Signal de sortie :** sinusoïdal avec fréquence de 2,8 MHz**Modes d'émission :**

- Thermolyse (émission habilitée par la pression de la pédale)
- Flash (émission activée par la pédale d'émission, mais avec réglage de la durée indépendant) ;
- A pulsations (émission ensemble multiple par la pédale, durée de l'impulsion réglable de 50 à 1000 mSec.)

**Puissance Maximum de sortie :**

- Max 10 Watt RMS @ 150 Ω.

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des Traitement de 0 à 60 minutes
- En mode pulsations nombre d'ensembles : de 1 à 4.
- Activation a pédale ou continue

**MICRO-COURANTS****Signal de sortie :** sinusoïdal modulé**Fréquence porteuse :**

- 6,000 Hz (6 KHz)

**Modulation de fréquence :**

- diadynamique bi-phase à 100Hz

**Courant de sortie maximum :**

- 8mA @ 1KΩ

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**MAGNÉTO****Fréquence de la pulsation :** de 1 à 100 Hz.**Tension de sortie maximum :** 25Vpp**Durée de la demi-onde :** 10ms.

- Mod. 25Hz T = 2 demi-ondes + pause de 20ms
- Mod. 50Hz T = 1 demi-onde + pause de 10ms
- Mod. 100Hz T = 2 demi-ondes sans pause
- Mod. 10Hz T = 5 demi-ondes + pause de 5ms.

**Puissance maximum induction magnétique :**

- de 1 à 50 Gauss (v. Applicateur)

**Réglages:**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COURANTS BIPOLAIRES**

**Signal de sortie :** sinusoïdal modulé

**Fréquence porteuse :** 0,1-4250Hz

**Modulation de fréquence :** 0-250Hz

**Type d'oscillation :**  
variable en durée et ampleur de 1 à 6 sec.

**Courant de sortie maximum :**  
90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**  
180Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COURANTS DE KOTZ**

**Signal de sortie :** sinusoïdal modulé

**Fréquence porteuse :** 2500Hz

**Onde modulante :** Carrée à 6-12-25-50-100-200 Hz

**Courant de sortie maximum :**  
90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**  
180Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COURANT RECTANGULAIRE**

**Signal de sortie :** rectangulaire

**Durée de la phase :** T 0,1msec – 1,000msec

**Durée de la pause :** T 1sec – 10sec

**Courant de sortie maximum :**  
90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**  
90Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COUR. DIADYNAMIQUES BI-PHASE**

**Signal de sortie :** bi-phase avec fréquence 100Hz (Df)

**Courant de sortie maximum :**  
90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**  
180Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COUR. DIADYNAMIQUES MONOPHASE**

**Signal en sortie :**

- Monophasé avec fréquence 50Hz (MF)
- Monophasé profonde avec fréquence 143Hz (Mp)

**Courant de sortie maximum :**  
90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**  
180Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COURANTE T.E.N.S.****Signal de sortie :**

bi-phase asymétrique à impulsions

**Durée de la phase :**

50-200 microsecondes

**Fréquence :** 5-400Hz**Courant de sortie maximum :**

90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**

180Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**COURANT FARADIQUE****Signal de sortie :** rectangulaire**Durée de la phase :** 1msec**Fréquence :** 5-400Hz**Courant de sortie maximum:**

90mA @ 1K $\Omega$

**Tension de sortie maximum :**

90Vpp @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**IONOPHORESE****Signal de sortie :**

courant continu positif et négatif non interrompu, unidirectionnel, sans variations d'intensité.

## Courant maximum de sécurité :

30 mA @ 500 Ohm

## Tension de sortie maximum:

25V @ 1K $\Omega$

## Réglages :

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**DESINCRUSTANT****Signal de sortie :**

courant continu positif et négatif non interrompu, unidirectionnel, sans variations d'intensité.

**Courant maximum de sortie :**

30 mA @ 500 Ohm

**Tension de sortie maximum :**

25V @ 1K $\Omega$

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale ou continue

**PRESSO-MASSAGE****Pression maximum en compression :**

3,5 / 4 Bar (350/400 kPa)  
Portée : 30 litres/min.

**Pression maximum en aspiration :**

850 mBar (-85 kPa)

**Caractéristiques :**

- Canaux de sortie : 11 secteurs
- Sécurité : 1 capteur de pression
- Accessoires : poche de protection lit
- Poches : corps 2 secteurs, jambes 7 secteurs, bras 4 secteurs.

**Réglages :**

- Réglage Pression : 0-180 mmHg et lecture pression poches durant le traitement.
- Durée des traitements de 0 à 59 minutes
- Réglage temps de maintien : 0-10 sec.
- Réglage durée cycle : 0-25 sec.

**ASPIRATION COMEDONS****Pression maximum en aspiration :**

850 mBar (-85 kPa)

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Activation à pédale ou continue

**SPATULE ULTRASONS****Fréquence :**

22,000 –28,000 Hz

**Tension maximum appliquée :** 400Vpp**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Auto-calibrage fréquence oscillation
- Activation à pédale ou continue

**BRUSH A BROSSES****Poignée avec brosses interchangeables de différents types.****Réglages :**

- Vitesse de rotation
- Inversion sens de rotation
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale

**LASER ESTHETIQUE****Longueur d'ondes :** 760 -1,200 nm**Densité Max :** 10 mW/cm<sup>2</sup>**Réglages :**

- Marche, Arrêt
- Mode d'impulsion (continue ou à impulsions)
- Durée de l'impulsion
- Fréquence de l'impulsion
- Durée Max traitement 1,200 secondes (20 minutes)

**IR - INFRAROUGES****Longueur d'ondes :** 770 nm**Puissance :**

de 20mW (à 50 mA avec angle de 20° 5 mm epoxy clear)

**Puissance totale :**

En fonction du type d'applicateur utilisé

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Activation à pédale ou continue

**THERMO**

**Fourchette température :** 34 – 45 °C

**Applicateurs :**

- Couverture thermique : dim. 160x170 cm, 3 zones indépendantes (abdomen, fessier, jambes).

Fermeture latérale à velcro. 100 W

- Masque facial : dim. 30 x 30 cm - 25 W 100% Polyester. Fermeture à velcro et bouton.
- Bande Abdominale : dim. 150x50 cm - fermeture à velcro, 100 W
- Bande Cuisse : dim. 90x40 cm fermeture à velcro, 80 W (2 pièces)
- Poignée à contact : Plage : 34 – 45 °C

**Réglages :**

- Puissance de 0– 100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**CRYOELECTROPHORESE****Signal de sortie :**

- Impulsions simples cadres positifs de valeur moyenne ou nulle
- Fréquence impulsions : 100 Hz- 1700Hz
- Cycle Charge : 50 %.
- Augmentation maximum 0,8 V/sec

**Contrôles :**

Activation avec relevé automatique patient à partir de 0V avec report de 0V en cas de perte patient

**Courant maximum de sortie :**

30mA @ 500Ω

**Tension maximum de sortie :**

25Vpp @ 1KΩ

**Réglages :**

- Puissance de 0– 100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**CHROMO****Fluence en joule au cmq :**

En fonction du type d'applicateur

**Dimensions du spot :**

En fonction du type d'applicateur

**Applicateurs spécifiques en couleur :**

- Rouge, Orange, Vert, Jaune Bleu

**Réglages :**

- Puissance de 0– 100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**U.V. ULTRAVIOLETS****Longueur d'onde :** 375 nm**Puissance :**

10 mW à 20mA 15 ° ouverture

**Puissance totale :**

En fonction du type d'applicateur utilisé

**Réglages :**

- Puissance de 0– 100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**PHOTOSTIMULATION****Longueur d'ondes :**

de 100-1200 nm Cluster ou applicateurs spécifiques de :

- 590-650 épilation
- 550-590 photorajeunissement derme
- 420-440 acné
- 520-540 photorajeunissement épidermide
- 650 dyschromie

**Fluence en joules cmq :**

En fonction du type de poignée

Dimensions du spot :

En fonction du type de poignée

Réglages :

- Durée des impulsions, durée intervalle, séquences
- Puissance de 0– 100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**ELECTROPORATION****Forme d'onde :**

Impulsions simples quadres positifs de valeur moyenne non nulle.

**Fréquence :** 2 – 5,000Hz,

**Cycle de Charge :** 50 %. Impulsions  
Augmentation maximum 0,8 V/sec

**Courant maximum de sortie :**  
30mA @ 500Ω

Tension Maximum de sortie :  
25Vpp @ 1KΩ

Réglages :

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**MESOPORATION****Forme d'onde :**

Impulsions simples quadres positifs de valeur moyenne non nulle, modulées par une onde triangulaire.

**Fréquence porteuse :** 2,000 – 1,800Hz.

**Contrôles :**

- Activation avec relevé automatique à relevé automatique patient à partir de 0V avec un report de 0V en cas de perte du patient
- Indication sonore en fonction du type de poignée à utiliser

**Courant maximum de sortie :**  
60 mA @ 1 KΩ

**Tension maximum :**  
60 Vpp @ 1KΩ

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**VACUUM AVEC COUPELLES****Pression maximum en aspiration :**

850 mBar (-85 kPa)

**Portée compresseur :**

30 l/min.

Rythme d'action :  
de 0 à 85 dec./sec.,

**Fréquence Max. :**

0,1 dec/sec

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- Activation à pédale

**MASSAGE MECANIQUE****Applicateurs :**

- Poignée Rouleaux : association de rouleaux et Vide
- Vide thermique : association de Sphères, Vide et Thermo

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

**MICRODERMOABRASION****Pression maximum en compression :**

3,5 / 4 Bar (350/400 kPa)

**Portée :** 30 litres/min.

**Pression maximum en aspiration :**  
850 mBar (-85 kPa)

**Matériaux utilisés :**

Poudre minérale ou matériau équivalent jetable

**Réglages :**

- Puissance de 0–100%
- Durée des traitements de 0 à 60 minutes

# Modules externes

## MODULE LIGHTPULSE

### Longueur d'ondes

- Filtre 590-650 nm pour épilation
- Filtre 520-540 nm pour stimulation épidermique \*

### Réglages :

- Fluence : de 1,0 à 70,50 Joule/cm<sup>2</sup> – augmentations de 0,1 J/cm<sup>2</sup> gérées par microprocesseur
- Durée impulsion : de 1 à 50 msec.

Energie Max émise 1100 Joule (au niveau lampe).

### Durée de recharge :

2 secondes en fonction de la fluence paramétrée

### Dimensions du spot :

- 35 x 15 mm :
- 20 x 10 mm :

### Contrôle sortie :

- Déchargement contrôlé par l'interrupteur de la poignée (avec footswitch de sécurité)
- Allarmes Température

### Données module.

- Alimentation 220–240 V.
- Puissance absorbée 200 VA
- Courant absorbé 1 A
- Absorption électrique : 750VA
- Fusibles 2 x 4 AT ver. 220 ÷ 240 V
- Poids 12 kg
- Dimensions l 420 x 350x H 200 mm

### Conditions d'exercice :

- Température ambiante : 15°C < T < 35°C
- Humidité de l'atmosphère par l'humidité environnementale max 70%

### Conditions de conversation et transoirt

- Température ambiante : -10°C < T < 70°C
- Humidité environnement : max 90%

### Classe I - Type B

**Numéro de Spot:** 13,000–15,000 flash avec une ampoule.

## MODULE MICRODERM

### Pression maximum en compression :

3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)

### Pression maximum en aspiration :

850 mBar (-85 kPa)

### Matériaux utilisés :

Poudre minérale ou matériau équivalent jetable

### Réglages :

- Puissance de 0–100%
  - Durée des traitements de 0 à 60 minutes
- La définition des spécifications électromagnétiques du module sont en cours.

## MODULE OXYGEN

La définition des spécifications électromagnétiques est en cours.

Modèle	UNA Beauty v.1.0
Classification	Classe I type BF
Finalité d'Usage	Le Dispositif est pour <b>USAGE ESTHETIQUE et NON MEDICAL</b> finalisé à la réduction de l'apparence des inesthétismes. Usage Professionnel pour Opérateurs Abilités HORS DOMICILE
Dimensions	Largeur : 41,5 cm Profondeur : 34 cm Hauteur Fermé : 22,3 cm Poids Configuration Standard : 11,7 Kg
Ecran	Ecran Tactile 12"
Type de Boîtier	ABS V0 Autoextinguible
Slot d'Extension	Boîtier à 4 slot pour modules de configuration et extension.
Modules de configuration standard	1 Module mod. GENERA01 à 1 slot. (1 sortie) 1 Module mod. GENERA02 à 1 slot (1 sortie) 1 Module mod. PUMP01 à 2 slot (1 sortie + 1 sortie air)
Caractéristiques d'alimentation	Tension Alimentation : 90-260Vac – Fréquence Alimentation : 47-63Hz Courant Max absorbé : 4,6 A avec 90 C.A., 2,2° avec 260 C.A. Puissance : 300 W
Paramètres environnementaux Fonctionnement	Température : -20 / 70 ° C. – Humidité : 85 %.
Paramètres environnementaux Conservation	Température : -40 / 80 ° C. – Humidité : 90 %.
Certification <b>CE</b>	CEI 62-39. « Appareils électriques à usage beauté. Guide Général pour la sécurité » Essais de Sécurité Electrique, Thermique, fonctionnement anormal, première panne et contrôle marquages. CEI EN 60601-1-4/A1 (Class. CEI 62-81 ; V1) : Appareils électromédicaux - Partie 1: Règles générales de sécurité – Norme collatérale : Systèmes électromédicaux programmables.
Sécurité Electrique Alimentateur	Safety standards UL60601-1 CSA C22 No 606.1 - TÜV EN60601-1 pending EMC performance (EN60601-1-2: 2001) EN55011 Class B conducted, Class B radiated. EN61000-3-2 Harmonic distortion, Class A&D EN61000-3-3 Line flicker EN61000-4-2 ESD, ±8KV air and ±6KV contact EN61000-4-3 Radiated immunity, 3V/m EN61000-4-4 Fast transient/burst, ±2KV EN61000-4-5 Surge, ±1KV diff, ±2KV com. EN61000-4-6 Conducted immunity, 3Vrms EN61000-4-8 Magnetic field immunity, 3A/m EN61000-4-11 Voltage dips, 30% reduction for 500ms, 60% reduction for 100ms and >95% reduction for 10ms
Systèmes de Sécurité Intégrés	Systèmes de Sécurité Logiciel, Matériel, Visuels et Sonores
Connexion WI-FI	Intégrée. .

**Gruppo Fatrotek s.p.a.**

*Siège social:*

via Matteo Greco, 3  
84131 Salerno

[www.unabeauty.it](http://www.unabeauty.it)  
[info@unabeauty.it](mailto:info@unabeauty.it)

*Show Room et de production:*

via Case Rosse, 22  
84131 Salerno

tel. +39 089 38 13 39  
fax +39 089 38 54 016



## Info Légales

**Brevets.** Le Principe de fonctionnement, l'interface graphique, le protocole de communication, les logiques internes, les modules, la reconnaissance des applicateurs, les méthodes d'auto-calibrage, les schémas de connexion, le branchement modulable, sont couverts par des Brevets.

**Marques déposées.** Les logos, les images, les noms cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires respectifs, même en l'absence d'indications spécifiques.

**Confidentialité.** Certaines fonctionnalités prévoient le respect des obligations légales concernant la Confidentialité pour la gestion des données des Clients (D.Lgs. 196/2003).

**Spécifications techniques.** Les données, les images et tout ce qui est décrit n'ont aucune valeur contractuelle et peuvent être modifiés à tout moment, sans communication préalable, que ce soit pour les extensions ou pour les réductions des caractéristiques et fonctionnalités.

**Technologies.** Certaines technologies ou applicateurs peuvent ne pas encore être disponibles au moment de la commercialisation en Italie.

**Brochures et Termes.** Les termes utilisés pour les Typologies sont entendus comme des inesthésisemes de la peau et du corps. Les termes et informations contenus dans la présente Brochure sont reportés uniquement dans un but publicitaire et ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier les normatives en vigueur.

**Connexion à l'Internet.** Certaines fonctionnalités de UNA (assistance, mise à jour, commandes, etc.) requièrent l'accès à l'Internet, non fourni par la société.

**Configurations.** Certaines technologies décrites dans cette brochure requièrent le chariot de support et son module. La configuration de base ne comprend pas les applicateurs, qui doivent être achetés séparément, selon les exigences.



[www.unabeauty.it](http://www.unabeauty.it)